

GENGIGEL®

forte

Oralni gel

*Idealen za nanos na rane in po operacijah
Posebej oblikovan za enostavno, hitro in učinkovito uporabo*

Hialuronska kislina z visoko molekulsko maso je še posebej skoncentrirana v zunanjih plasteh gingivalnega tkiva, kjer prispeva k zaščitni funkciji paradontalne vezi in njeni trdnosti. Njena prisotnost je nujna za vzdrževanje zdravega gingivalnega tkiva.

Hialuronska kislina ima številne ugodne lastnosti, ki prispevajo k uspešnemu zobozdravstvenemu zdravljenju in ustni higieni.

Posebna lastnost hialuronske kisline je, da lahko absorbira 50-krat večjo količino vode od lastne suhe mase. Ta lastnost, skupaj z molekulsko strukturo hialuronske kisline, ko je raztopljena v vodnem okolju, ji omogoča, da deluje kot pregrada pred vdorom mikroorganizmov in drugih toksinov, ki lahko prispevajo k razvoju paradontalne bolezni, ter tako zagotavlja zelo učinkovito naravno pregrado.

Zahvaljujoč tej zaščitni pregradi Gengigel® Forte pomaga zmanjšati bolečino, spodbuja rekonstrukcijo naravnega tkiva po travmatičnih posegih kot so operacija, vsadki, puljenje zob, luščenje zobnih korenin itd., in spodbuja absorpcijo vode ter tako zmanjšuje oteklino in blaži vnetni proces.

Gengigel® Forte

- Vsebuje biotehnološko izdelano, visokokakovostno in zelo čisto hialuronsko kislino z visoko molekulsko maso neživalskega izvora v obliki natrijeve soli.
- Ima dolgotrajno lokalno delovanje.
- Zaradi posebne sestave izdelka se oprime sluznice.
- Uporabljati ga smejo vsi ljudje brez omejitev, tudi otroci, nosečnice, starejši ljudje in sladkorni bolniki.

Indikacije

Gengigel® Forte je posebej indiciran za zaščito sluznice pri:

- globokih ranah na dlesnih,
- vnetih in/ali bolečih predelih po travmi, kirurških ali paradontalnih posegih, puljenju zob ali subgingivalnem luščenju korenin.

Navodila za uporabo

Takoj po zobnem posegu nanosite majhno količino gela na prizadeto področje tako, da uporabite aplikator ali, potem ko ste si temeljito umili roke, s prstom razmažite gel in ga nežno vtrite v dlesni, dokler prizadeto področje ni popolnoma prekrito.

Uporabljajte enkrat do dvakrat na dan ali po potrebi, razen če vam zobozdravnik svetuje drugače.

Sestavine

Glavna sestavina: Sodium Hyaluronate

Ostale sestavine: Aqua, Xylitol, Cellulose gum, Alcohol, Peg-40 Hydrogenated castor oil, Glycerophosphocholine, Sodium phosphate, Polyvinyl alcohol, Carbomer (Polycarbophil), Dichlorobenzyl alcohol, Trisodium phosphate, Sodium lactate, Sodium hydroxide.

(It may contain citric acid).

Pakiranje

Gengigel® Forte oralni gel v 8 ml tubi

Kontraindikacije: Uporaba izdelka Gengigel® Forte je kontraindicirana v primeru preobčutljivosti na katerokoli sestavino.

Previdnostni ukrepi in opozorila: Izdelka ne uporabljajte, če na njem opazite vidne poškodbe. Shranjujte na sobni temperaturi, zaščiteno pred viri toplote. Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti. Preden tubo po uporabi zaprete, odstranite vse ostanke izdelka. Samo za osebno uporabo. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Če simptomi ne minejo, se posvetujte z zobozdravnikom.