

KAKŠNA JE VLOGA UŠESNEGA MASLA

Ušesno maslo varuje uho pred okužbami, prahom in tujki. Vzdržuje naravno bakterijsko floro na površini kože zunanjega sluhovoda. Prav tako maže bobnič, ki bi sicer postal trd in tog. S tem omogoči dober prenos zvoka.

ZAKAJ JE HIGIENA UŠES TAKO POMEMBNA

V normalnih razmerah se ušesno maslo pomika proti zunanjemu delu sluhovoda, zahvaljujoč gibanju, ki ga povzroča žvečenje. Vsaka okvara v tem procesu vodi h kopičenju ušesnega masla. Posledica tega so zamaški, ki povzročajo slabšo slišnost, šumenje v ušesih, vrtoglavico ...

Uporaba raztopine za ušesno higieno A-cerumen pripomore k ohranjanju čistosti zunanjega sluhovoda in preprečuje nastanek ušesnih zamaškov.

Proizvajalec:  Laboratoires GILBERT
928 Avenue du Général de Gaulle
14200 Hérouville Saint-Clair, Francija

Uvoznik:
DR. GORKIČ d.o.o.
Obrtniška 11, 1370 Logatec, Slovenija



ZA UŠESNO HIGIENO

RAZTOPI
UŠESNO
MASLO



40 mL

Dr. Gorkič

KAJ JE A-CERUMEN

A-cerumen je raztopina za ušesno higieno na osnovi površinsko aktivnih sestavin. Priporočen je za uporabo pri otrocih starosti nad 6 mesecev in pri odraslih.

- Pri redni uporabi odstranjuje ostanke ušesnega masla in preprečuje nastanek zamaškov.
- Raztaplja zamaške iz ušesnega masla.

KAKO DELUJE A-CERUMEN

A-cerumen navlaži in raztopi zamaške iz suhega čvrstega ušesnega masla. Po odstranitvi zamaška se ponovno vzpostavi naravno izločanje ušesnega masla, ki ščiti sluhovod.

PAKIRANJE

40 ml sprej

SESTAVA

Površinsko aktivni snovi rastlinskega izvora (natrijev acil sarkozinat in sladkorni ester), sredstvo za vzdrževanje vlage, podlaga (do 100 %).
Ne vsebuje konzervansov.
Sestavine naravnega izvora.

UPORABA

Za redno higieno:
uporabite 2-krat na teden.
Pri ušesnih zamaških: uporabite zjutraj in zvečer 3 do 4 dni zapored.

SPREJ



NAVODILA ZA UPORABO

1. Nagnite glavo na stran.
2. V izpostavljeni uho 2-krat razpršite raztopino A-cerumen.
3. Zmasirajte predel za ušesno mečico.
4. Vzravajte glavo in obrišite odvečeno raztopino, ki izteče po uporabi izdelka.

OPOZORILO

Izdelek je uporaben do 3 mesece po prvem odprtju. Ne shranjujte v hladilniku. Shranjujte pri temperaturi od 10 do 40 °C. Ne uporabljajte po izteku roka uporabe, navedenega na embalaži.

PREVIDNOSTNI UKREPI

Konice pršilke ne namestite pregloboko v sluhovod, da ga ne poškodujete. Pripomočka ne uporabljajte pri osebah s predrim bobničem, pri ušesnih okužbah ali pri vstavljenih ušesnih cevkah. Pri bolečinah v ušesih se posvetujte z zdravnikom. Pazite, da ne pride v stik z očmi. Ni primerno za uživanje. Po vsaki uporabi odstranite nastavek pršilke in ga sperite z vročo vodo.

SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM!



Leto: 2010
GIL-605798-N-ver1

Zadnja sprememba: 06/12



3 83 0026 960258

LOT



PANTONE Cool Gray 10 C 1

PANTONE Orange 021 C 1

PANTONE 653 C 2

nelakirano