

## URGO OBLIŽI ZA RANE IN ODRGNINE, 5 obližev

Obliži z inovativnim hidrokoloidnim gelom za oskrbo odrgnin in prask.

5 obližev, velikosti 7,3 x 4,5 cm

**LASTNOSTI:** Hidrokoloidna snov se v stiku z izločki rane (eksudati) utekočini in namesto kraste na površini rane tvori vlažen, bel gel. Ta preprečuje, da bi se obliž prilepil na rano in zagotavlja ugodne pogoje za celjenje.

URGO obliži za rane in odrgnine:

- lajšajo bolečino
- spodbujajo celjenje
- se ne prilepijo na rano
- se z lahkoto in neboleče odstranijo

### NAVODILA ZA UPORABO

Prizadeto mesto očistite z vodo in milom ter razkužite. Počakajte, da se rana osuši in nanesite URGO obliž za rane in odrgnine. Priporočljivo je, da obliž pred nanosom nekoliko pogrejete med dlanmi. Prvi obliž zamenjajte po 24 urah, nato na vsakih

48 ur oziroma takrat, ko obliž sam odpade. Rano oskrbite 6-8 dni.

### KONTRAINDIKACIJE

- Opekline
- Okužbe
- Rane, pri katerih obstaja verjetnost sekundarne okužbe (npr. rane, ki niso bile oskrbljene v roku 24 ur po poškodbi).

### PREVIDNOSTNI UKREPI IN OPOZORILA

- ne dotikajte se lepljive površine obliža
- obliža po namestitvi ne premikajte
- obliž naj sega vsaj 1 cm čez rob rane

Urgo paleta izdelkov za sodobno oskrbo ran obsega tudi: Urgo obliže za opekline in Urgo obliže za žulje.

Serijska številka in rok uporabe sta odtisnjena na posameznem ovoju obliža.

**Proizvajalec:** Laboratoires Urgo,  
42 Rue de Longvic, 21300 Chenove, Francija

**Zastopnik in uvoznik:**  
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

