

Cicatridina, dermalno pršilo

SESTAVINE: aluminijev oktenilsukcinat škroba, heksametildisiloksan, mandljevo olje, vitamin E acetat, ksimeninska kislina, eterično olje limone, eterično olje kajeputa, natrijeva sol hialuronske kisline, butan, izobutan, propan

UPORABA: dodatna pomoč pri celjenju površinskih in globokih ran (odrgnine, raztrganine, opekline, kirurške rane, preležanine in razjede).

NAVODILO ZA UPORABO: Pred vsako uporabo poškodovani predel skrbno očistite in vsebnik za pršilo pretresite za boljše razpršitev prahu. Med pršenjem držite pršilo navpično 10 do 15 cm od poškodbe. Pršite izključno na poškodovani predel. Postopek ponovite 2- do 3-krat na dan.

OPOZORILO: Uporaba kateregakoli izdelka, posebno dolgotrajna, lahko pri površinski uporabi poveča preobčutljivost. V takem primeru uporabo prekinite in se posvetujte z zdravnikom o nadaljnji terapiji.

KONTRAINDIKACIJE: Če ste preobčutljivi za sestavine.



**ZELO LAHKO
VNETLJIVO**

OPOZORILO: Vsebnik za pršilo je pod pritiskom. Hraniti v hladnem in suhem prostoru. Vsebnik ne izpostavljajte temperaturam višjim od 50 °C. Ne preklanjajte ali sezigajte ga, niti ko je prazen. Ne pršite v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti izven dosega otrok. Izdelek ne vsebuje ozonu škodljivih snovi. Med uporabo ne kaditi. Izdelka ne smete zaužiti. Preprečiti stik z očmi. Preprečiti statično naelektrenje.

Rok uporabnosti se nanaša na nepoškodovan in pravilno hranjen izdelek. Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabe, ki je naveden na embalaži.

MEDICINSKI PRIPOMOČEK

CE 125 ml e
0373 1753

Proizvajalec: FARMA-DERMA SRL, Via del Bersaglieri, 10-40010 Sala Bolognese, Italija

Uvoznik: DR. GORKIČ d.o.o., 1370 Logatec, Slovenija

Serijski št.: ↓ Rok uporabe: ↓

