

# Proktis-M<sup>®</sup>

## Svečke

**Sestava:** natrijeva sol hialuronske kisline, 5 mg; oljni izvleček azijskega vodnega popnjaka, 60 mg; oljni izvleček ognjiča, 60 mg; oljni izvleček aloe vera, 60 mg; eterično olje kajeputa (*Melaleuca caieput*), 2 mg; polsintetični gliceridi, bht, izopropil paraben, izobutil paraben, butil paraben.

**Uporaba:** dodatna pomoč pri obnavljanju analno-rektalnega kanala (sluznice zadnjika-danke) po proktoloških operacijah (operacijah danke); notranjih in zunanjih hemoroidih; proktitisih (vnetjih danke); kriptitisih (vnetjih žepkov); analnih ragadah (razjedah zadnjika); fisurah (razpokah); perianalnih fistulah (poteh, ki nastanejo pri gnojnih procesih).

**Kontraindikacije:** Ugotovljene so bile posamezne preobčutljivosti za sestavine.

**Navodila za uporabo:** 1 svečko na dan ali po navodilu zdravnika. Pazljivo si umijte roke. Svečko vzamete iz ovoja tako, da potegnete za prirezan rob ovoja.

**Medsebojno delovanje:** Pri sočasni uporabi z drugimi medicinskimi pripomočki ali zdravili se vedno posvetujte z zdravnikom.

**Opozorila:** Uporaba kateregakoli izdelka, posebno dolgotrajna, lahko pri površinski uporabi poveča preobčutljivost. V takem primeru morate terapijo prekiniti in se posvetovati z zdravnikom. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Izdelek ni primeren za uživanje. Izogibajte se stiku izdelka z očmi.

**Rok uporabe in shranjevanje:** Svečk ne uporabljajte po izteku roka uporabe navedenega na embalaži, oz. v primeru, če je embalaža odprta ali poškodovana. Izdelek shranjujte tesno zaprt, zaščiten pred svetlobo in toploto. Shranjujte pri temperaturi od 4 do 25°C.

**Vsebina:** 10 svečk po 2 g

MEDICINSKI PRIPOMOČEK

CE  
0373

SLO 22 L REV 01

 **Proizvajalec:**  
**FARMA-DERMA s.r.l.**  
Via dei Bersaglieri, 10 - 40010 Sala Bolognese (BO), ITALIJA (ITALY)

**Uvoznik:**  
**DR. GORKIČ d.o.o.**  
Obtrniška ulica 11, 1370 Logatec, SLOVENIJA