



Me120

APARAT ZA AEROSOLNO TERAPIJO Z ULTRAZVOKOM

Cenjeni kupec

Najprej se Vam zahvaljujemo za Vašo odločitev in Vam čestitamo, da ste izbrali Aparat za aerosolno terapijo Me120, zelo enostaven in zanesljiv aparat.

Naj Vas spomnimo, da boste v obsežni ponudbi artiklov MEDIKOEL, vedno našli najboljše:


- Aparat za aerosolno terapijo z batnim kompresorjem.
- Aparat za aerosolno terapijo z membranskim kompresorjem.
- Aparat za inhaliranje termalne vode na curek ali paro.
- Avtomatične merilce krvnega tlaka za roko ali zapestje.
- Digitalne ali ušesne termometre.
- Sfigmomanometre z aneroidom ali živosebrnim stolpcem.
- Masažne aparate z infrardečimi žarki proti celulitu ali proti bolečinam.
- Hidromasažne aparate za noge.
- Parne vlažilce prostorov.
- Elektrostimulatorje TENS ali EMS.

OPOZORILA

- O uporabi tega aparata se posvetujte z vašim osebnim zdravnikom.
- Aparat naj ne bo v dosegu otrok.
- Po končani terapiji, se vedno prepričajte, da ste izvlekli vtičak adapterja in izključili aparat iz električne napeljave.


Za pravilno uporabo in dolgo življenjsko dobo vašega novega sistema za aerosol terapijo, si pazljivo preberite naslednje informacije.

Vaš sistem za aerosol terapijo na ultrazvoke Me120

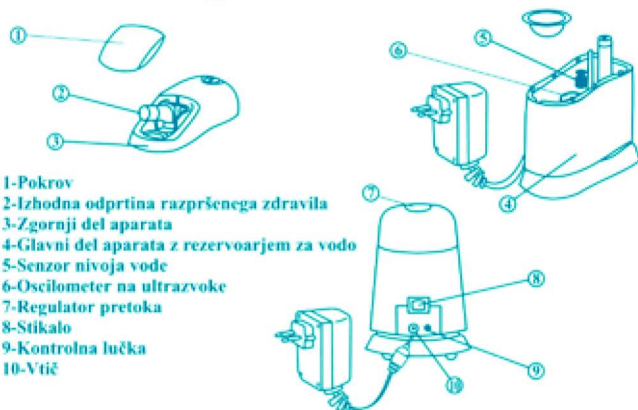

- 1-Pokrov
- 2-Izhodna odprtina razpršenega zdravila
- 3-Zgornji del aparata
- 4-Glavni del aparata z rezervoarjem za vodo
- 5-Senzor nivoja vode
- 6-Oscilometer na ultrazvoke
- 7-Regulator pretoka
- 8-Stikalo
- 9-Kontrolna lučka
- 10-Vtič

Skupaj z aparatom boste v embalaži našli tudi naslednje dodatke, ki so shranjeni v polietilenski vrečki.

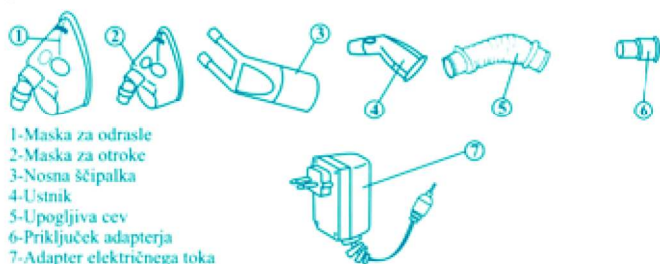

- 1-Maska za odrasle
- 2-Maska za otroke
- 3-Nosna ščipalka
- 4-Ustnik
- 5-Upogljiva cev
- 6-Priključek adapterja
- 7-Adapter električnega toka



PRIPRAVA ZA UPORABO VAŠEGA SISTEMA ZA AEROSOL TERAPIJO

Prepričajte se, da so aparat in vsi dodatki popolnoma čisti in nadaljujte z naslednjimi operacijami:

- Postavite napravo na stabilno in golo ravno površino (miza brez prta ali drugega pokrivala), v bližino vtičnice.
- Odprite pokrov aparata.
- Odstranite zgornji del, kot je prikazano na sliki 1.
- Napolnite rezervoar z mrzlo vodo (po možnosti destilirano) in pri tem uporabljajte manjšo posodo (slika 2). Rezervoar napolnite do označenega nivoja v notranjosti rezervoarja (slika 3): ta voda deluje kot prevodnik med ultrazvočnimi valovi in zdravilom ter se nikoli ne razprši.
- Vzemite posodico za zdravilo in vlijte vanjo vaše zdravilo, kot je prikazano na sliki 4.
- Postavite posodico z zdravilom na ustrezno mesto tik pod zgornjim delom aparata (slika 5) in pri tem pazite, da se zdravilo ne izlije iz posodice.
- Postavite zgornji del aparata na njegov glavni del in pazite, da se oba dela popolnoma prilegata drug drugemu.
- Vzemite priključek adapterja in upogljivo cev ter ju povežite; nato priključite prosti konec priključka adapterja na izhodno odprtino razpršenega zdravila (slika 6) in namesite na prosti konec upogljive cevi eno od priloženih mask, ustnik ali nosno ščipalko, odvisno od željene terapije in pogojev, pod katerimi jo nameravate izvesti.
- Vstavite vtič adapterja v vtičnico na hrbtni strani aparata.

Zdaj je vaš aparat pripravljen za uporabo.

Izvedba aerosol terapije

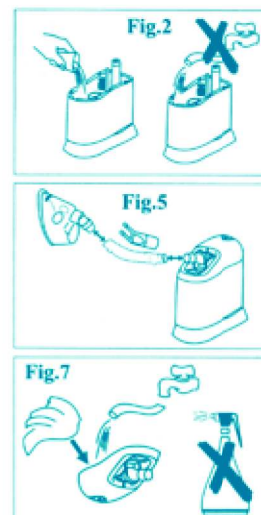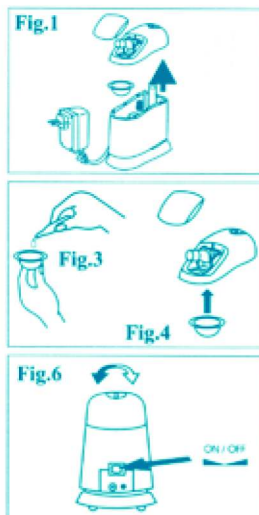

- Vstavite vtičak adapterja v ustrezno vtičnico (glej nalepko na spodnji strani aparata).
- Pritisnite stikalo na zadnji strani aparata: prižge se kontrolna lučka na zadnji strani aparata (zeleno lučka) in nas opozarja, da aparat normalno deluje.
- Začnite s terapijo in med celotnim postopkom držite aparat v navpičnem položaju, kar omogoča pravilno delovanje aparata in maksimalno učinkovitost terapije.
- Sami lahko nastavite hitrost razpršitve zdravila, tako da zavrtite gumb regulatorja pretoka. Pri izvajanju terapij je, predvsem pri otrocih, priporočljivo nastaviti hitrost blizu minimuma, kar olajša usedanje zdravila na stene dihalnih poti.
- Nadaljujte s terapijo, dokler je "oblak" (razpršeno zdravilo, ki ga ustvarja aparat) še opazen.

Opozorilo: popolnoma normalno je, da na koncu terapije ostane v posodici določena količina zdravila. Količine zdravila, ki ji pravimo preostanek, ne moremo razpršiti.

Po končani terapiji:

- Ugasnite aparat s pritiskom stikala v obratni smeri kot pri vklopu.
- Izvlčite vtičak adapterja iz vtičnice.
- Izvlčite vtič adapterja iz vtičnice na hrbtni strani aparata.
- Izvlčite končni del priključka adapterja iz izhodne odprtine razpršenega zdravila in izvlčite masko (ali drugo) iz končnega dela upogljive cevi.
- Izvlčite priključek adapterja iz upogljive cevi.
- Odstranite zgornji del aparata in izvlčite posodico za zdravilo s svojega mesta ter izpraznite rezervoar z vodo.
- Z mehko krpo čimbolj nežno obrišite rezervoar.
- Postavite zgornji del aparata na njegov glavni del.
- Obrnite navzdol izhodno odprtino razpršenega zdravila in postavite pokrov aparata na svoje mesto.
- Očistite masko (ali drugo) in uporabljene dodatke, kot je opisano v naslednjem odstavku.
- Spravite vse dodatke in aparat nazaj v svojo embalažo.

KAKO ČIM DLJE OHRANITI UČINKOVITOST VAŠEGA APARATA

Vaš sistem za aerosol terapijo na ultrazvok Me120 ne potrebuje posebne nege.

Potrebno je le upoštevati naslednja navodila:

- pazite, da vam aparat ne pade ali se drugače poškoduje;
 - v nobenem primeru ne odpirajte aparata;
 - shranjujte aparat na primerem mestu in ga ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposrednim sončnim žarkom, vlagi in prahu;
 - čistite aparat s krpo, ki jo rahlo navlažite z vodo ali nevtralnimi milom (ne uporabljajte bencina, razredčil in podobnih sredstev) in ga nežno obrišite;
 - v nobenem primeru ne potopite aparata v vodo;
 - ne uporabljajte aparata nepretrgoma za več kot 30 minut;
- 2-Po vsaki uporabi je potrebno očistiti vse uporabljene pripomočke. Očistimo jih tako, da jih skrbno operemo pod tekočo vodo. Če jih želite sterilizirati, lahko uporabite hladno raztopino, o kateri se posvetujte z vašim osebnim zdravnikom.
- 3-Svetujemo vam, da uporabite posamezno posodico za zdravilo največ za dve terapiji in jo nato zamenjate.
- 4-Toplo vam priporočamo, da zamenjate zračni filter po 15/20 terapijah ali ko opazite, da filter postaja sivkaste barve. Za zamenjavo filtra je potrebno:
- izvleci kapico za zrak iz razdelka, nameščenega pod podstavkom aparata;
 - odstraniti stari filter in vstaviti novega;
 - postaviti kapico za zrak na svoje mesto.

TEHNIČNI PODATKI:

1-Motor:	Frekvenca oscilacije	5-Teža:	450g
2-Napajanje:	230V 50Hz	6-Mere:	160x180x110
	(115V 60Hz - 100V 50Hz)		

Vse zgoraj našete tehnične podatke lahko proizvajalec spreminja po svoji presoji.

GARANCIJA

Garancijo urejajo veljavni predpisi z ustreznega področja. Z garancijo krijemo napake v materialu in v izdelavi. Garancija ne velja za kable in baterije. Garancija velja v primeru, da aparata ne odpirate ali namenoma poškodujete. Pri uveljavljanju garancije morate imeti izvirmik računa. Za reklamacije se obrnite na prodajalca. Za vprašanja in pojasnila se obrnite na servisno službo www.medikoel.com. Ob ustrezni predložitvi zahtevanih dokumentov, se aparat nadomesti s podobnim. MEDIKOEL ne odgovarja za poškodbe, do katerih pride zaradi zunanjih vzrokov. Zadržek pred napakami ali spremembami.