

NASYA™ je naravno pršilo za nos bez zdravilnih učinkovina, namijenjeno sprečavanju alergijskoga rinitisa. Patentirana tehnologija ThixoPro™ temelji na zmesi ulja i emulgatora, zaradi česar se pršilo NASYA™ edinstveno pretvori iz gela u tekućino i omogućava lažju rasprišev. Ko se pršilo NASYA™ raspriši po nosnoj sluznici, se povrne u prvotno obliku gela i tvori za alergene nepropusnu pregradu. Ta pregrada pomaže blažiti alergijske simptome i zagotavlja do šest ur zaštite pred alergenima.

Medicinski pripomoček razreda I

NASYA™ ne deluje sistemsko, njena varnost i učinkovitost za sta ocenjeni v neodvisni raziskavi. NASYA™ ne vsebuje konzervansov, alkohola ali dišav.

Sestavine:

bentonit, ksantana guma, sezamovo ulje, ulje zelene mete, voda in stabilizatori

NASYA™ je prirodni raspršivač za nos bez ljekovitih tvari namijenjen sprječavanju alergijskog rinitisa. Patentirana tehnologija ThixoPro™ temelji se na mješavini ulja i emulgatora, zbog čega NASYA™ na jedinstven način prelazi iz gela u tekućinu i bolje se rasprišuje. Kada se NASYA™ raspriši po nosnoj sluznici, ponovno prelazi u gel i oblikuje nepropusnu barijeru za alergene. Barijera pomaže u smanjivanju alergijskih simptoma i pruža do šest sati zaštite od alergije.

Medicinski proizvod klase I

NASYA™ nema sustavno djelovanje, a njegova se sigurnost i učinkovitost ocjenjuju neovisno. NASYA™ ne sadrži konzervanse, alkoholi ili parfeme.

Sastojci:

bentonit, ksantana guma, sezamovo ulje, ulje zelene metvice, voda i stabilizatori.

SI HR **Navodila za uporabu/ Upute za uporabu**



Prvi korak
Pred uporabu pršila NASYA™ držite vesebnik pokončno i ga vsaj 4-krat dobro pretresite. Pri tem naj bo prozoren pokrovček na vesebniku.



Drugi korak
Vesebnik obrnite navzdol i ponovno pretresite vsaj 4-krat. Pri tem naj bo prozoren pokrovček še vedno na vesebniku.



Treći korak
Z vesebnika odstranite prozoren pokrovček.
Treći korak
Skinite prozorni poklopac s bočice.



Četrti korak
Pred prvo uporabo pripravite pršilo. Pršilo se pripravi tako, da za 5-10 sekund močnejše pritisnete na beli del aplikatora. Postopek ponavljajte, da nastane lepo razpršena meglica.

Prvi korak
Prije uporabe NASYA™ dobro protresite bočicu najmanje 4 puta držeći je uspravno, zatvorenu s prozornim poklopcem.

Drugi korak
Okenite bočicu naopako i ponovno protresite najmanje 4 puta. Pri tome neka prozorni poklopac još bude na bočici.



Šesti korak
Nagnite se rahlo naprijed. Vesebnik držite pokončno. Vrh nastavka stavite u nosnicu. S palcem podpirajte spjodnji del vesebnika, međem pa s dva prstoma pritisnite navzdol beli obroček.



Peti korak
Pred vsako uporabu si temeljito očistite nos.



Osmi korak
Šesti i sedmi korak ponovite tudi v drugi nosnici. Po uporabi vesebnik zaprite s prozornim pokrovčkom.

Sedmi korak
Po uporabi za trenutek nagnite glavo navzdol i normalno dihaajte skozi nos.

Osmi korak
Ponovite šesti i sedmi korak s drugom nosnicom. Vratite prozorni poklopac na raspršivač.

Sedmi korak
Nakon uporabe nakratko zabacite glavu unatrag i dišite normalno kroz nos.

Šesti korak
Blago se nagnite prema naprijed. Bočicu držite uspravno. Vrh nastavka bočice stavite u nosnicu. Palcem pridržavajte dno bočice, a bijeli prsten pritisnite prema dolje pomoću dva prsta i nakon toga pustite.

Peti korak
Prije svake uporabe temeljito očistite nos.

- Uporabljajte samo u nosnoj votlini. Pršite od enkrat do dvakrat v vsako nosnico, od dvakrat do trikrat dnevno.
- Priporočeno za uporabo pri odraslih i otrocih, starijih od 12 let. Za otroke, mlađe od 12 let, uporabljajte NASYA™ Kids.

140 odmerkov (za približno 15-30 dni)

Shranjevanje

- Po uporabi vedno takoj zaprite s prozornim pokrovčkom. Hranite pri sobni temperaturi v hladnem i suhem prostoru, zaštićeno pred neposredno sončno svetlobo. Nižje temperature lahko vplivajo na velikost kapljic i razprševanje.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom!

Previdnostni ukrepi

- NASYA™ nima znanih neželenih učinok. Sestavine so neaktivne i nestrupene ter se pogosto uporabljajo v živilih i farmaceutskih pripravkih.
- NASYA™ ne povzroća zaspanosti i je primerna za odrasle i otroke, starije od 12 let. Otroci, mlađi od 12 let, naj uporabljajo samo NASYA™ Kids pod nadzorom odrasle osebe.
- Če po uporabi pršila občutite kakršno koli resno neprijetno počutje, ga prenehajte uporabljati ali se posvetujte s svojim zdravnikom.
- V prvi uri uporabe pršila boste morda občutili rahlo zamašćenost nosu. Občutke je prehodni, tako da bo z nadaljnjo uporabo hitro i povsem izginili.
- Če je vaša nosna sluznica občutljiva, boste morda ob prvi uporabi pršila NASYA™ začutili manjše draženje, ki bo hitro prenehalo.
- Izogibajte se stiku z odprtimi ranami.

Opozorila

- Porabite v 90 dneh od objrta.
- Ne uporabljajte po preteku roka uporabnosti.

Številka serije (LOT) i rok uporabnosti sta označena na vesebniku i na ovojnjini. Zadnja revizija navodila: september 2009

Proizvajalec:
InQpharm Europe Ltd.
Waldseeweg 6
13467 Berlin
Nemčija

Uvoznik:
Adriatic BST d.o.o.
Verovškova 55
1000 Ljubljana
Slovenija
www.nasya.si

- Upotrebijavajte samo u nosnoj šupljini. Ubrižgajte jedan do dva puta u svaku nosnicu, dva do tri puta dnevno.
- Preporuča se za uporabu u odraslih i djece starije od 12 godina. Za djecu mlađu od 12 godina upotrebijavajte NASYA™ Kids.

140 doza (za približno 15-30 dana)

Pohranjivanje:

- Poslije uporabe uvijek odmah vratite prozorni poklopac na raspršivač. Bočicu pohranite na sobnoj temperaturi, na hladnom i suhom mjestu i nemojte je izravno izlagati sunčevoj svjetlosti. Niže temperature mogu utjecati na veličinu kapljica i sposobnost raspršivanja.
- Držite izvan dohvata djece!

Mjere opreza:

- Sastojci NASYA™ su neaktivni i netoksićni i često se upotrebijavaju u prehrambenim i farmaceutskim proizvodima.
- NASYA™ ne izaziva pospanost i primjerna je za odrasle i djecu stariju od 12 godina. Djeca mlađa od 12 godina trebala bi upotrebijavati NASYA™ Kids pod nadzorom odrasle osebe.
- Ako nakon uporabe NASYA™ osjetite ozbiljnu nelagodu, prestanite ga upotrebijavati ili se posavjetujte sa svojim lijećnikom.
- Za vrijeme prvog stata uporabe mogli biste osjetiti blagu začepljenost nosa. To je prolazan osjećaj koji će ubrzo i postupno nestati sa svakom sljedećom uporabom.
- Ako imate osjetljivu nosnu sluznicu, pri prvot uporabi pripravka NASYA™ mogli biste osjetiti blagu nadraženost koja će ubrzo nestati.
- Izbjegavajte dodir s otvorenim ranama.

Upozorenje:

- Nakon otvaranja uporabite u roku od 90 dana.
- Nemojte upotrebijavati nakon isteka roka valjanosti.

Broj serije (LOT) i rok valjanosti oznaćeni su na boćici i na kartonskom omotu. Zadnja revizija: rujan 2009.

Proizvođać:
InQpharm Europe Ltd.
Waldseeweg 6
13467 Berlin
Njemaćka

Nositelj upisa:
Cinres Farmacija d.o.o.
Srebrnjak 61
10000 Zagreb
Hrvatska
www.nasya.com.hr