

Contour® next»

Sistem za merjenje glukoze v krvi

CONTOUR®NEXT S FUNKCIJO PAMETNIH LUČK Naslednik merilnika CONTOUR®XT



VISOKA
VREDNOST



V CILJNEM
OBMOČJU



NIZKA
VREDNOST



Merilnik **CONTOUR®NEXT**
uporablja testne lističe **CONTOUR®NEXT**.
Testni lističi so tudi po odprtju uporabni
do konca roka uporabnosti.



 zaloker
zaloker


ASCENSIA
Diabetes Care

CONTOUR®NEXT

Merilnik, preprost za uporabo



Umijte roke s toplo vodo in milom ter jih osušite.



S sprožilno napravo Microlet®NEXT se zbodite v prst.



V odprtino na merilniku vstavite testni listič CONTOUR®NEXT.



Z vrhom testnega lističa se dotaknete kapljice krvi (0,6 μ L). Če je krvi premalo, imate 60 sek časa, da jo dodate.



Izmerjena vrednost se po 5 sekundah prikaže na zaslonu. Ob tem zasveti barvna lučka.



VISOKA
VREDNOST



V CILJNEM
OBMOČJU



NIZKA
VREDNOST



VIDEO NAVODILA ZA UPORABO:
YouTube: Zaloker Zaloker

Zaloker & Zaloker d.o.o.
Kajuhova ulica 9, Ljubljana
www.zaloker-zaloker.si
www.sladkorna.si, 080 18 80

Aplikacija CONTOUR®DIABETES



April 2020