



Številka izdelka 1000021286



## Hlačne predloge, ABENA Slip, M3, modra barvna oznaka, Premium

- ✓ Izjemno vpojno jedro s tehnologijo Top-Dry
- ✓ 360-stopinjske pregrade proti iztekanju
- ✓ Elastičnost v predelu izreza za noge za optimalno prileganje
- ✓ Indikator vpojnosti z gradacijsko lestvico
- ✓ Podpora za zdravo kožo



### Opis izdelka

ABENA Slip Premium so popolnoma zračne, anatomsko oblikovane hlačne predloge za težko stopnjo inkontinence. Izredno vpojno jedro s tehnologijo Top-Dry zagotavlja hitro vpijanje in suho površino, tudi po več uriniranjih. Kombinacija različnih pregrad (vidnih in nevidnih) in elastike (elastičnost v predelu izreza za noge) omogoča 360-stopinjsko zaščito pred iztekanjem. Vse te funkcije skupaj pomagajo zaščititi kožo in vzdrževati naravno ravnovesje pH-ja. Sistem za preprečevanje neprijetnega vonja zmanjša neprijetne vonjave. Zelo kakovostni prožni kombinirani trakovi z dvojno funkcijo zapiranja zagotavljajo najboljše prileganje in preprosto nameščanje. Indikator vpojnosti z gradacijsko lestvico usmerja uporabnika in negovalca k izdelku z ustrežno stopnjo vpojnosti in pomaga pri pravočasnem menjavanju pripomočka. Dermatološko testirani izdelki so prejeli znak za okolje Nordic Swan Ecolabel.



### Lastnosti

Osnovno ime	Hlačne predloge
Blagovna znamka	ABENA
Podznamka	Slip
Velikost	M3
Barva	Bela
Funkcije	Modra barvna oznaka
Material	BTBS, ECF fluff, elastan, elasticated combi tape, netkan, PE, PP, smola, SAP
Dolžina/globina	820 mm
Širina	670 mm
Obseg bokov	70-110 cm
Toleranca	+/- 10%
Vpojnost po Rothwellovi lestvici	3100 ml
Spol	Uniseks
Raven kakovosti	Premium
Certifikati	CE, MD, Znak za okolje – nordijski labod, UKCA
Razred CE	Class I
Standardi za proizvode ali preskuse	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Direktive, uredbe in zakoni	MDR (EU) 2017/745
Varnostna navodila in opozorila	Hranite izven dosega otrok.
Rok uporabnosti	5 let
Navodila za shranjevanje	Shranite na suhem mestu, pri sobni temperaturi, brez sončne svetlobe.

**Navodila za odstranjevanje izdelka** Odvrzite med gospodinjske odpadke.

**Navodila za odstranjevanje embalaže** Lahko se reciklira ali sežge.

### Navodila za uporabo/nanašanje

Hlačne predloge za težko stopnjo inkontinence, zasnovane za zahtevne uporabnike in za težko pomične in nepomične bolnike. Prepoznavanje velikosti izdelka po barvnih oznakah, imenih in sistemih številčenja. Za izbor prave velikosti je pomembno, da vedno izmerite obseg bokov in izberete pravo stopnjo vpojnosti, da se izognete iztekanju. Hlačno predlogo prepognite po dolžini, tako da je spodnja stran obrnjena navzven in se ustvari oblika čaše. Hlačno predlogo namestite od spredaj nazaj. Razprite sprednji del in ustvarite obliko čaše med nogami. Za čvrsto in udobno prileganje pričvrstite spodnja trakova na obeh straneh pod rahlim kotom navzgor in nato še zgornja trakova diagonalno navzdol. Te pripomočke lahko namestite v pokončnem položaju (sami ali pa vam nekdo pomaga) ali v ležečem položaju. Za podrobnejše informacije glejte navodila za nameščanje.

### Pakiranje

Enota	Sestavine	Dolžina	Širina	Višina	EAN koda
karton	92 kos	57.6 cm	40 cm	36.7 cm	5713571000151
zavitek	23 kos	37 cm	17.5 cm	24.5 cm	5713571000144
kos	1 kos				



Nordic Swan Ecolabel, znak »nordijski labod«, je uradna skandinavska okoljska oznaka. Izdelki z znakom za okolje »nordijski labod« izpolnjujejo stroge okoljske zahteve glede surovin, proizvodnje, uporabe, dokumentacije in varnosti.



Izdelki, označeni z MD, so razvrščeni kot medicinski pripomočki.



Oznaka CE zagotavlja, da je izdelek varen za uporabo in skladen z vsemi varnostnimi ukrepi. Oznaka CE pomeni Conformité Européenne (evropska skladnost) in jo najdemo predvsem na elektronski opremi, varnostni opremi, gradbenih izdelkih in medicinskih pripomočkih.



Oznaka UKCA zagotavlja, da je izdelek varen za uporabo in da upošteva vse varnostne ukrepe v skladu s standardi za izdelke in zakonodajo Združenega kraljestva.



Pregrade proti iztekanju pri izrezu noge in okrog vpojnega jedra pomagajo preprečiti iztekanje in zagotavljajo odlično prileganje.



Izdelek je popolnoma zračen, da je uporabniku udobno; tudi pri dolgotrajni uporabi. Pomaga ohraniti zdravje kože.



Izdelek ima prožne trakove, ki zagotavljajo najboljšo kombinacijo udobja, prileganja in zaščite pred iztekanjem. Dvojni modri trak zagotavlja dodatno možnost pričvrstitve.



Vaše jamstvo, da so bili izdelki testirani na sestavine, ki lahko povzročijo draženje kože. Teste izvaja neodvisni zunanji laboratorij.



Edinstvena struktura visoko vpojnega jedra je zasnovana za hitro porazdelitev in zajetje urina, zaradi česar je površina suha tudi po več uriniranjih.



Obvladovanje neprijetnega vonja je glavni dejavnik pri zagotavljanju diskretnosti za uporabnika. Izdelki za inkontinenco ABENA so zasnovani in izdelani tako, da iz njih uhaja minimalna količina neprijetnega vonja.



Edinstvena tehnologija Top-Dry, ki omogoča hitro vpijanje in zagotavlja suho površino tudi po več uriniranjih.



Indikator vpojnosti je trak, občutljiv na tekočino, ki spremeni barvo ali zbledi in s tem pokaže, kdaj je čas za menjavo izdelka.



Top-Dry in zaščita pred iztekanjem sta kombinacija 100-odstotne zračnosti, ki zagotavlja suho površino in zdravo kožo tudi po več uriniranjih ter ohranja naravno ravnovesje pH-ja.



Izdelek ne vsebuje lateksa.



Sistem kapelj označuje vpojnost. Več je kapelj, večja je vpojnost. Giblje se od 1 do 9 kapelj.

