

## GEL ZA OČI EYEGEL PLUS

Gel za oči z deksapantenolom 5 %.

Za dolgotrajno navlažitev suhih oči in zaščito očesne površine.

Tuba z 10 g mazila.

**Sestava:** deksapantenol 5 % (w/v), raztopina natrijevega hidroksida (20 %), karbomer, dinatrijev edetat, cetrimid, voda za injiciranje.

**Kaj je EYEGEL PLUS?** Sterilni gel za oči, ki vsebuje deksapantenol 5 %.

**Kako izgleda EYEGEL PLUS?** Je sterilni gel za oči v 10 g tubi.

### Kdaj se uporablja?

**EYEGEL PLUS** pomaga zaščititi očesno površino pri bolnikih s spremembami solznega filma.

Deksapantenol pomaga ohranjati vlažnost in zaščito očesne površine tako, da zagotavlja dolgotrajno olajšanje pri občutku suhega očesa, ki ga povzročajo draženje, pekoč občutek, občutek tujka zaradi zunanjih dejavnikov (veter, sonce, suh zrak, slana voda, dim, močna svetloba, klimatske naprave, ogrevanje), dolgotrajna uporaba računalnika, operacija oči, konjunktivitis ali uporaba kontaktnih leč.

Prijetnost karbomera, ki deluje kot zgoščevalec, pomaga posnemati običajno viskoznost solz.

### Kako in koliko ga je treba uporabljati?

S tube odstranite pokrovček, glavo nagnite nazaj in potegnite spodnjo veko očesa navzdol, tako da nastane žep. Stiskajte počasi, dokler na koncu tube ne nastane majhna kapljica, in jo enakomerno razporedite znotraj veke.

Pomežiknite dvakrat do trikrat, da se gel enakomerno razporedi po očesu, in obrišite morebitno odvečno količino gela okoli veke. Ne pozabite zapreti tube.

Nanesite ena kapljico gela v veko enkrat ali večkrat na dan, razen če sta vam zdravnik ali farmacevt svetovala drugačen režim uporabe.

### Previdnostni ukrepi in opozorila:

- Izdelek je namenjen zunanji očesni uporabi.
- Ne uporabljajte, če ste občutljivi na katerokoli sestavino gela.
- Ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti navedenega na vsebniku.
- Ne dotikajte se očesa ali veke z vrhom aplikatorja tube.
- Ne uporabljajte, če sta vsebnik ali zaščita pred posegom poškodovana.
- Zaprite tubo po uporabi.
- Med aplikacijo ne nosite kontaktnih leč: po aplikaciji naj bo vsaj 15-minutni interval preden si ponovno vstavite kontaktne leče.
- V redkih primerih je po nanosu možen kratkotrajno rahlo zamegljen vid zaradi viskoznosti gela. Zato je priporočljivo počakati, dokler zamegljen vid ne mine pred izvajanjem aktivnosti, kjer se zahteva jasen vid.
- V primeru sočasne uporabe z drugimi izdelki za oči naj bo vmes vsaj 15-minutni interval med obema aplikacijama, EyeGel plus pa naj bo apliciran nazadnje.
- Po odprtju tube, zavrzite neuporabljen gel po 8 tednih.
- V primeru draženja prekinite z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.
- Gel je namenjen 30-dnevni uporabi. Če simptomi ne izvenijo, se posvetujte z zdravnikom.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom.
- Ne pogoltnite.
- Shranjujte pri temperaturi pod 25°C.

**Proizvajalec:** FARMIGEA S.p.A., Via G.B. Oliva, 6/8 - 56121 Pisa, Italija

**Datum zadnje revizije teksta:** marec 2021



Po uporabi ustrezno zavrzite.

