

BAUSCH + LOMB

Hyal-drop® Rebalance™

Spoštovana uporabnica, spoštovani uporabnik,

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali Hyal-drop® Rebalance™. Večkomponentni izdelek Hyal-drop® Rebalance™ nudi dolgotrajno vlaženje, lajšanje in zaščito suhih oči zaradi kroničnega pomanjkanja vlage v očesu. Hyal-drop® Rebalance™ vsebuje pomembne sestavine, ki so naravno prisotne v solznem filmu in pomagajo dopolnjevati manjkajočo solzno tekočino ter ponovno vzpostaviti ravnovesje v solznem filmu. Tako lahko solzni film ponovno opravlja svoje naloge, kot je vlaženje površine očesa in skrbi za zaščito očesa. Hyal-drop® Rebalance™ skrbi za prekinitev niza simptomov suhih oči, kot so suhe, pekoče, utrujene, rdeče in/ali vnete, boleče oči. Hyal-drop® Rebalance™ vsebuje inovativno konzervirno sredstvo, ki se ob stiku z očesno površino pretvori in naravne sestavine solznega filma, in je na voljo v steklenički za kapljice za oči, enostavni za uporabo. Hyal-drop® Rebalance™ dopolnjuje naravno solzno tekočino in skrbi za boljše premikanje vek in vlaženje površine očesa, ter skrbi za zdravo in zaščiten površino očesa.

- Hyal-drop® Rebalance™ vsebuje pomembne sestavine, ki so naravno prisotne v solznem filmu ter zagotavljajo dolgotrajno vlaženje in lajšanje vaših simptomov. Sem spadajo na primer hialuronska kislina (zelo učinkovito vlažilno sredstvo, ki veže vodo na površini očesa), hranilne snovi in esencialni elektroliiti, kot so kalij, magnezij, natrij in kalcij.
- Vitamin B₁₂ (znan antioksidant) preprečuje oksidativni stres, kar očesni površini zagotavlja dodatno zaščito. Vitamin B₁₂ daje izdelku Hyal-drop® Rebalance™ značilno rožnato barvo, ki z mežikanjem hitro popolnoma izgine. Na oblačilih in kontaktnih lečah ne pušča madežev.
- Hyal-drop® Rebalance™ je sestavljen iz kombinacije dveh polimerov (natrijevega hialuronata in PEG 8000), ki zagotavljata dolgotrajnejši blažilni učinek.
- Hyal-drop® Rebalance™ je hipotoničen in pomirja oko tako, da pomaga vzpostaviti fiziološko osmotsko ravnovesje solznega filma in očesne površine.
- Hyal-drop® Rebalance™ vsebuje inovativno konzervirno sredstvo (imenovano Oxyd®), ki se ob stiku z očesno površino hitro pretvori in naravne sestavine solzne tekočine in sicer v kisik, vodo in sol.
- Hyal-drop® Rebalance™ je enostaven in varen za uporabo, uporabniki pa ga dobro prenašajo.

Prosimo, natančno preberite navodilo za uporabo, saj vsebuje pomembne informacije o načinu uporabe izdelka. Če imate kakršnokoli vprašanje, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom ali pa vzpostavite stik z nami.

Namen uporabe:

kapljice za vlaženje oči in kontaktnih leč

Sestava:

Hyal-drop® Rebalance™ vsebuje 0,15 % hialuronske kisline (natrijevega hialuronata), 0,5 % polietilen glikola 8000 (PEG 8000), kalijev klorid, kalcijev klorid, magnezijev klorid, natrijev klorid, vitamin B₁₂, sterilno vodo, borovo kislino in Oxyd®. Oxyd® se uporablja kot blag konzervans, ki se ob stiku z očesno površino hitro pretvori v kisik, vodo in sol.

Pakiranje:

Hyal-drop® Rebalance™ je na voljo v 10-ml stekleničkah za kapljice za oči.

Uporaba izdelka Hyal-drop® Rebalance™:

Hyal-drop® Rebalance™ je najbolj primeren za lajšanje in pomirjanje dolgotrajnih simptomov suhih oči, ki so posledica kroničnega pomanjkanja vlage v očesu. Kronično pomanjkanje vlage v očesu lahko povzroči vrsta dejavnikov, med drugim vnetje, nepravilno delovanje žleze solznice, okvara vek in vida in/ali slaba kakovost solz. Ko nastopi eden ali več omenjenih dejavnikov, se poruši ravnovesje solznega filma in posledično se pojavi vrsta neprijetnih znakov in simptomov, kot so: vnetje očesne površine, rdeče oči, pekoč občutek, suhe oči, občutljivost na svetlobo ter utrujene, razdražene in boleče oči. Če teh simptomov ne zdravimo, lahko pride do nadaljnjih vnetij in poškodb roženice. Pomemben dejavnik pri nastanku težav s suhimi očmi in poškodb roženice so lahko tudi nekatera zdravila (npr. kontracepcijske tablete, antihistaminiki, antagonisti adrenergičnih receptorjev beta, spazmolitiki, diuretiki), nekatere bolezni in konzervansi v določenih kapljicah za oči (npr. benzalkonijev klorid, tiomersal). Zaradi kompleksne narave pomanjkanja vlage v očesu so možnosti zdravljenja omejene, prav zato je Hyal-drop® Rebalance™ zasnovan iz več sestavin, ki zagotavljajo dolgotrajen blažilni učinek pri težavah s suhimi očmi, saj naravni solzni film oskrbujejo s sestavinami, ki so ključne za njegovo pravilno delovanje. Prav tako Hyal-drop® Rebalance™ preprečuje pojav nadaljnjih simptomov suhega očesa, vlaži oko in ščiti njegovo površino.



Varna in pravilna uporaba izdelka Hyal-drop® Rebalance™:

Zdravljenje težav s suhimi očmi zahteva individualni režim odmerjanja glede na resnost in intenzivnost vaših simptomov. V vsako oko kanite po eno kapljico izdelka Hyal-drop® Rebalance™ 3- do 5-krat dnevno, oziroma še pogosteje, če je potrebno.

Hyal-drop® Rebalance™ je primeren za uporabo z vsemi vrstami kontaktnih leč in se lahko kane neposredno na vstavljene kontaktne leče.

Slike prikazujejo preprosto in enostavno uporabo izdelka Hyal-drop® Rebalance™.

1. Pred vsako uporabo s stekleničke odstranite zaščitni pokrovček. Izogibajte se stiku konice s prsti.
2. Glavo nagnite rahlo nazaj, spodnjo veko s prstom proste roke nežno povlecite navzdol, z drugo roko pa stekleničko dvignite navpično nad oko, s kapalko obrnjeno navzdol. Nato iz stekleničke previdno kanite eno kapljico. Izogibajte se stiku konice stekleničke z očmi ali s prsti, da se izognete morebitni kontaminaciji raztopine.
3. Po vsaki uporabi namestite pokrovček nazaj na stekleničko.

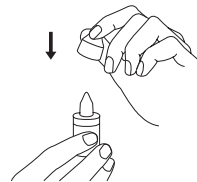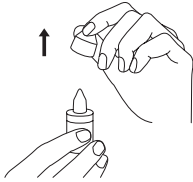

Previdnostni ukrepi

Ne uporabljajte tega izdelka, v kolikor ste preobčutljivi na katerokoli sestavino izdelka.

Izdelek lahko v redkih primerih povzroči preobčutljivostne reakcije, kot so lokalne alergijske reakcije. V takšnih primerih prenehajte z uporabo izdelka.

Ne uporabljajte izdelka, če je steklenička poškodovana.

Izdelka Hyal-drop® Rebalance™ ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti. Zapišite si datum odprtja stekleničke na temu namenjen prostor na zunanji strani škatlice.

Če hkrati uporabljate različne pripravke za oči, pred uporabo drugega izdelka počakajte približno 15 minut.

Shranjevanje

Medicinski pripomoček shranjujte pri temperaturi od +1 °C do +25 °C, zaščiten pred svetlobo.

Medicinski pripomoček zavržite 2 meseca po odprtju.

Simboli



Medicinski pripomoček zavržite 2 meseca po odprtju.



Shranjujte zaščiteno pred sončno svetlobo.



Sterilizirano z aseptično metodo



Preberite navodila za uporabo.



Medicinski pripomoček shranjujte pri temperaturi od +1 °C do +25 °C.



Rok uporabnosti



Ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana.



Številka serije



Izdelovalec



Izdelovalec: TUBILUX Pharma SpA
Via Costarica, 20/22
00040 Pomezia (Rim), Italija

Distributer:

PharmaSwiss d.o.o.,
Brodšče 32,
1236 Trzin, Slovenija



®/™ je registrirana blagovna znamka družbe Bausch & Lomb Incorporated ali njenih podružnic.

© Bausch & Lomb Incorporated

Hyal-drop® Rebalance™, junij 2010

HDR01B100SI01