

APPROVED

By Sandra Hadzic at 2:58 pm, Feb 05, 2016

BAUSCH + LOMB Biotrue® MDO®

Spoštovani uporabnik, zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali **Biotrue® MDO®**! Je idealen izdelek za takojšnjo pomiritev in navlažitev suhih oči, ki so posledica dejavnikov okolja. Naravno osveži in pomiri suhe oči. Olajša simptome utrujenih in razdraženih oči ter celo povečanega solzenja. S pomočjo inovativnega sistema, ki kljub odsotnosti konzervansov omogoča večkratno uporabo, **Biotrue® MDO®** zagotavlja vse prednosti raztopine brez konzervansov v večodmernem vsebniku. Je naravni vir takojšnje svežine in vlage, ki jo oči v zanje neprijaznem okolju še kako potrebujejo pri vsakdanjem utrudljivem delu.

- **Biotrue® MDO®** so kapljice za oko v obliki kristalno bistré raztopine.
- **Biotrue® MDO®** ne vsebuje konzervansov.
- **Biotrue® MDO®** lahko uporabljate 6 mesecev po prvem odprtju vsebnika.
- **Biotrue® MDO®** vsebuje naravni polimer hialuronsko kislino (v obliki natrijevega hialuronata), ki je prisotna v strukturah zdravega očesa in naravnega solznega filma.
- **Biotrue® MDO®** je primeren za navlažitev mehkih ter trdih kontaktnih leč pred vstavljanjem in za njihovo vlaženje med nošenjem. Opazno izboljša udobje nošenja kontaktnih leč čez cel dan.
- **Biotrue® MDO®** je enostaven za uporabo, uporabniki ga dobro prenašajo, njegova uporaba pa je varna.

Navodila za uporabo natančno preberite, saj vsebujejo pomembne podatke o uporabi tega izdelka. Če imate kakršnokoli vprašanje, se posvetujte s farmacevtom, z zdravnikom ali pa se obrnite na nas. Podjetje Bausch + Lomb želi vam in vašim očem le najboljše!

Sestava:

Raztopina vsebuje 0,24 % hialuronsko kislino (v obliki natrijevega hialuronata) in naslednje pomožne snovi: sterilno vodo, natrijev klorid, kalijev klorid, natrijev hidrogenfosfat dodekahidrat in natrijev dihidrogenfosfat dihidrat. Ne vsebuje konzervansov.

Pakiranje:

Biotrue® MDO® kapljice za oko so na voljo v pakiranjih po 10 ml, 2 x 10 ml in 2 x 15 ml.

Namen uporabe Biotrue® MDO®:

Vlaženje očesa in navlažitev mehkih ter trdih kontaktnih leč pred vstavljanjem in njihovo vlaženje med nošenjem.

Biotrue® MDO® je odlična izbira za osvežitev in vlaženje suhih oči, ki so posledica zunanjih dejavnikov okolja. Ti dejavniki so pogosto odvisni od načina življenja in razmer v okolju, na primer

intenzivna uporaba računalnika, neprimerne klimatske razmere v zaprtih prostorih, neredno ali pomanjkljivo mežikanje, cigaretni dim, pa tudi vetrovne razmere na prostem.

Pomembno vlogo pri nastanku težav s suhimi očmi imajo lahko tudi nekatera zdravila (kot so kontracepcijske tablete, antihistaminiki, zaviralci adrenergičnih receptorjev beta, spazmolitiki in diuretiki), nekatere bolezni in konzervansi v nekaterih kapljicah za oko.

Biotrue® MDO® z vlaženjem odpravlja ključne simptome suhih oči, kot so občutek suhosti, draženja ali utrujenih oči, občutek tujka v očesu ali prekomerno solzenje.

Ta izdelek lahko s svojimi lastnostmi koristi tudi osebam, ki imajo kronične težave s suhimi očmi.

Kako pogosto uporabljati Biotrue® MDO®?

Ko začitite potrebo, v oko nanesite eno kapljico **Biotrue® MDO®**. **Biotrue® MDO®** ne vsebuje konzervansov, zato ga lahko uporabljate vsakodnevno in tako pogosto, kot želite.

Pomembne informacije o uporabi Biotrue® MDO®

Ta izdelek lahko v zelo redkih primerih povzroči preobčutljivostne reakcije, kot so lokalne alergijske reakcije. V takšnih primerih morate izdelek nemudoma prenehati uporabljati.

Če ste preobčutljivi na katerokoli od sestavin, izdelka ne smete uporabljati.

Varnostne informacije za osebe s hudo poškodbo roženice: Pri uporabi izdelkov za uporabo v očesu, ki so vsebovali fosfate, so poročali o zelo redkih primerih nabiranja depozitov kalcijevega fosfata na roženici.

Biotrue® MDO® ne vsebuje konzervansov, da bi ga uporabniki čim boljše prenašali. Zaradi posebnega črpalnega mehanizma lahko **Biotrue® MDO®** uporabljate 24 tednov (6 mesecev) po odprtju vsebnika. **Biotrue® MDO®** ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti.


Če je vsebnik kakorkoli poškodovan, izdelka ne uporabljajte.

Pred prvo uporabo ali če kapljic nekaj časa niste uporabljali, morate raztopino najprej načrpati. Pri črpanju raztopine vsebnik držite tako, da bo s konico kapalnega mehanizma usmerjen navzdol.


V nadaljevanju je prikazana pravilna uporaba Biotrue® MDO®:

Patentirani črpalni mehanizem **Biotrue® MDO®** omogoča, da raztopina kapljic ne vsebuje konzervansov, vendar pa se vsebnik zato lahko razlikuje od vsebnikov s kapljicami, ki ste jih morda v preteklosti uporabljali.


Slike prikazujejo preprosto in enostavno uporabo **Biotrue® MDO®**.

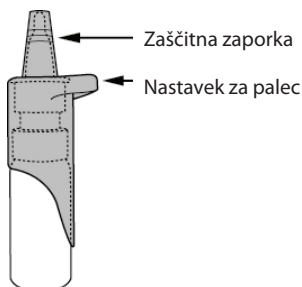


1. Pred vsako uporabo s konice vsebnika odstranite zaščitno zaporko. Pazite, da se konice vsebnika ne dotaknete s prsti.

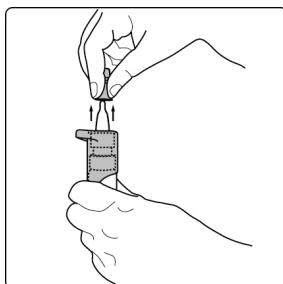


2. Palec namestite na ergonomsko oblikovan nastavek za palec, druga prsta pa na spodnji del vsebnika.

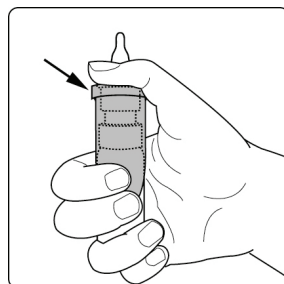

3. Vsebnik obrnite in ga držite kot je prikazano. Pred prvo uporabo morate črpalko najprej napolniti. To storite tako, da približno 7-krat pritisnete na nastavek za palec, dokler se ne pojavi prva kapljica.

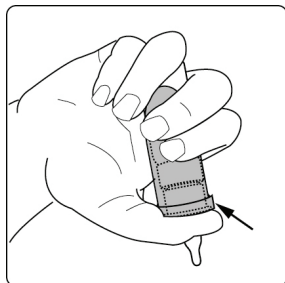

4. Glavo nagnite rahlo nazaj, vsebnik pa namestite nad oko tako, kot vam to najbolj ustreza. S prstom proste roke spodnjo veko nežno potegnite navzdol, vsebnik držite navpično in nežno pritisnite na nastavek za palec, da nanesete eno kapljico v oko. Oko nato zaprite in zrklo počasi obračajte, da se kapljica optimalno porazdeli po površini očesa.

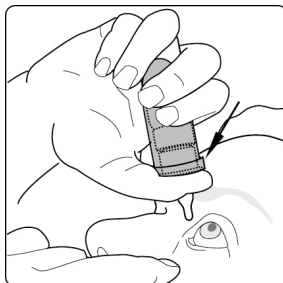

Po potrebi lahko za dodatno podporo in večjo natančnost uporabite tudi drugo roko.

5. Pazite, da konica vsebnika ne pride v stik z očmi ali prsti, da ne bi prišlo do kakršnekoli kontaminacije raztopine.


6. Takoj po uporabi na konico vsebnika namestite zaščitno zaporko.



Medicinski pripomoček zavržite šest mesecev po prvem odprtju vsebnika.

STERILE A

Metoda sterilizacije, aseptično

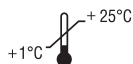

Medicinski pripomoček shranjujte pri temperaturi od +1 °C do +25 °C.



Če je vsebnik kakorkoli poškodovan, izdelka ne uporabljajte.



Pred uporabo preberite priloženo navodilo!



Datum izteka roka uporabnosti



Številka serije

CE 0483

Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Nemčija
www.bausch-lomb.de

Distributer:

PharmaSwiss d.o.o., Brodišče 32, 1236 Trzin, Slovenija
Podpora strankam: 01/236-47-00

Biotrue® MDO®, 03-2014

®/™ so blagovne znamke podjetja Bausch & Lomb Incorporated ali njegovih podružnic

© Bausch & Lomb Incorporated

SKU številka: 09313

BTM01B100SI01