



A SWISS BRAND

AVTOMATSKI MERILNIK KRVNEGA TLAKA

MODEL M-200A
UPORABNIŠKI PRIROČNIK



dr-frei.com

SPOŠTOVANI UPORABNIK AVTOMATSKEGA MERILNIKA KRVNEGA TLAKA DR. FREI

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali avtomatski merilnik krvnega tlaka **Dr. Frei®** TM model M-200A. Prepričani smo, da boste zadovoljni z visoko kakovostjo in zanesljivostjo te naprave in boste tako postali redni uporabnik izdelkov švicarske blagovne znamke **Dr. Frei®**.

Pred začetkom uporabe te naprave skrbno preberite uporabniški priročnik. V njem so navedene vse informacije, ki jih potrebujete za pravilno merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa. Vsa vprašanja glede uporabe naprave lahko naslovite na lokalnega distributerja ali servisno službo družbe **Dr. Frei®** v vaši državi.

OPOZORILO

Merilnik krvnega tlaka je zasnovan za samokontrolo krvnega tlaka, vendar NE za samodiagnosticiranje hipertenzije ali hipotenzije. Prosimo, da si sami NE postavljate diagnoze na podlagi rezultatov meritev, izvedenih z merilnikom krvnega tlaka. Prosimo, da sami NE zdravite visokega/nizkega krvnega tlaka in NE spreminjate predpisanih metod zdravljenja, ne da bi se predhodno posvetovali z osebnim zdravnikom.



Uporabljeni del tipa BF.




Pred začetkom uporabe naprave skrbno preberite navodila za uporabo.

POMEMBNI PODATKI O KRVNEM TLAKU IN MERJENJU KRVNEGA TLAKA.....	6
Kaj je krvni tlak?	6
Kakšne so normalne vrednosti?	7
PREDNOSTI AVTOMATSKEGA MERILNIKA KRVNEGA TLAKA MODEL M-200A	8
Indikator stopnje krvnega tlaka.....	8
Detektor nerednega srčnega utripa	8
PRIPRAVA NA MERJENJE	9
Varnostni ukrepi	9
Deli kompleta merilnika krvnega tlaka	9
Opis merilnika krvnega tlaka	10
Vstavljanje baterij.....	10
Nastavljanje časa in datuma	11
Izbira uporabnika	11
Uporaba adapterja za izmenični tok.....	11
Priključitev manšete	12
MERJENJE	12
Nameščanje manšete	13
Merjenje	13
Branje rezultatov meritev.....	14
Prekinitev merjenja	14
FUNKCIJA SPOMINA	14
Ogled shranjenih vrednosti.....	14
Izbris shranjenih rezultatov	15
SPOROČILA O NAPAKAH/ODPRAVLJANJE TEŽAV	15
NEGA IN VZDRŽEVANJE	17
POMEN SIMBOLOV	18
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	18
GARANCIJA.....	19

POMEMBNI PODATKI O KRVNEM TLAKU IN MERJENJU KRVNEGA TLAKA

Kaj je krvni tlak?


Krvni tlak je tlak, s katerim kri pritiska na stene žil. Krvni tlak je potreben za ohranjanje stalnega krvnega pretoka v telesu. Tako zagotavlja celicam kisik, ki ga potrebujejo za normalno delovanje. Srce deluje kot črpalka, ki pošilja kri v žile. Vsak srčni utrip pa ustvari določeno raven krvnega tlaka.

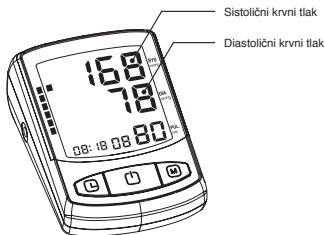

Obstajata dve vrsti krvnega tlaka: sistolični tlak (zgornja vrednost), ki ga izmerimo takrat, ko srce potisne kri v žile; in diastolični tlak (spodnja vrednost), ki ga izmerimo, ko srčna mišica počiva.

Krvni tlak podnevi niha, tudi pri zdravih ljudeh. Na ta nihanja vplivajo različni dejavniki: čas dneva, stanje posameznika, fizična ali duševna aktivnost, okolje itd.

Nihanja krvnega tlaka podnevi in ponoči

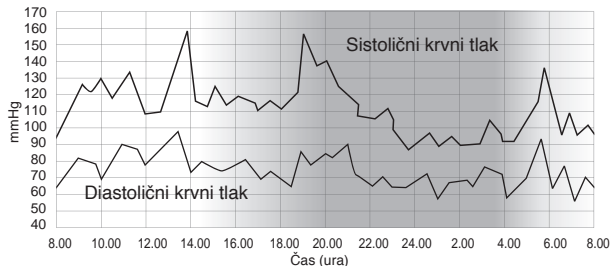

Če se krvni tlak poviša, to obremeni srce, vpliva na žile, katerih stene se tako debelijo in postanejo manj elastične.

Ena od značilnosti hipertenzije oziroma povišanega krvnega tlaka je, da ga bolnik v zgodnji fazi dlje časa niti ne opazi. Zato je izjemno pomembna samokontrola krvnega tlaka. Ko bolezen napreduje, se pri bolniku pojavljajo glavoboli, vrtoglavica, slabšanje vida in delovanja vitalnih organov (možgani, srce, ledvice, ožilje). Brez primerne zdravljenja se zaradi hipertenzije lahko pojavijo komplikacije, npr. okvara ledvic, angina pectoris, možganska kap, afazija, demenca, srčni infarkt in srčna kap.

Kakšne so normalne vrednosti?

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je oblikovala klasifikacijo*, ki velja kot svetovni standard za vrednosti krvnega tlaka:

Kategorija	Sistolični krvni tlak (mmHg)	Diastolični krvni tlak (mmHg)
Prenizek krvni tlak	< 100	< 60
Optimalni krvni tlak	100–119	60–79
Normalni krvni tlak	120–129	80–84
Rahlo zvišan krvni tlak	130–139	85–89
Previsok krvni tlak	140–159	90–99
Močno zvišan krvni tlak	160–179	100–109
Nevarno visok krvni tlak	≥ 180	≥ 110

* natisnjeno v skrajšani obliki

- V primeru diagnosticirane hipertenzije mora bolnik upoštevati predpisano zdravljenje in spremeniti življenjski slog.
- Ljudje z normalnim krvnim tlakom in rahlo zvišanim krvnim tlakom morajo izvajati meritve, da lahko pravočasno ukrepajo in znižajo krvni tlak do optimalne vrednosti brez uporabe zdravil.
- Pri ljudeh, starejših od 50 let, je visoka raven sistoličnega krvnega tlaka (višji od 140 mmHg) bolj pomembna od diastoličnega tlaka.
- Navkljub normalnemu krvnemu tlaku se s starostjo večajo možnosti za razvoj hipertenzije.

OPOZORILO

Če je vaš krvni tlak, izmerjen v mirovanju, normalen, vendar se rezultati merjenja zvišajo, če se meritev izvede po fizičnem ali duševnem naporu, je to lahko znak t. i. nestabilne hipertenzije. V tem primeru se posvetujte z osebnim zdravnikom.

Če ob pravilnem merjenju diastolični krvni tlak znaša več kot 120 mmHG, morate nemudoma poiskati zdravniško pomoč.


PREDNOSTI AVTOMATSKEGA MERILNIKA KRVNEGA TLAKA MODEL M-200A


Indikator stopnje krvnega tlaka

Indikator stopnje krvnega tlaka je na levi strani zaslona. Njegov razpon ima 6 ravni, ki so opisane v tabeli v poglavju »Kakšne so normalne vrednosti?«. Po meritvi se na tem območju (na levi strani zaslona) prikaže označevalna črta, ki prikazuje, ali je vaš krvni tlak: optimalen (zeleno območje), zvišan (rumeno območje), močno zvišan (oranžno območje), nevarno zvišan (rdeče območje).

Ta funkcija vam omogoča, da sami lahko interpretirate rezultate merjenja.

Detektor nerednega srčnega utripa

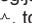

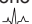Ta tehnologija označuje neredni srčni utrip. Če se na zaslonu pojavi simbol , to pomeni, da se je med merjenjem pojavila nenormalnost v frekvenci srčnih utripov.

V tem primeru lahko rezultat merjenja odstopa od vašega normalnega krvnega tlaka – ponovite meritev. V večini primerov to ni razlog za skrb. Če pa se simbol  pojavlja redno (npr. večkrat tedensko ob dnevnih meritvah), vam priporočamo, da se posvetujete z osebnim zdravnikom.

Zdravniku pokažite naslednjo razlago:

Informacije za zdravnika o pogostem zaznavanju nerednega srčnega utripa.

Ta naprava je oscilometrični merilnik krvnega tlaka, ki med merjenjem analizira frekvenco srčnega utripa.

Simbol,  se prikaže po meritvi, če se med merjenjem pojavijo motnje srčnega utripa. Če se simbol  pojavlja pogosto (npr. večkrat tedensko ob dnevnih meritvah), vam priporočamo, da se posvetujete z osebnim zdravnikom. Ta naprava ne nadomešča kardiološkega pregleda, ampak je namenjena zaznavanju motenj srčnega utripa v zgodnji fazi.

PRIPRAVA NA MERJENJE

Varnostni ukrepi

1. To napravo lahko uporabljate LE za namene, opisane v tem priročniku.
2. NE uporabljajte dodatne opreme, ki je ni določil proizvajalec.
3. Naprave NE uporabljajte, če ne deluje pravilno ali je poškodovana.
4. NE uporabljajte opreme z aerosolnimi pršili ali odmerjanjem kisika.
5. Pod nobenim pogojem pripomočka NE uporabljajte pri novorojenčkih.
6. Ta pripomoček NE deluje kot zdravilo za simptome ali bolezni. Izmerjeni podatki so le informativne narave. O rezultatih meritev se vedno posvetujte z osebnim zdravnikom.
7. Opremo in kabel hranite proč od vročih površin.
8. Manšete NE uporabljajte na drugih mestih, ki niso določena v tem priročniku.
9. Ustrezno vzdrževanje in občasno umerjanje sta pomembna za dolgo življenjsko dobo vaše naprave. Če ste zaskrbljeni glede natančnosti meritev, se obrnite na lokalno službo za stranke.
10. Ta sistem je namenjen za uporabo pri ljudeh, starejših od 18 let.
11. Sistema ne uporabljajte za diagnosticiranje hipertenzije ali preskušanje pri novorojenčkih, dojenčkih, majhnih otrocih ali ljudeh, ki ne morejo soglašati z merjenjem.
12. Če imate potrjeno aritmijo ali neredni srčni utrip, ventrikularno ali atrijsko fibrilacijo, meritve, izmerjene s tem merilnikom, lahko razlagate in ocenjujete le skupaj z osebnim zdravnikom ali drugim zdravstvenim strokovnjakom.


TA PRIROČNIK SHRANITE, DA VAM JE NA VOLJO VES ČAS DELOVANJA NAPRAVE.

Deli kompleta merilnika krvnega tlaka

Komplet merilnika krvnega tlaka vključuje avtomatski merilnik krvnega tlaka model M-200A, manšeto z obsegom 22–42 cm, 4 baterije (AA), uporabniški priročnik, adapter, garancijsko kartico in torbico.

Opis merilnika krvnega tlaka

Merilna enota model Model M-200A

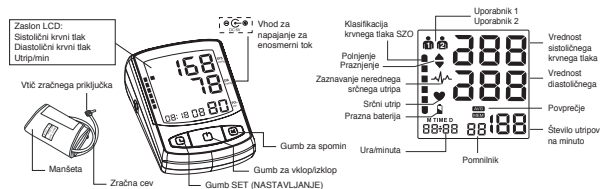


Dodatna oprema:





* Naprava bo optimalno delovala le, če boste uporabljali originalni adapter.

Vstavljanje baterij

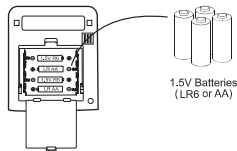1. Odstranite pokrov predala za baterije.
2. Nove baterije vstavite v predal, kot je prikazano na sliki, in upoštevajte ustrezno polarnost (+) in (-). Zaprite pokrov predala za baterije. Uporabljajte le baterije LR6, AA.






POZOR



- Baterije vstavite v predal za baterije, kot je prikazano na sliki.
- Ko na zaslonu začne utripati simbol , zamenjajte vse stare baterije z novimi. Ne kombinirajte starih in novih baterij. To lahko skrajša življenjsko dobo baterij ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Simbol  se ne prikaže, ko so baterije prazne.
- Življenjska doba baterij je odvisna od temperature prostora in se lahko skrajša pri nizkih temperaturah.
- Baterije odstranite, če naprave dlje časa ne boste uporabljali.
- Kislina iz baterij lahko izteče in povzroči okvaro naprave.
- Uporabljajte le tip baterij, ki je določen v tem priročniku. Baterije, priložene napravi, so namenjene le za preskušanje delovanja merilnika, zato je njihova življenjska doba lahko krajša.

OPOMBA: za podaljševanje življenjske dobe baterij se naprava samodejno izklopi, če 1 minuto ne pritisnete nobenega gumba. Napravo lahko izklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop.

Nastavljanje časa in datuma

Ta merilnik krvnega tlaka ima tudi funkcijo prikaza časa in datuma. Čas in datum se zabeležita skupaj z vrednostjo tlaka in utripa.

1. Za vklop merilnika pritisnite gumb »«.
2. Pritisnite in držite gumb »«, dokler se na zaslonu LCD ne prikaže in začne utripati številka za leto.
3. Pritisnite »M«, da nastavite leto. Potrdite izbiro s pritiskom na gumb »«.
4. Za nastavljanje meseca, datuma, ure in minut sledite istim korakom.

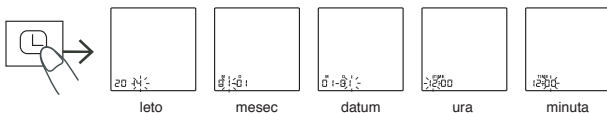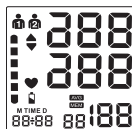

Izberite uporabnika

Ta merilnik krvnega tlaka lahko shrani 30 meritev za vsakega od dveh uporabnikov. Pred merjenjem se prepričajte, da ste izbrali ustreznega uporabnika.

1. Ko je enota izključena, pritisnite gumb »SET« (NASTAVI), da začne utripati simbol uporabnika v zgornjem levem kotu zaslona LCD.
2. Znova pritisnite gumb »SET« (NASTAVI), da spremenite uporabnika.
3. Za izbiro pritisnite gumb »ON/OFF«.



Uporaba adapterja

Avtomatski merilnik krvnega tlaka model M-200A je mogoče uporabljati z adapterjem za izmenični/enosmerni tok.

1. Vtič vstavite v vtičnico na spodnjem delu naprave. Ko je adapter za izmenični/enosmerni tok priključen na napravo, ta ne porablja baterij.




2. Adapter za izmenični/enosmerni tok vtaknite v vtičnico 220/110 V. Naprava je pripravljena za merjenje.
3. S pritiskom na gumb za vklop/izklop preverite, če je napajanje omogočeno.

OPOMBA:

- Uporabljajte adapter za izmenični/enosmerni tok blagovne znamke **Dr. Frei®**. Če boste uporabljali drug adapter, servisna služba ne bo odgovarjala za garancijska popravila merilnika.
- Ko je adapter za izmenični/enosmerni tok priključen na napravo, ta ne porablja baterij.
- Če imate vprašanje glede adapterja za izmenični/enosmerni tok, se posvetujte s servisno službo.

Priključitev manšete

Priključek manšete vstavite v odprtino ob strani naprave, kot je prikazano na sliki.

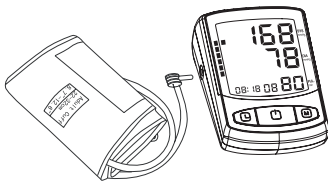


MERJENJE

OPOZORILO

- Pred merjenjem se usedite in se sprostite.
- Če želite podpirati roko med merjenjem, to lahko zviša vrednost krvnega tlaka. Prepričajte se, da ste udobno in sproščeno nameščeni, ter med merjenjem ne upogibajte roke.
- Krvni tlak vedno merite na isti roki (običajno na levi).
- Odstranite tesna oblačila z zgornjega dela roke. Ne zavijajte rokava, saj lahko stisne roko in tako povzroči napačne rezultate.
- Uporabljajte le klinično potrjeno originalno manšeto.
- Če želite redno spremljati rezultate meritev krvnega tlaka, meritve izvajajte ob istem času dneva, saj se krvni tlak med dnevom spreminja.
- Meritev začnite po 5 minutah počitka, da zagotovite natančnost.

Nameščanje manšete


1. Priključek manšete vtaknite v vtičnico za manšeto na levi strani naprave.
2. Levo (desno) roko iztegnite pred sabo z dlanjo obrnjeno navzgor. Manšeto nataknite in namestite na roko tako, da je zračna cev in oznaka za arterijo usmerjena proti spodnjemu delu roke. Manšeto ovijte in zategnite nad komolcem. Oznaka za arterijo na robu manšete mora biti približno 2 do 3 cm nad komolcem. Cev poravnajte z glavno arterijo na notranji strani komolca.
3. Med roko in manšeto pustite nekaj prostora: približno za dva prsta. Odstranite vsa oblačila, ki pokrivajo in omejujejo roko, na kateri boste izvedli meritev.
4. Tesno stisnite manšeto. Zgornji in spodnji rob manšete mora biti enakomerno zategnjen okoli nadlahti.

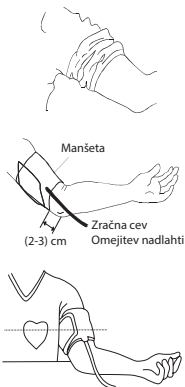


Merjenje

Vedno najprej namestite manšeto in šele nato vklopite merilnik.


1. Pritisnite gumb za vklop/izklop. Na zaslonu se za dve sekundi prikažejo vsi simboli, nato pa preide v način merjenja, prikaže se vrednost »0« ali zadnja zabeležena meritev.

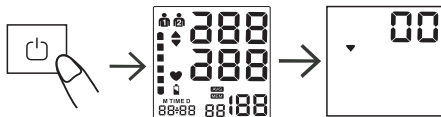

2. Črpalka začne polniti manšeto. Na zaslonu se prikaže simbol srca »♥«. Ko je meritev zaključena, se prikaže rezultat.

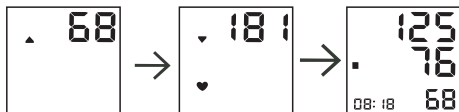



Branje rezultatov meritev

Ko je meritev zaključena, se na zaslonu prikaže izmerjeni krvni tlak, srčni utrip in oznaka barvnega območja glede na klasifikacijo SZO (Svetovna zdravstvena organizacija). Simbol  označuje, da je naprava zaznala neredni srčni utrip. To je le opozorilo.

OPOMBA: priporočamo vam, da se v primeru rednega pojavljanja tega simbola obrnete na osebnega zdravnika.

Pomembno je, da ste med merjenjem sproščeni, umirjeni in ne govorite.

Na grafičnem indikatorju je prikazana raven arterijskega tlaka glede na lestvico Svetovne zdravstvene organizacije.

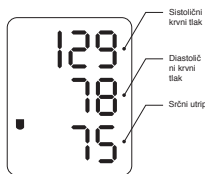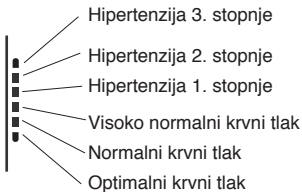

Prekinitev meritve

Če morate iz kakršnega koli razloga prekiniti meritev krvnega tlaka (npr. če se ne počutite dobro), lahko kadar koli pritisnete gumb za vklop/izklop. Naprava nemudoma samodejno zniža tlak v manšeti.




FUNKCIJA SPOMINA

Na koncu meritve merilnik samodejno shrani vsak rezultat, opremljen z datumom in časom. Ta enota lahko shrani 30 rezultatov za vsakega od obeh uporabnikov.

Ogled shranjenih vrednosti

Ko je enota izklopljena, pritisnite gumb »M«. Na zaslonu se najprej prikaže **AVG**, potem pa še povprečna vrednost zadnjih treh meritev v 10 minutah. Opozorilo: če v zadnjih 10 minutah delovanja ni shranjena nobena vrednost, se prikaže

»0« če je shranjena le zadnja vrednost, se prikaže ta vrednost, če pa sta shranjeni 2 vrednosti, pa se prikaže povprečna vrednost 2 shranjenih vrednosti. Merilnik shrani povprečne vrednosti meritev in posamične vrednosti za vsakega uporabnika. repričajte se, da si ogledujete rezultate meritev za pravega uporabnika.

S ponovnim pritiskom na gumb MEMORY (SPOMIN) se prikaže predhodni rezultat. Za ogled shranjenega rezultata pritisnite gumb MEMORY (SPOMIN), da se pomaknete na posamezno shranjeno vrednost. Če merilnik zazna neredni srčni utrip, se prikaže simbol  s časom in rezultatom meritve


Nadaljnje informacije

Ne izvajajte zaporednih meritev, saj rezultati morda ne bodo pravilni. Mirno počakajte nekaj minut, sedite ali ležite, nato šele ponovite meritev.

Izbris shranjenih rezultatov


Preden izbrisate vse shranjene rezultate, se prepričajte, da jih ne boste več potrebovali. Zabeleženi rezultati so pomembni in nudijo dodatne informacije za zdravnika.

Če želite izbrisati vse rezultate, pritisnite in sekundo držite gumb »M«. Ko se na zaslonu prikaže »no«, to pomeni, da ste izbrisali vse rezultate.

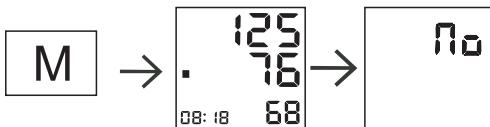

SPOROČILA O NAPAKAH/DPRAVLJANJE TEŽAV

Če imate težave z napravo, najprej preglejte naslednji seznam.

NAPAKA	MOŽEN VZROK	POPRAVILO
Ko pritisnete gumb za vklop/izklop, na zaslonu ni ničesar ali pa utripa simbol za baterijo  .	Ni baterij.	Vstavite baterije.
	Baterije so prazne.	Zamenjajte z novimi Baterijami.
	Napačno vstavljene baterije (polarnost).	Vstavite baterijo z ustrezno polarnostjo.







E1: Tlak v manšeti ne narašča.	Preverite, če iz manšete uhaja zrak.	Zamenjajte manšeto.
E3: Tlak polnjenja je previsok.		Ponovite meritev ali naj trgovec ponovno umeri merilnik.
E2 E4: Med merjenjem se trese roka.	Med merjenjem se trese roka ali telo.	Mirujte in ponovite meritev.
Prikazan je simbol za baterijo.	Skoraj prazne baterije.	Zamenjajte baterije in ponovite meritev.
Sistolični tlak ali diastolični tlak je previsok.	Manšeta je bila nameščena nižje od srca.	Ustrezno namestite manšeto in ponovite meritev.
	Manšeta ni ustrezno nameščena.	
	Med merjenjem ste premaknili telo ali govorili.	
Sistolični tlak ali diastolični tlak je prenizek.	Manšeta je bila nameščena nižje od srca.	
	Med merjenjem ste premaknili telo ali govorili.	

OPOZORILO

V primeru tehničnih okvar merilnika krvnega tlaka se obrnite na pooblaščen servisno službo družbe **Dr. Frei®**. **Nikoli ne skušajte sami izvajati popravil!** V primeru nepooblaščenega spreminjanja naprave garancija ne velja.









OPOMBA: krvni tlak niha tudi pri zdravih ljudeh. Če želite pridobivati primerljive meritve krvnega tlaka, krvni tlak merite ob istem času in v istih pogojih, običajno v mirnem okolju. Če upoštevate ustrezne opisane postopke, vendar vaš krvni tlak še vedno niha za več kot 15 mmHg in/ali se pogostokrat pojavlja neredni srčni utrip, se posvetujte z osebnim zdravnikom.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

<p>Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vlagi, prahu ali neposredni sončni svetlobi.</p>	
<p>Z manšeto ravnajte previdno in preprečite njeno zvijanje ali mečkanje, da ne poškodujete občutljivega neprepustnega mehurja.</p>	
<p>Napravo obrišite z mehko, suho krpo. Ne uporabljajte plina, razredčil in topil. Nečistoče na manšeti lahko previdno očistite z vlažno krpo in milnico. Manšete ne potaplajte v vodo!</p>	
<p>Previdno ravnajte s cevko. Shranite jo proč od ostrih robov.</p>	
<p>Pazite, da merilnik ne pade na tla in z njim ne ravnajte grobo.</p>	
<p>Merilnika ne razstavljajte! V nasprotnem primeru boste okvarili umerjanje, ki ga je izvedel proizvajalec.</p>	

OPOMBA: ta merilnik je treba umeriti vsaki leti v skladu z mednarodnimi standardi.

POMEN SIMBOLOV

SIMBOL	OPIS
	Glejte navodila za uporabo
	Proizvajalec
	Serijska številka
	Pozor, glejte priložene dokumente
	Zavržite v skladu s predpisi, ki veljajo v vaši državi
	Oprema tipa BF
	Razred II
	Oznaka CE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Merilna metoda	Oscilometrična
Prikaz	Digitalni zaslon LCD
Razpon merjenja:	Tlak: (30~280) mmHg Utrip: (40~199) utripov/min
Natančnost:	Statični tlak: ± 3 mmHg Utrip: ± 5 %

Spomin:	2 x 30 rezultatov
Napajanje:	4 x 1,5 V baterije (LR6 ali AA)
Stanje delovanja:	+5 °C~+40 °C, 15 % RV~93 % RH Atmosferski tlak: 70 kPa~106 kPa
Shranjevanje:	-20 °C~+55 °C, 0 % RV~93 % RH Atmosferski tlak: 50 kPa~106 kPa
Dimenzije:	Pribl: 90 (Š) X 135 (V) X 62 (D) mm
Teža:	Pribl: 380 g, vključno z baterijami
Klasifikacija	Tip BF
Velikost manšete	22–42 cm
Adapter za izmenični tok AC	Vhod: 100–240 V, ~50/60 HZ, 0,2 A Izhod: 6 V --- 500 mA

* Zaradi izboljšanja merilnika lahko specifikacije in zunanji dizajn naprave spremenimo brez predhodnega obvestila.

GARANCIJA

Za ta merilnik krvnega tlaka model M-200A velja 5-letna garancija od datuma nakupa. Garancija za manšeto velja 1 leto od datuma nakupa. Garancija ne velja v primeru škode zaradi neustreznega ravnanja, nezgod, neupoštevanja navodil za uporabo ali samostojnih popravil in spreminjanja naprave.

Ta garancija velja le na podlagi predložene ustrezno izpolnjene in ožigosane garancijske kartice.

Za oddajnike z maksimalno izhodno nazivno močjo, ki ni navedena zgoraj, se priporočena ločilna razdalja d v metrih (m) izračuna z enačbo, ki je veljavna za frekvenco oddajnika, pri čemer je P maksimalna izhodna nazivna moč oddajnika v vatih (W), skladno z navedbami izdelovalca oddajnika.

OPOMBA 1: pri 80 MHz in 800 MHz velja večji frekvenčni razpon.
OPOMBA 2: te smernice morda ne veljajo v vseh primerih.

PRILOGA GARANCIJSKEMU LISTU

Z izročitvijo blaga potrošniku, jamčimo za kakovost oziroma brezhibno delovanje artikla. V času garancije, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku, izdelovalec, ob pravilni uporabi opisani v Navodilih za uporabo, jamči za kakovost oz. brezhibno delovanje merilnika. Poškodb, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe ali nepooblaščenih posegov v merilnik, garancija ne krije. Prav tako proizvajalec ne jamči za delovanje merilnika v primeru mehanskih poškodb ali ob uporabi neoriginalnih dodatnih delov, ki jih proizvajalec namenja za uporabo z vašim merilnikom oz. so le-ti kakorkoli spremenjeni. Po preteku garancijskega roka proizvajalec v času 3-kratne dobe garancijskega roka zagotavlja vzdrževanje merilnika in nadomestne dele. Pooblaščen servis: VPD, Bled, d.o.o. Pot na Lisice 4, 4260 Bled tel.: 04/574-5-070. Garancijska doba velja na območju Republike Slovenije.

OPOZORILO! Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhaja iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Datum izročitve blaga: _____

Omogočeno mi je, da lahko kadarkoli pisno zahtevam, da VPD, Bled, d.o.o., trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke, navedene na garancijskem listu za izdani medicinsko tehnični pripomoček za namen neposrednega trženja in da bo VPD, Bled, d.o.o., v 15 dneh preprečil uporabo mojih osebnih podatkov za navedeni namen ter me o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvestil, kar potrjujem s podpisom.
Stroške vseh dejanj krije VPD, Bled, d.o.o. (Ur.l. RS 94/07, 73.člen ZVOP).

Datum: _____

Podpis: _____

Ime in priimek: _____

Naslov: _____

Poštna številka: _____

Tel. št.: _____

E-mail: _____

Serijska številka: _____

Datum nakupa: _____

Datum izročitve blaga: _____

Prodajalec specialist: _____

Distributer:
VPD, Bled, d.o.o., Pot na Lisice 4,
4260 Bled, Slovenia, EU
www.vpd.si

BREZPLAČNA ŠTEVILKA

080 80 91



medpack
SWISS GROUP

DRUŽBA FREICARE SWISS GMBH
JE ČLANICA SKUPINE MEDPACK SWISS,
ŠVICA

Proizvedeno na podlagi naročila: FreiCare Swiss GmbH,
Seepark 6, CH - 9422 Staad SG, **ŠVICA**,
telefonska številka: + 41 71 855 07 55.

Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd., No. 25 1 st Industry Zone, Fenghuang Rd.,
Xikeng Village, Henggang Town, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province,
China.   Lotus Global Co., Ltd., 1 Four Seasons Terrace West Drayton, Middlesex
London, UB7 9GG United Kingdom.

medpack-group.com

CE ISO
0413 13485

