

# Me110

## APARAT ZA AEROSOLNO TERAPIJO, Z BATNIM KOMPRESORJEM

### Cenjeni kupec

Najprej se Vam zahvaljujemo za Valo odločitev in Vam čestitamo, da ste izbrali Aparat za aerosolno terapijo Me110, zelo enostaven in zanesljiv aparat.

### Naj Vas spomnimo, da boste v obsežni ponudbi artiklov MEDIKOEL, vedno našli najboljše:

- Aparat za aerosolno terapijo z membranskim kompresorjem.
- Aparat za aerosolno terapijo z ultrazvokom.
- Aparat za inhaliranje termalne vode na curek ali paro.
- Avtomatične merilce krvnega tlaka za roko ali zapestje.
- Digitalne ali ušesne termometre.
- Sfigmomanometre z aneroidom ali živosrebrenim stolpcem.
- Masažne aparate z infrardečimi žarki proti celulitu ali proti bolečinam.
- Hidromasažne aparate za noge.
- Parne vlažilec prostorov.
- Elektrostimulatorje TENS ali EMS.

### OPOZORILA

- Pred uporabo tega aparata se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Pazite, da aparat ne bo dosegljiv otrokom.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz električnega omrežja s potegom vtičaka iz vtičnice.

Da boste lahko svoj novi Sistem za aerosoloterapijo dolgo uporabljali, Vam svetujemo, da pazljivo preberete naslednja navodila.

### Vaš Sistem za aerosoloterapijo Me110

Aparat je opremljen z naslednjimi dodatki, ki jih boste našli v polietilenski vrečki na prednjem delu aparata:

- 1-Stikalo
- 2-Zračni filter
- 3-Odprtina za odvod zraka
- 4-Ampula za razprševanje
- 5-Ustnik
- 6-Povezovalna cev
- 7-Maska za odrasle



### Za začetek delovanja Vašega Sistema za aerosoloterapijo Me110

Najprej preverite, da so aparat in vsak njegov dodatek popolnoma čisti, nato pa opravite po vrsti naslednje operacije:

- Postavite aparat na stabilno in ravno površino (na primer mizo) v bližini električne vtičnice.
- Odprite pokrov aparata in vzemite dodatke iz polietilenske vrečke.
- S škarijami prerežite plastični trak okrog električnega kabla in ga odvijte.
- Vzemite povezovalno cev in en konec povežite na odprtino za odvod zraka, drugega pa na spodnji del ampule za razprševanje.
- Gornji del ampule za razprševanje snemite tako, da ga obračate v obratni smeri od urinnega kazalca.
- V ampulo nalijte preparat za razprševanje, količino odmerite na podlagi lestvice, ki se nahaja na strani ampule.
- Gornji del ampule postavite in pričvrstite na njeno prvotno mesto tako, da jo zavrtite v smeri urinnega kazalca.
- Na gornji del ampule postavite masko ali ustnik, odvisno od načina terapije in pogovjev s katerimi želite to opraviti.

Aparat je sedaj pripravljen za uporabo.

### Za izvajanje aerosoloterapije

- Vstavite vtičak na aparatu v vtičnico s primerno električno napetostjo.
- Postavite stikalo na aparatu v lego I.
- Začnite z nego in nadaljujte, dokler bo "meglica" zdravila, razpršenega iz aparata, le vidna.

**Pozor!** Popolnoma normalno je, da po končani negi ostane v ampuli za razprševanje določena količina zdravila (približno 0,4 ml). Tega preostanka tekočine ni mogoče razpršiti.

### Po končani negi:

- Aparat izklopite tako, da stikalo postavite v lego 0.
- Vtičak na aparatu izvlecite iz električne vtičnice.
- Električni kabel ponovno zavijte in ga bočno namestite v posebni prostorček na aparatu (v isti položaj, kot je bil na začetku).
- Snemite masko (ali drugo) iz ampule za razprševanje.
- Snemite povezovalno cev z ampule za razprševanje in z odprtine za odvod zraka iz aparata.
- Očistite masko (ali drugo) in ampulo za razprševanje tako, kot je navedeno v naslednjem odstavku.
- Vse dodatke spravite v posebni prostorček na aparatu in namestite pokrov.

### Kako boste lahko dolgo uporabljali Vaš aparat?

Vaš Sistem za aerosoloterapijo Me110 ne potrebuje posebnega vzdrževanja, dovolj je le, da ga:

- varujete pred udarci in padci na tla;
- v nobenem primeru ne odpirate;
- hranite na primernem mestu s primerno temperaturo, zaščitenega pred neposrednimi sončnimi žarki, vlago in prahom;
- čistite s krpjo, ki jo lahko navlažite z vodo ali nevtralnimi čistilom (ne uporabljajte bencina, razredčil in podobnega), nato pa ga skrbno posušite;
- v nobenem primeru ne potapljate v vodo;
- ne uporabljate neprekinjeno za več časa, kot je navedeno na nalepki na spodnji strani aparata.

Po vsaki uporabi je dobro, da pravilno očistite vse uporabljene dodatke. Dovolj je, da smatete gornji del ampule za razprševanje in jo v celoti operete pod tekočo vodo; enako velja tudi za nastavek na ampuli (maska za odrasle, ustnik). Če želite omenjene dodatke sterilizirati, lahko uporabite mrzlo raztopino, ki Vam jo svetuje Vaš zdravnik.

Zelo Vam priporočamo, da zračni filter zamenjate vsakih 15/20 uporab, ali ko postane sivkaste barve. Filter lahko sami zamenjate takole:

- izvlecite vložek z zračnim filtrom iz njegovega mesta;
- odstranite stari filter in vstavite novega;
- vložek z novim filtrom namestite na njegovo mesto.

### TEHNIČNI PODATKI

- Motor: elektrokompresor na bat
- Napajanje: pogledajte na nalepko na spodnjem delu aparata
- Tlak: 2.3 BAR 33.37 PSI
- Delovni tlak: 0.9-1.1 BAR 13.05-15.95 PSI
- Dovajanje vode: 6-7 litrov / minuto
- Pristonost filtra za čiščenje zraka.
- Mere: 280x185x110 mm
- Teža: 2100g

### GARANCIJA

Garancija urejajo veljavni predpisi z ustreznega področja. Z garancijo krijejo napake v materialu in v izdelavi. Garancija ne velja za kable in baterije. Garancija velja v primeru, da aparata ne odpirate ali namena moškodujete. Pri uveljavljanju garancije morate imeti izvirnik računa. Za reklamacije se obrnite na prodajalca. Za vprasanja in pojasnila se obrnite na servisno službo [www.medikoel.com](http://www.medikoel.com). Ob ustreznih medložitvi zahtevanih dokumentov, se aparat nadomesti s podobnim. MEDIKOEL ne odgovarja za poškodbe, do katerih pride zaradi zunanjih vzrokov. Zadržek pred napakami ali spremembami.