

**SI REMESCAR SILIKONSKO
MAZILO ZA BRAZGOTINE**

Opis: Remescar pomaga pri procesu celjenja novih in starih brazgotin, ki so posledica kirurških posegov, opeklin, ugrizov žuželk, aken, strij ipd. Deluje s sproščanjem tankega in diskretnega silikonskega filma, ki zagotavlja ustrezno mikrokolje za celjenje brazgotin in obenem ohranja naravno vlažnost kože.

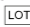


Namen uporabe: Silikonska nega starih in novih brazgotin v priročnem aplikatorju. Lahko se uporablja tudi kot preventiva na zaprtih ranah za zmanjšanje brazgotinjenja. Mazilo je enostavno za uporabo in primerno za vsa področja na obrazu in telesu. Po nanosu ne pušča sledi in se lahko uporablja tudi pod ličili. Remescar, vaš odgovor za brazgotine!

Uporablja se pri naslednjih vrstah brazgotin: keloidne, hipertrofične, po opeklini, po poškodbi, strije, po kirurških posegih, po kirurškemu oblikovanju telesa, nastale pri »body piercingu«, rdečice po laserskem pilingu, posledice aken, posledice ugrizov žuželk.

Navodila za uporabo: Brazgotinasto področje mora biti brez odprtih ran, čisto in suho. Pred prvo uporabo odstranite zaščitni plastični pokrovček. Pred nanosom iz embalaže potisnite največ 3 mm izdelka oziroma toliko, da med nanosom ne drgnete po koži še s plastično embalažo. Remescar previdno nanesite na prizadeto območje in okoli roba brazgotine. Dodatno pritiskanje ni potrebno, saj ne povečuje učinkovitosti proizvoda. Remescar uporabljajte dvakrat na dan 2 ali 3 mesece.

Sestavine so navedene na ovojniini.

Varnostni ukrepi:

- Ne nanašajte na opeklino tretje stopnje.
- Samo za zunanjo uporabo.
- Ne uporabljajte pri dermatoloških stanjih, kjer je porušena integriteta kože.
- Ne uporabljajte na odprtih ali okuženih ranah.
- Ne uporabljajte na aknasti koži.
- Uporabljajte le na zdravi, neokuženi koži.
- Ne uporabljajte, če ste alergični na katero koli od sestavin.
- Izogibajte se stiku s sluznico in očmi.
- Ne nanašajte preko ostalih pripravkov za kožo brez predhodnega posveta s svojim zdravnikom.
- Lahko pušča madeže, če nanos ni popolnoma suh.
- V primeru draženja kože prenehajte uporabljati in se posvetujte s svojim zdravnikom, če draženje ne preneha.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom in pri temperaturi do 30 °C.
- Remescar ni sterilen in se ne sme nanašati na odprte rane.
- Ni priporočljivo za uporabo pri otrocih mlajših od 6 let brez nadzora odrasle osebe. Pri otrocih mlajših od enega leta starosti se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.
- Ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti.
- Številka serije () in rok uporabnosti () sta označena na tubi in ovojniini.
- () Shranjujte zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.

Distributer: InnoPharma d.o.o.,
Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, Slovenija;
info@innopharma.biz

Proizvajalec/Proizvođač: Sylphar NV -
Xavier De Cocklaan 42, 9831 Deurle – Belgija;
www.remescar.com

**HR REMESCAR SILIKONSKI
STICK ZA OŽILJKE**

Opis: Remescar pomaže u procesu zacjeljivanja novih i starih ožiljaka koji su posljedica kirurških zahvata, opekline, uboda insekata, akni, strija itd. Formira tanak i diskretan film na bazi silikona i na taj način osigurava pogodno mikrookruženje za zacjeljivanje ožiljaka, a istodobno se zadržava prirodna fiziološka vlažnost kože.

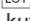
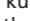

Indikacije: Silikonska terapija za nove i stare ožiljke s praktičnim aplikatorom na sticku. Može se primjenjivati i kao preventivna terapija na zatvorenim ranama, čime se ublažava nastajanje ožiljaka. Stick je jednostavan za uporabu i prikladan za sva područja na licu i tijelu. Nevidljiv je nakon primjene i može se nositi i ispod šminke. Remescar, vaš odgovor na ožiljke!

Remescar se može upotrebljavati kod sljedećih vrsta ožiljaka: keloidnih, hipertrofičnih, od opekline, traumatskih, od strija, od kirurških zahvata, od kirurškog oblikovanja tijela, od body piercinga, crvenila od laserskog pilinga, od akni, od uboda insekata.

Upute za uporabu: Područje prekriveno ožiljkom treba biti zatvoreno, čisto i suho. Pri prvoj uporabi otvorite stick i skinite zaštitni poklopac. Prije nanošenja potisnite proizvod iz plastične ambalaže prema gore najviše 3 mm odnosno toliko da ambalaža pri nanošenju ne dodiruje kožu. Remescar lagano nanesite na područje zahvaćeno ožiljkom i oko ruba ožiljka. Nemojte ga previše utrljavati jer se time neće povećati učinkovitost. Remescar nanosite dva puta dnevno 2 do 3 mjeseca.

Sastojci su navedeni na kutiji.

Mjere opreza:

- Ne nanositi na opekline trećega stupnja.
- Samo za vanjsku uporabu.
- Ne upotrebljavati u dermatološkim stanjima ako je narušen integritet kože.
- Ne upotrebljavati na otvorenim ili inficiranim ranama.
- Ne upotrebljavati na koži zahvaćenoj aknama.
- Upotrebljavati samo na zdravoj i neinficiranoj koži.
- Uporaba proizvoda ne preporučuje se ako imate alergijske reakcije na bilo koji od sastojaka.
- Izbjegavati dodir sa sluznicom ili očima.
- Ne primjenjivati u kombinaciji s drugim proizvodima koji se stavljaju na kožu bez preporuke liječnika.
- Može ostaviti mrlje na odjeći ako se potpuno ne osuši.
- Ako se pojavi nadražnost kože, prestanite s uporabom, a ako se nadražnost ne povuče, posavjetujte se sa svojim liječnikom.
- Čuvajte izvan dohvata djece. Čuvajte na temperaturi ispod 30°C.
- Ne upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti.
- Remescar nije sterilan i ne smije se upotrebljavati za previjanje rana.
- Ne preporučuje se za djecu mlađu od 6 godina bez nadzora odraslih. Za djecu mlađu od godine dana posavjetujte se s liječnikom prije uporabe proizvoda.
- Serijski broj () i rok uporabe () označeni su na tubi i kutiji.
- () Zaštitite od izravna sunčeva svjetla.

Kontakt: InnoPharma d.o.o.,
Podružnica Zagreb za promidžbu,
Srebrnjak 61, 10000 Zagreb, Hrvatska;
info@innopharma.biz

CE
0197

SI.HR.2.3.PLT.V1.16.12