

TONIMER lab:

NORMAL NOSNO PRŠILO

Sterilna, izotonična raztopina morske vode z nizko vsebnostjo natrija in rahlo alkalnim pH. Izdelek je namenjen za odstranjevanje in redčenje sluzi iz nosnih poti pri otorcih in starejših osebah, v primeru suhe in preobčutljive nosne sluznice in prehlada.

Način uporabe:

1. Po odstranitvi zaščitnega pokrovčka, lahko odrasli in otroci, ki so sposobni samostojne uporabe pršila, Tonimer uporabljajo v kateremkoli položaju. Najbolje je, da se nagnite nad umivalnik, glava naj bo nagnjena postrani. Pršilni nastavek vstavite v nosnico, ki je v višjem položaju in pritisnite na pršilnik. Postopek ponovite z drugo nosnico (slika 1).

2. Novorojenčka ali manjhnega otroka položite na bok, vstavite pršilni nastavek v zgornjo nosnico in pritisnite na pršilnik. Nato otroka položite na drugi bok in postopek ponovite (slika 2).

3. Nastavek pršilnika po vsaki uporabi obrišite in posušite ter pršilo ponovno zaprite z zaščitnim pokrovčkom.

Pogostost uporabe: V skladu z navodili, po potrebi tudi večkrat dnevno, ali po nasvetu zdravnika.

Opozorilo: Izdelka ne uporabljajte drugače, kot je tu navedeno. V primeru preobčutljivosti na sestavine, ne uporabljajte izdelka. V primeru neželenih učinkov, prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom. Če proizvodi pride v oči, sperite temeljito z vodo.

POZOR: če pršilo zaide v oči, oko izperite z vodo. Hraniti zunaj dosega otrok. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne preluknjajte ali sežigajte niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F.

SESTAVINE so navedene na proizvajalčevi deklaraciji.

ROK UPORABE je naveden na embalaži.

PROIZVAJALEC: ISTITUTO GANASSINI di Ricerche Biochimiche, 20139 Milano, Italija

DOBAVITELJ: PHARMAGEA d.o.o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur