

VLAŽILNIK ZRAKA UHW Navodilo za uporabo




- 1 Posoda za vodo
- 2 Razpršilec
- 3 ON/OFF stikalo ter hkrati stikalo za uravnavanje intenzitete izhajanja pare
- 4 ON/OFF gumb za nočno lučko



POMEMBNE INFORMACIJE! OBDRŽITE ZA MOREBITNO KASNEJŠO UPORABO!

Pred uporabo previdno preberite navodila za uporabo in jih obdržite, v primeru, da jih boste ponovno uporabili ali v primeru, da napravo komu predate.

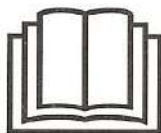

RAZLAGA SIMBOLOV:

To navodilo za uporabo sodi le k vlažilniku zraka UHW.

Vsebuje pomembne informacije, kako pričeti uporabljati napravo. Natančno preperite navodilo. Nepravilna uporaba lahko povzroči resne poškodbe naprave.



OPOZORILO!

Na tovrstna opozorila morate biti pozorni, da preprečite morebitne poškodbe uporabnika.



PREVIDNO

Na tovrstna opozorila morate biti pozorni, da preprečite poškodbe naprave.



POZORNO

Ta navodila vam nudijo uporabne informacije glede prve uporabe in nadaljnje uporabe naprave.



Lot številka



Proizvajalec

1 INFORMACIJE ZA VARNO UPORABO

Električno omrežje

- Preden napravo priključite na električno omrežje, se prepričajte, ali električna napetost v vašem stanovanju ustreza zahtevam izdelka.
- Napravo v električno omrežje vklaplajte le, ko je izključena.
- Naprave nikoli ne nosite, ne vlecite in ne obračajte le s pomočjo kabla. Prav tako pazite, da se kabel ne zaplete.
- Kabla se ne dotikajte, če stojite v vodi ter ga ne prijemajte z mokrimi rokami.

Za ljudi s posebnimi potrebami

- Naprave naj ne uporabljajo osebe z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi. Prav tako naj je ne uporabljajo otroci.
- Otroci morajo biti ob uporabi nadzorovani! Naprava ni igrača!
- V primeru težav z dihanjem se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.
- Če se vam med uporabo naprave poslabša zdravstveno stanje, jo takoj prenehajte uporabljati ter se posvetujte z zdravnikom.

Uporaba naprave

- Naprava ni namenjena komercialni uporabi.
- Napravo uporabljajte le v namene, opisane v navodilu za uporabo. V nasprotnem primeru, garancije ne morete uveljavljati.
- Naprave ne uporabljajte, če opazite kakršnokoli poškodbo na kablu, če ne deluje normalno ter v primeru, če je padla v vodo.
- Pazite, da naprava ali kabel ne prideta v stik z vročimi površinami.
- Med uporabo napravo položite na ravno površino tako, da se ne more prevrniti.
- V primeru, da vam naprava pade v vodo, takoj izklopite kabel iz omrežja.
- Naprave ne uporabljajte v primeru, če je posoda za vodo prazna.
- Ne uporabljajte aromatičnih esenc, ker to lahko poškoduje napravo.
- Pazite, da bodo ventilacijske reže na dnu naprave čiste.
- Po uporabi izklopite vse funkcije.

Vzdrževanje in čiščenje

- Naprave ne popravljajte sami – s tem izničite garancijo. O popravilu se posvetujte s prodajalcem.
- Naprave ne namakajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
- Če slučajno pride do vdora katerekoli tekočine v napravo, jo nemudoma izklopite.
- Napravo shranjujte v suhem prostoru.

2 UPORABNE INFORMACIJE

Hvala za zaupanje in čestitke ob nakupu vlažilca zraka UHW, kvalitetnega izdelka podjetja Medisana.

Da bi Vam izdelek dolgo služil in da bi bili z njim kar najbolj zadovoljni, Vam priporočamo, da pozorno preberete navodila za uporabo in vzdrževanje.

2.1 Vsebina paketa

Pred prvo uporabo preverite, ali je komplet naprave popoln in ali so deli nepoškodovani. V primeru, da v to dvomite, naprave ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca.

Vsebina:

- 1 vlažilec zraka MEDISANA UHW,
- 1 ščetkico za čiščenje,
- 1 navodila za uporabo.

Embalaža se lahko ponovno uporabi ali reciklira. Če na embalaži ali na napravi opazite kakršne koli poškodbe, ki so nastale med transportom, to takoj sporočite prodajalcu.



Plastično vrečko in embalažo shranite izven dosega otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.

2.2 Intenzivni vlažilec zraka

Zimski meseci so čas, ko še posebej občutimo, da se vlažnost zraka zmanjšuje. Suh zrak pa povečuje dovzetnost za bolezni dihalnih poti in povzroča utrujenost ter slabo koncentracijo. Vlažnost zdravega zraka naj bi bila tako med 40 % in 55 %.

Ultrazvočna tehnologija, ki omogoča tiho in z energijo varčno delovanje vlažilnika zraka pretvarja vodo v paro, katera zviša nivo vlage v zraku. Posledično se kvaliteta zraka zelo izboljša, poleg tega preprečuje izsušitev sluznice in kože, kar vse vodi k vsesplošnemu dobremu počutju.

Kapaciteta naprave je primerna za sobo z največ 30 m² površine. Z uporabo rotacijskega gumba **(3)** lahko glede na velikost sobe spreminjate intenziteto vlaženja

Pozornost namenite tudi navodilom za skrb in čiščenje naprave.



Prekomerno vlaženje zraka lahko povzroči preveliko vlažnost zraka, kar se lahko pozna na stenah, oknih in predmetih v sobi. Zaradi tega uporabljajte higrometer in pazite, da ne presežete relativne vlažnosti zraka v sobi (55%).



Napravo vedno uporabljajte na varni ravni podlagi, ki ni občutljiva na vlago. Pri uporabi namreč lahko nastane kondenz ali se nabere nekaj vlage na podlagi, še posebej v primerih, ko v napravi uporabljate trdo vodo ali ko vodi dodate aromatizirane dodatke.

3 DELOVANJE

3.1 Polnjenje in praznjenje posode za vodo

Posodo za vodo **(1)** odstranite in jo obrnite »na glavo«. Odvijte pokrov posode. Posodo napolnite z največ 4,5 litra pitne vode. Pokrov posode navijte nazaj, da jo zaprete. Posodo, napolnjeno z vodo ponovno namestite na napravo. Ko je posoda napolnjena z vodo, naprave ne premikajte. Po uporabi izpraznite preostalo vodo in posodo ponovno napolnite z novo pitno vodo. Če naprave določen čas ne nameravate uporabljati, posodo za vodo izpraznite ter napravo izklopite.



Uporabljajte le svežo pitno vodo. V primeru, da imate trdo vodo, uporabljajte destilirano vodo. Za učinkovito delovanje naprave, jo redno čistite in odstranjajte kakršnekoli nastale ostanke na napravi!

3.2 Vkllop in izklop vlažilnika

Napravo vklopite v primerno električno omrežje. Napravo vklopite z uporabo rotacijskega gumba ON/OFF in hkrati gumba za nastavitve intenzitete izhajanja pare **(3)** od OFF do ON. LED lučka, vgrajena pod posodo za vodo se prižge in je zelena. Ko je posoda za vodo prazna, se prižge rdeča lučka.

Nato nastavite želeno intenziteto izhajanja pare od minimuma (na napravi označeno z eno kapljico) do maksimuma (na napravi označeno s tremi kapljicami). Po nekaj sekundah bo para, ki izhaja iz vlažilnika **(2)**, vidna.

Po uporabi naprave, ali , ko v posodi za vodo vode zmanjkuje (rdeča lučka), napravo izklopite tako, da rotacijski gumb **(3)** zavrtite nazaj na OFF. Če se posoda za vodo izprazni, se naprava izklopi samodejno. Naprava ima modro nočno osvetljava. Ko je naprava vklopljena za nočno osvetljava pritisnite gumb ON/OFF **(4)**. Isto naredite, če želite osvetljava izklopiti.

3.3 Čas delovanja naprave

Čas delovanja naprave je v primeru maksimalne intenzitete (230 ml/uro) približno 20 ur.

3.4 Napake in odpravljanje le teh

- Naprava se ne vklopi (lučka ne gori): napravo izklopite in ponovno vklopite v električno omrežje; preverite napetost električnega omrežja, vtičnico in varovalko.
- Ni pare (rdeča lučka): napolnite posodo za vodo.
- Kljub temu, da je posoda za vodo polna, ni pare: rotacijski gumb obrnite na maksimum; napravo položite na ravno površino; s priloženo ščetkico očistite generator in ponovno napolnite posodo s svežo vodo; napravo splaknite s svežo vodo.
- Bele usedline: uporabite pol litra destilirane ali sveže tekoče vode za čiščenje; če to ne pomaga, se obrnite na prodajalca.

4 OSTALE INFORMACIJE

4.1 Čiščenje in vzdrževanje

- V primeru, da napravo uporabljate vsak dan, priporočamo čiščenje na vsaj tri dni. Napravo prav tako očistite, če je dalj časa ne uporabljate.
- Pred čiščenjem naprave se prepričajte, ali je le-ta izklopljena.
- Odstranite in spraznite posodo za vodo.
- Zunanje dele naprave čistite z mehko in vlažno krpo.
- Za čiščenje nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, kot je npr. čistilna krema in podobni detergenti, saj lahko poškodujejo površino naprave.
- Posodo za vodo lahko splaknete z vročo vodo (nad 65°C) ali z vsaj 75% alkoholom.
- Najbolj občutljiv del naprave je ultrazvočni generator. Pazite, da bo čist in z njim ravnejte previdno. za odstranjevanje umazanije ali usedlin uporabljajte priloženo ščetko. Generatorja ne čistite s pomočjo kovinskih pripomočkov!
- Če naprave nekaj časa ne nameravate uporabljati, posodo za vodo izpraznite in jo osušite.
- Ostanke vodnega kamna lahko očistite s pomočjo citronske kisline.
- Napravo hranite na hladnem, suhem prostoru.
- Ločeno hranite navoj vodnega tanka, da preprečite morebitno zlepljenje



4.2 Ravnanje z odsluženo napravo

Odslužene naprave ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Pri ravnanju z odsluženo napravo se držite lokalnih okoljevarstvenih predpisov in ravnajte odgovorno do okolja.

4.3 Tehnični podatki

Ime in model naprave	: MEDISANA vlažilec zraka UHW
Električni tok	: 220-240 V~ 50Hz
Poraba energije	: 32 W
Volumen posode za vodo	: 4,5 l
Kapaciteta razpršila	: max. 230 ml/h
Dimenzije (d*š*v)	: približno 26,5 * 33 * 20 cm
Pogoji shranjevanja	: čist in suh prostor
Številka izdelka	: 60060
EAN številka	: 40 15588 60060 9



Podjetje MEDISANA si ves čas trudi izdelke še izboljšati, zato si pridržujemo pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb na napravah brez vnaprejšnjega opozorila.



MEDISANA AG
Jagenbergstrasse 1
41468 Neuss
Germany

Garancijski list

VLAŽILNIK ZRAKA MEDISANA UHW

Proizvajalec:

MEDISANA AG,

41468 NEUSS

NEMČIJA

www.medisana.de

Žig, podpis ter sedež prodajalca:

Datum izročitve:

GARANCIJSKI POGOJI

1. Proizvajalec jamči, da ima izdelek predpisane, oz. deklarirane kvalitetne karakteristike in da bo na zahtevo imetnika garancijskega lista, če ga dobavi v garancijskem roku, na lastne stroške odpravil napake in pomanjkljivosti izdelka, ki izhajajo iz izdelka ali pa bo izdelek, ki ima take pomanjkljivosti zamenjal z novim.
2. Garancijski rok začne teči od dneva izročitve, kar dokažete s pravilno izpolnjenim garancijskim listom (žig, podpis ter sedež prodajalca, datum prodaje, serijska številka aparata in izvirnim računom).
3. Dajalec garancije zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
4. Garancija velja na območju Slovenije.
5. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
6. Garancija preneha veljati v primerih:
 - če ne upoštevate navodil za uporabo,
 - če popravilo izvrši nepooblaščen oseba,
 - zaradi malomarnega ravnanja s proizvodom,
 - če poškodba nastane zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca.

GARANCIJSKI ROK JE 3 LETA.

Zastopnik za Slovenijo (dajalec garancije):

PROLAT d.o.o., Praproče 9, 8210 Trebnje

T: (07) 30 44 555

F: (07) 30 44 333

info@prolat.si

www.prolat.si

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure; sobota, nedelja, prazniki zaprto

Serviser:

MEDIA-IMPEKS d.o.o.

Kicar 11 g

SI-2250 PTUJ

Tel. +386 599 60 650

Fax: +386 2 796 09 21

Gsm: +386 41 633 636