

HemoClin® gel (SI)

- Takojšen hladilni učinek pri hemoroidih in težavah v predelu analne odprtine (npr. srbenje, draženje, pekoč občutek in občutljivost).
- Preprečuje nastanek hemoroidov in fisur (razpok).
- Preprečuje in odpravlja nelagodje v predelu analne odprtine.
- Neguje kožo in spodbuja naravni proces celjenja.
- Uporabniku prijazen in čist sistem za nanašanje.

Pred uporabo izdelka HemoClin® gel natančno preberite celotno navodilo za uporabo. Navodila ne zavrzite. Če imate vprašanja ali če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Vsebina navodila za uporabo:

- Za kaj se uporablja HemoClin® gel?
- Kaj vsebuje HemoClin® gel?
- Kako delujejo aktivne učinkovine izdelka?
- Kaj morate vedeti, preden uporabite HemoClin® gel?
- Kdaj in kako uporabite HemoClin® gel?
- Shranjevanje in opozorila
- Vsebina pakiranja

1. Za kaj se uporablja HemoClin® gel?

HemoClin® gel odpravlja nelagodje v predelu analne odprtine in se uporablja za blaženje s hemoroidi, povezanih simptomov kot so draženje, srbenje, pekoč občutek in občutljivost. HemoClin® gel preprečuje in olajša težave v predelu analne odprtine. Hemoroidi in druge težave v predelu analne odprtine so pogoste med nosečnostjo in po porodu.

2. Kaj vsebuje HemoClin® gel?

Kaj vsebuje gel?
HemoClin® vsebuje 45 ml naravnega, neškodljivega gela. Gel je na osnovi patentiranega bioaktivnega kompleksa 2QR, ki je izoliran iz rastline *Aloe barbadensis*. Izdelek ne vsebuje dodanih arom ali sestavin živalskega izvora.

3. Kako delujejo aktivne učinkovine izdelka?

HemoClin® gel je učinkovit pri preprečevanju in odpravljanju težav v predelu analne odprtine, kot so srbenje, draženje, pekoč občutek in občutljivost. Bioaktivni gel nudi hitro ublažitev težav pri hemoroidih, fisurah (razpokah) in težavah v predelu analne odprtine. Bioaktivna sestavina, imenovana 2QR, nevtralizira škodljive mikrobe, podpira naravni proces celjenja in neguje tkivo. HemoClin® gel deluje tudi kot lubrikant in olajša praznjenje črevesja.

Sestavine:

Aqua, Aloe Barbadensis Gel, Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, PEG-8, Xanthan Gum, Betaine, Laureth-9, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Potassium phosphate.
* 2QR



4. Kaj morate vedeti, preden uporabite HemoClin® gel?

HemoClin® gel ne vsebuje škodljivih kemikalij. Neželeni učinki pri uporabi izdelka HemoClin® gel niso poznani.

Najprej se pogovorite s svojim zdravnikom:

Če so vaše težave s hemoroidi stalne ali če opazite močno krvavitev.

Uporaba z zdravili:

Interakcije z zdravili niso znane.

5. Kdaj in kako uporabite HemoClin® gel?

Za odpravljanje težav v predelu analne odprtine (npr. srbenja, draženja, pekočega občutka, občutljivosti): Gel nanesite na prizadeti predel in njegovo okolico v zadostni količini najmanj dvakrat na dan v obdobju dveh tednov oziroma vsakokrat, ko želite ublažiti simptome. Bolj pogosta uporaba izboljša učinek.

Za preprečevanje (notranjih in zunanjih) hemoroidov in fisur (razpok):


Gel nanesite v anus in njegovo okolico pred vsakim praznjenjem črevesja in po njem.

Izdelka HemoClin® gel ne uporabljajte več kot 30 zaporednih dni.


Ne uporabljajte izdelka, če ste občutljivi na katerokoli od sestavin.

Sestavni deli aplikatorja


Za uporabo HemoClin® gela upoštevajte navodila, ki jih prikazujejo spodnje sličice:

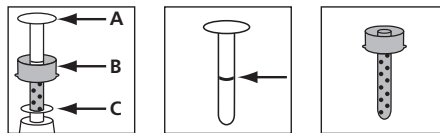


1. korak: Aerosolni vsebnik postavite na mizo ali trdno podlago.

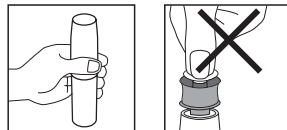

2. korak: Vsebnik trdno držite in pritisčajte navzdol **modri del (B)** (slišati boste žvižganje podobno zvok) dokler na **belem delu (A)** ne opazite obročka. Običajno se pojavi v času dveh sekund. Opazili boste, da se **beli del (A)** samodejno pomakne navzgor. **Aplikator se tako napolni in je pripravljen za uporabo.**

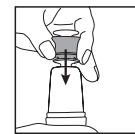


Pritisčajte navzdol **modri del (B)**

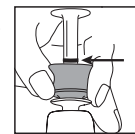


Ko se pojavi obroček, prenehajte.

3. korak: Aplikator z obema deloma povlecite iz držala (del C).

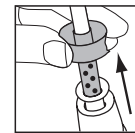

4. korak: Oba dela aplikatorja (A + B) vstavite v analno odprtino. Pritisnite navzdol **beli del (A)** potem, ko ste vstavili **modri del (B)** v analno odprtino. HemoClin® gel se bo sprostil na prizadeto področje.

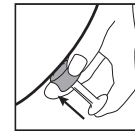

Po uporabi:

Po vsaki uporabi oba dela aplikatorja ločeno umijte s toplo vodo. Del C obrišite. Aplikator vstavite nazaj v očiščen del C in ga zaprite s pokrovčkom.

6. Shranjevanje in opozorila

Vsebnik pod tlakom: pri segrevanju lahko poči. Ne pretuknjajte ali sežigajte ga niti po uporabi. Shranjujte ločeno od toplote/isker/odprtega ognja/vročih površin. Ne kadite. Ne pršite proti odprtemu ognju ali drugim virom vžiga. Ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 50 °C/122 °F. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Vsebuje majhne delce. Izdelek z aplikatorjem zaščitite pred sončno svetlobo in ga shranjujte na suhem in hladnem mestu (dobro prezračeno). Aerosolni vsebnik uporabljajte samo v kombinaciji s priloženim aplikatorjem.

Zelo lahko vnetljivo. Vsebnik pod tlakom.

7. Vsebina pakiranja

- Aerosolni vsebnik s 45 ml gela in priloženi aplikatorjem
- Navodilo za uporabo

Za več informacij o izdelku HemoClin® gel, obiščite spletno stran www.hemoclin.com

HemoClin® gel (HR) (BIH)

- Brzo hladi i ublažava hemoroide i analne tegobe (primjerce svrbež, iritaciju, osjećaj žarenja, osjetljivost)
- Sprječava nastanak hemoroida i fisura (raspuškina)
- Tretira i sprječava analne tegobe
- Njeguje kožu i pomaže u prirodnom procesu zacjeljivanja
- Za korisnika ugodan i čist sustav primjene

Molimo pažljivo pročitajte cijelu uputu za uporabu prije korištenja HemoClin® gela. Uputu nemojte baciti. Ako imate bilo kakva pitanja ili ako niste sigurni u pogledu nečega, molimo obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Sadržaj ove upute:

- Za što se koristi HemoClin® gel?
- Što sadržava HemoClin® gel?
- Što čine aktivni sastojci u ovom proizvodu?
- Što trebate znati prije korištenja HemoClin® gela?
- Kada i kako trebate koristiti HemoClin® gel?
- Čuvanje i upozorenja
- Što sadržava pakiranje HemoClin® gela?

1. Za što se koristi HemoClin® gel?

HemoClin® gel koristi se za tretman analnih tegoba i za ublažavanje simptoma iritacije, svrbeža, osjećaja žarenja i osjetljivosti koji su povezani s hemoroidima. HemoClin® gel sprječava i tretira analne tegobe. Hemoroidi i druge analne tegobe često se javljaju tijekom trudnoće i nakon porođaja.

2. Što sadržava HemoClin® gel?

Što se nalazi u gelu?
HemoClin® gel sadržava 45 ml prirodnog, neškodljivog gela koji se zasniva na patentiranom bioaktivnom 2QR kompleksu, izoliranom iz biljke *Aloe barbadensis*. Proizvod ne sadržava mirise ni sastojke životinjskog podrijetla.

3. Što čine aktivni sastojci u ovom proizvodu?

HemoClin® gel učinkovit je u sprječavanju i tretmanu analnih tegoba kao što su svrbež, iritacija, osjećaj žarenja i osjetljivost. Bioaktivni gel nudi brzo olakšanje kod hemoroida, fisura (raspuškina) i analnih tegoba. Bioaktivni sastojak 2QR nevtralizira štetne mikrobe te podržava prirodni proces zacjeljivanja i obnavljanja tkiva. HemoClin® gel također služi za podmazivanje kako bi se olakšalo pražnjenje crijeva.

Sastojci:

Aqua, Aloe Barbadensis Gel, Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, PEG-8, Xanthan Gum, Betaine, Laureth-9,



Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Potassium phosphate.
* 2QR

4. Što trebate znati prije korištenja HemoClin® gela?

HemoClin® gel ne sadržava nikakve štetne tvari. Nisu poznate nuspojave tijekom korištenja HemoClin® gela.

Molimo obratite se prvo svom liječniku ako trajno patite od hemoroida ili od prekomjernog krvarenja.

Istovremena uporaba lijekova:

Nije poznat međusobni utjecaj s lijekovima.

5. Kada i kako trebate koristiti HemoClin® gel?

Za tretman analnih tegoba (primjerce iritacije, svrbeža, osjećaja žarenja, osjetljivosti): Nanesite na zahvaćeno područje i oko njega primjenjujući gel najmanje dva puta dnevno u dovoljnoj količini tijekom dva tjedna ili kada je potrebno ublažavanje tegoba. Češća primjena povećava učinkovitost.

Za sprječavanje (unutarnjih i vanjskih) hemoroida i fisura (raspuškina):

Nanesite u anus i oko njega prije i nakon svakog pražnjenja crijeva.

HemoClin® gel ne bi trebalo koristiti više od 30 dana zaredom.

Ne koristite ovaj proizvod ako ste preosjetljivi na bilo koji sastojak.

Sastavni dijelovi aplikatorja

Za uporabu HemoClin® gela slijedite upute koje su prikazane na donjim slikama:

