

## NAVODILO ZA UPORABO

### Hemorogal krema 50 ml

medicinski pripomoček za težave pri zunanjih hemoroidih

Pred uporabo medicinskega pripomočka Hemorogal krema natančno preberite to navodilo, saj vsebuje za vas pomembne podatke.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom

#### Sestava

Prečiščena voda, Caprylic / Capric Triglyceride, Amygdale oleum, Stearic Acid, Cetearyl Alcohol (and) Sodium Cetearyl Sulfate, Glyceryl Stearate, Dimethyl Sulfone, Sorbitan Caprylate, Glycerin, Propanediol, Benzoic Acid, Rosmarinus Officinalis Extract, Parfum, Nigella sativa (black cumin) extract, Alchemilla vulgaris (lady's mantle) extract, Conyza Bonariensis (hairy fleabane) extract

#### Kaj je in za kaj se uporablja Hemorogal krema?

Hemorogal krema je medicinski pripomoček, namenjen uporabi za lajšanje težav pri zunanjih hemoroidih. Z uporabo se umirijo hemoroidne težave.

S tankim nanosom kreme se vzpostavi fizična bariera z zunanjimi dejavniki okolja, ki lahko iritirajo hemoroide in s tem povzročajo srbečico in otekanje, ki ga spremlja bolečina. Dodani rastlinski izvlečki pomagajo preprečevati nastanek in ponavljanje simptomov, ki spremljajo hemoroide

Krema je namenjena kot podporna terapija in kot pomoč pri zdravljenju hemoroidov.

#### Kaj morate vedeti, preden pričnete uporabljati Hemorogal kremo?

Ta izdelek ne vsebuje kortikosteroidov.

Če Hemorogal kremo kombinirate z drugimi vrstami zdravljenja, se pred pričetkom posvetujte z zdravnikom ali dermatologom, da bi se tako izognili možnim neželenim učinkom zaradi takšnih vrst zdravljenja.

#### Kako uporabljati Hemorogal kremo?

Na obolele predele kože nanesite kremo dva do trikrat dnevno. Tretma ponavljajte 2-4 tedne oziroma do popolnega okrevanja.

#### Opozorila

Samo za zunanjo uporabo!

Izogibajte se stiku z očmi. V primeru stika z očmi temeljito sperite z mlačno vodo.

Ne uporabljajte na poškodovani koži.

Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti.

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

#### Kako shranjevati Hemorogal kremo?

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.

Ne zamrzujte.

Ne shranjujte kreme na vročini ali direktnem soncu.

**Proizvajalec**

GALEX, proizvodnja in promet s farmacevtskimi in drugimi proizvodi d.o.o., Murska Sobota,  
Tišinska ulica 29g

**Distributer**

GALEX, proizvodnja in promet s farmacevtskimi in drugimi proizvodi d.o.o., Murska Sobota,  
Tišinska ulica 29g

**Datum izdaje navodila:**

27.12.2018

