

Scholl express odstranjevalec kurjih oces - aplikator 2 v 1

SL10059397L1

1 aplikator s strgalom in 1 ml tekočine za zdravljenje V čem se razlikuje Scholl express odstranjevalec kurjih oces - aplikator 2 v 1 od drugih načinov zdravljenja? Scholl express odstranjevalec kurjih oces - aplikator 2 v 1 je edinstven, izredno učinkovit in hiter način odstranjevanja kurjih oces. Lahko se uporablja večkrat in na več kurjih ocesih hkrati. Pred uporabo pozorno preberite navodilo za uporabo. Kako naj uporabljam Scholl express odstranjevalec kurjih oces - aplikator 2 v 1? Deluje v dveh korakih: 1. korak: strganje. Previdno odstranjajte zgornje plasti kurjegaočesa z delom aplikatorja namenjenega za strganje (1). Tako ublažite bolečino in tekočini na drugi strani aplikatorja omogočite pronicanje v kurje oko. Za učinkovito odstranitev kurjega očesa postopek ponovite vsake 3 dni. 2. korak: nanos tekočine za zdravljenje. S pomočjo dela aplikatorja za nanos tekočine (2). Tekočino za zdravljenje nanesite na kurje oko, ki se bo zaradi njenega delovanja zmeščalo. Tako bo zdravljenje bolj učinkovito. Tekočino nanesite vsak dan. Kakšni bodo rezultati? Vidno izboljšanje v petih dneh. Ublažitev bolečine.* * Bolečina se zmanjša, saj se zmanjša debelina plasti kože in s tem pritisk kurjega očesa. Kaj je pravzaprav kurje oko? Kurja očesa so najpogostejša težava, ki se pojavlja na nogah. Kurja očesa so odebelitev kože, ki se pojavi kot posledica pritiska na kožo. Odebeljena koža formira obliko majhnega, obrnjenega stožca, tvori (t.i. jedro), ki vdira v kožo. Je ta izdelek primeren zame? Scholl express odstranjevalec kurjih oces - aplikator 2 v 1 se lahko uporablja tako na vrhu prstov na nogi kot tudi za trda kurja očesa na stopalu in tudi za mehka kurja očesa, ki se pojavljajo med prsti. Uporaba ni priporočljiva, če kurje oko krvavi in je zelo boleče. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč. Kakšni so simptomi? Kurja očesa imajo obliko obrnjenega stožca, notranja „špica“ pogosto pritiska na živčne končiče, kar povzroča bolečino in neudobje ter oteži hojo. Kurje oko največkrat pokriva žulji/odebeljena koža. Opozorila in previdnostni ukrepi: Izdelka ne uporabljajte na razpokani ali razdraženi koži. V primeru kakršnekoli nevšečnosti ali iritacije prenehajte z uporabo in poiščite zdravniško pomoč. Izključno za zunanjo uporabo. Izdelek uporabljajte samo na prizadetem področju in ne nanašajte na zdravo kožo. SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM! IZDELKA NE UPORABLJAJTE MED NOSEČNOSTJO IN DOJENJEM. Izogibajte se stiku z očmi. Medzdravljenjem na isti površini ne uporabljajte drugega izdelka. Vnetljivo, hranite stran od virov vžiga. Uporabljajte v skladu z navodili za uporabo. Shranjujte v suhem prostoru do 25°C, zaščiten pred neposrednim vplivom sonca. Sestavine tekočine: urea, voda, etanol, butilmetakrilat, kopolimer in propilenglikol. Scholl in sladkorna bolezen: Ta izdelek NI PRIMEREN za osebe s sladkorno boleznijo ali motnjami v krvnem obtoku. www.scholl.com.

SCHOLL in logotip SCHOLL sta blagovni znamki skupine Reckitt Benckiser.

Sestavine: Urea, Water, Ethanol, Butylated Methacrylated Copolymer, Propylene Glycol. Distributer: ARC-Kranj, d.o.o., Hrastje 52k, 4000 Kranj, tel.št.: +386 4292 76 00. Kontakt za potrošnike: tel. št.: +386 1888 8349. Uporabno najmanj do konca: odtisnjeno na embalaži.



Reckitt Benckiser
Healthcare (UK) Ltd.,
Dansom Lane,
Hull HU8 7DS, U.K.



1ml e

