






Uporabite ta priročnik za spoznavanje svojega merilnika in upoštevajte korake v njem za začetek uporabe.

**POMEMBNO:** Preberite Priročnik za uporabnika, ki ste ga prejeli s sistemom.


## Ikone merilnika

-  Funkcija **Bluetooth®** vklopljena
-  Sinhronizacija
-  Rezultat preverjanja s kontrolno raztopino
-  Skoraj prazna baterija
-  Pike, ki prikazujejo napredek navigacije na zaslону

Za simbole in ikone merilnika ter njihove pomene glejte Priročnik za uporabnika.

Pokličite oddelek za stike s strankami LifeScan, od pon. do pet., od 8.00 do 16.00, na tel. št. 080 14 41.

Izdelovalec:  
LifeScan Europe GmbH  
Gubelstrasse 34  
6300 Zug  
Switzerland

 Glejte navodila za uporabo




**Lifescan**




OneTouch®  
AW 07202101A  
© 2018–2019 LifeScan, Inc.  
Datum revizije: 04/2019

**CE**  
0344

# 1 Nastavi merilnik

## Vklop merilnika

Pritisnite in držite tipko , dokler se ne prikaže zaslon Pozdravljeni.

S tipko  ali  uredite posamezne nastavitve in pritisnite  za potrditev.

## Nastavitev jezika

Označite zeleni jezik in pritisnite .

## Izbirno: Dokončajte nastavev mobilne aplikacije OneTouch Reveal®\*

Izberite **Da**, če želite, da vas aplikacija vodi skozi nastavev.




**Prenesite mobilno aplikacijo OneTouch Reveal®, preden seznanite svoj merilnik z mobilno napravo.**



## Nastavite uro

Pritisnite , če je ura pravilna, ali pa jo uredite in potrdite.


\*Obiščite <http://onetouch.medis-m.si>, če želite izvedeti več o mobilni aplikaciji OneTouch Reveal® in ugotoviti, ali je na voljo v vaši državi.

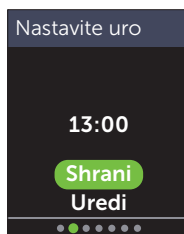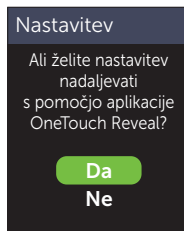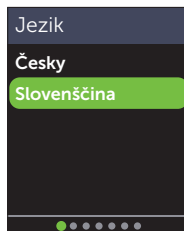


## Nastavite datum

Pritisnite , če je datum pravilen, ali pa ga uredite in potrdite.


## Nastavite omejitve razpona obrokov

Pritisnite , če sta omejitvi razponov Pred obrokom In Po obroku pravilni, ali pa ju uredite in potrdite.





## Nastavite sledilnik meritev

Pritisnite , če je prednastavljeni cilj pravilen, ali pa ga uredite in potrdite.

## Nastavite 90-dnevno ciljno povprečje

Pritisnite , če je 90-dnevno ciljno povprečje pravilno, ali pa ga uredite in potrdite.

**OPOMBA:** Z zdravstvenim strokovnjakom se posvetujte o pravih omejitvah razponov, dnevni ciljni meritvi in 90-dnevnem ciljnem povprečju.

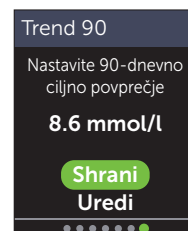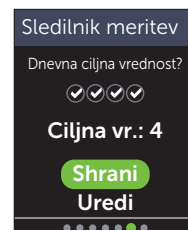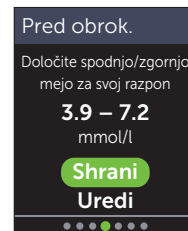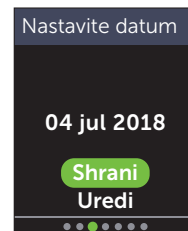

# 2 Opravite meritev

Pred vzorčenjem si umijte roki z milom in vodo, ju splaknite in osušite. Odstranite pokrov sprožilnika, nato pa vstavite sterilno lanceto. Zasukajte zaščitni pokrovček. Pokrovček namestite znova na sprožilnik.

Vstavite testni listič (in sicer tako, da so zlata stran in 2 srebrni nožici obrnjene proti vam), da vklopite merilnik.

Prilagodite nastavev globine vboda na sprožilniku. Napnite sprožilnik in ga trdno držite ob strani prsta. Pritisnite gumb za sprožitev. Nežno stisnite prst, da pridobite okroglo kapljico krvi.

Krvni vzorec nanesite na kanal na kateri koli strani testnega lističa. Ko se kanal napolni, se obarva rdeče in vaš rezultat bo prikazan v približno 5 sekundah.



Srebrni nožici



Odprtina za testni listič



Približna velikost




Nanesite kri

### 3 Ogled odčitka

#### Kazalnik razpona ColourSure® Dynamic

Kazalnik razpona ColourSure® Dynamic vas takoj obvesti, če je vaš odčitek pod (modra) ali nad (rdeča) omejitvami razpona oz. znotraj omejitve (zelena). Poleg tega pokaže, kdaj je vaš odčitek v bližini spodnje ali zgornje meje ciljnega razpona. Besedilna opomba ali čustveni simbol kaže na segment v barvni vrstici.

#### Primeri odčitkov

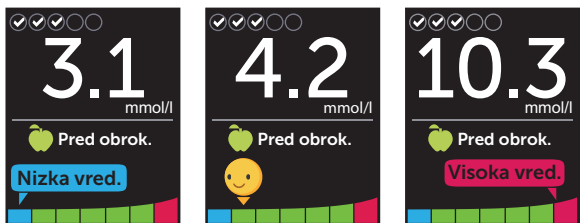


Pod razponom

Spodnja meja razpona

Nad razponom

#### Označevanje obrokov in dogodkov


Oznaka Pred obrokom (🍏) bo samodejno uporabljena za vaš rezultat. Svojo oznako obroka lahko spremenite v Po obroku (🍷) in dodate oznako dogodka.

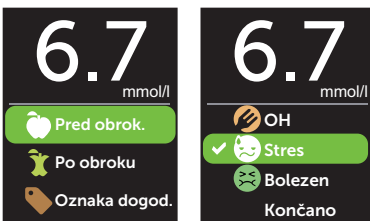

### Sporočila aplikacije Mentor za vrednosti krvnega sladkorja (Blood Sugar Mentor™)

Mentor za vrednosti krvnega sladkorja (Blood Sugar Mentor™) zagotavlja vpogled v vaše počutje in navodila za spremljanje sladkorne bolezni, vključno z izobraževalnimi in motivacijskimi sporočili, na podlagi vaših trenutnih in prejšnjih vrednostih glukoze in drugih spremljanih podatkov.

#### Primeri sporočil aplikacije Mentor za vrednosti krvnega sladkorja (Blood Sugar Mentor™)

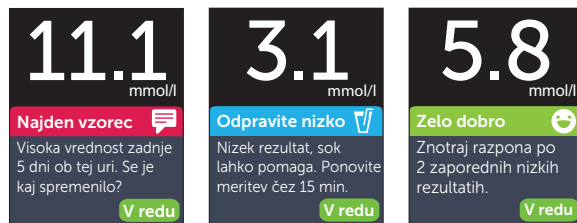

Vpogled

Navodila



Spodbujanje

Besedna znamka in logotipi **Bluetooth®** so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG Inc., kakršna koli uporaba teh znamk s strani družbe LifeScan Scotland Ltd. pa je licenčna. Druge blagovne znamke in tovarniške znamke so last njihovih lastnikov.

### 4 Poveži z mobilno napravo

Tehnologija **Bluetooth®** omogoča brezžično pošiljanje vaših odčitkov v mobilno napravo, v kateri lahko uporabite mobilno aplikacijo OneTouch Reveal® za pregled in ustvarjanje grafa vaših rezultatov, nastavite dnevne ciljne meritve, si ogledate sporočila aplikacije Mentor za vrednosti krvnega sladkorja (Blood Sugar Mentor™) in pridobite pomoč pri identifikaciji vzorcev.


V meniju Nastavitve označite **Bluetooth** in pritisnite **OK**.

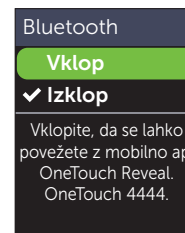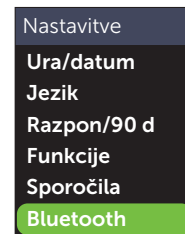

✓ zazna, ali je funkcija **Bluetooth®** trenutno nastavljena na Vkllop ali Izklop.

Pritisnite **↶** ali **↷**, da spremenite stanje funkcije **Bluetooth®** v Vkllop, in pritisnite **OK**.

Ko vas mobilna naprava pozove vnesite prikazano številko PIN.

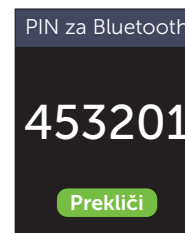

Primer številke PIN

# ONETOUCH

## Verio Reflect®

Sistem za merjenje ravni glukoze v krvi

## Vodnik za hitri začetek



AW 07202101A