

Navodila za uporabo ActiMaris® NASAL pršilo

1. Opis proizvoda

ActiMaris® NASAL pršilo je hipertonična, alkalno ionizirana raztopina morske soli (1,2% NaCl), natrijevega hipoklorita NaOCl (0,04%) in HOCl hipoklorove kisline (0,004%) in deluje na bio-fizični osnovi. Morska sol in natrijev hipoklorit ustvarjata protivnetni in protimikrobni učinek.

ActiMaris® NASAL pršilo vlaži in čisti sluznico in s svojo sestavo mineralov, soli in elementov v sledovih podpira fiziološko okolje na površini sluznic. Zaradi svoje hipertoničnosti / hiperosmolarnosti ima raztopina razbremenilni učinek, raztaplja naplastitve in nosne izločke ter olajša nosno dihanje. Zaradi čistilnega učinka in raztapljanja izločkov, ActiMaris® NASAL pršilo izboljšuje počutje in blaži značilne simptome zgoraj navedenih indikacij. ActiMaris® NASAL pršilo je prijazno do celic, s hitrim in protimikrobnim učinkom. Morska sol in natrijev hipoklorit sta naravna konzervansa in zagotavljata dolgo stabilnost ActiMaris® NASAL pršila.

ActiMaris® NASAL pršilo NE vsebuje:

- kortizona
- ksilometazolina
- alkohola
- antibiotikov

2. Področja uporabe / indikacije

ActiMaris® NASAL pršilo je primerno kot dodatek in podpora v primeru:

- rinitis / prehlad /
- pri okužbah z gripo
- akutno in kronično vnetje nosne sluznice (rinitis acuta et chronica)

- akutni in kronični rinosinusitis(vnetje nosu in sinusov) (rhinosinusitis acuta et chronica)
- rinitis medicamentosa(neželen učinek pri uporabi nekaterih nosnih dekongestivov, gre za kronično zamašen nos in okvarjeno nosno sluznico)
- alergijski rinitis- vnetje nosne sluznice (tudi preventivno)
- katastrofikcija / okužba srednjega ušesa
- pooperativna nega (po operacijah nosu in sinusov)
- preventiva proti odpornim mikrobov MRSA / VRE
- preprečevanje vnetja in zmanjševanje post-nosnega kapljanja v spodnjih dihalnih poteh

3. Navodila za uporabo in doziranje

Če glavo upognete nekoliko naprej, pršilo doseže srednji in spodnji nosni prehod. Na ta način dosežete večjo površino sluznice in tako je učinek boljši .

Odrasli in otroci od 2. leta dalje:
Priporočeni odmerek ActiMaris® NASAL pršila: 2 odmerka v vsako nosnico 4 - 5-krat na dan.

Lahko uporabljate tudi med nosečnostjo in dojenjem.

Otroci (mlajši od 2 let) in dojenčki:

1 - 2 odmerka v vsako nosnico 2 - 3 krat dnevno, kot je potrebno.

Ko vnašate ActiMaris® NASAL pršilo, dojenčkov in malčkov ne smete postavljati na hrbet, temveč na stran. Ob tem je potrebno glavo rahlo dvigniti. Pred uporabo proizvoda za dojenčke

in malčke se vedno posvetujte s svojim pediatrom.

Pri hujših endonasalnih okužbah in oblogah na sluznici lahko ActiMaris® NASAL pršilo kombiniramo z ActiMaris® gelom za rane 2 - 3 krat na dan. Pri priporočenem odmerjanju vsebnost 20 ml (100 µl na pršenje) zadostuje za terapijo od 7 do 10 dni (približno 200 pršenj). Pri uporabi ActiMaris® NASAL pršila predoziranje ni možno, niti ne obstaja kakršen koli sistemski učinek. Nosna raztopina se po stiku in reakciji s sluznico razgradi v vodo, sol in kisik. Na enak način odvisnost na nosno raztopino ni mogoča.

4. Tkivna toleranca in bio-kompatibilnost

ActiMaris® NASAL pršilo je primerno za dolgotrajno (> 24h) in večkratno uporabo pri razdraženih sluznicah in tkivih.

Toleranco in bio-kompatibilnost so dokazali tudi z večkratnimi aplikacijami. Aplikacija je skoraj neboleča in jo na splošno dobro prenašajo tudi alergični ljudje.

5. Neželeni učinki in kontraindikacije

Zaenkrat niso znani stranski učinki.

Kontraindikacije v primeru alergije na sestavine (zaenkrat še niso opazili).

6. Interakcije

Ob pravilni uporabi ni pričakovati nobenih interakcij - tudi s potrebnimi sistemskimi antibiotičnimi terapijami. Kombinacije zdravljenja z drugimi endonasalnimi pripravki niso potrebne ali priporočljive.

Zaradi varnostnih razlogov se posvetujte s svojim zdravnikom, če želite sistematično uporabljati druga zdravila v kombinaciji.

7. Splošni varnostni napotki

Hranite izven dosega otrok! Izogibajte se neposrednemu stiku z barvnimi tkaninami, saj lahko vsebuje vsebovani natrijev hipoklorit

oksidacijski ali belilni učinek! Po stiku z barvnimi tkaninami takoj sperite z vodo.

8. Sestavine in tehnični podatki

Voda, morska sol, natrijev hipoklorit.

Bistra, brezbarvna, alkalna in hipertonična raztopina morske soli z značilnim vonjem; vsebuje 1,2% morske soli (NaCl), 0,04% NaOCl in 0,004% HOCl.

9. Navodila za skladiščenje, rok uporabnosti, rok uporabe

ActiMaris® NASAL pršilo hranite pri sobni temperaturi med + 5 ° in + 25 ° C. Zaščitite proizvod pred neposrednimi sončnimi žarki in / ali toploto.

Rok uporabnosti je 30 mesecev. Veljavni rok uporabnosti je natisnjen na embalaži.

Po odprtju pršila je obdobje uporabe 3 mesece.

Proizvajalec:

ActiMaris AG
Sandgrube 29
9050 Appenzell (ŠVICIA)
info@actimaris.com

Telefon +41 71 505 75 25

Oznaka serije / številka serije

Številka naročila

Pozor, upoštevajte navodila za uporabo

Uporabno najmanj do

Navodila za shranjevanje (temperatura)

Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo

Proizvajalec

Informacije: 03/2020 - V1.1

Medicinski pripomoček: Razred I, CE

Distributer za Slovenijo:

Z PHARM d.o.o.

Dunajska cesta 181, 1000 Ljubljana

Tel.: 040 457 767

info@z-pharm.si

www.z-pharm.si