

Uporaba je prilagojena tako, da je raztopina z optimalno velikostjo delcev in prilagojeno jakostjo razprška enakomerno razpršena.

ActiMaris®

PREPROSTA, NARAVNA ZDRAVSTVENA REŠITEV

ActiMaris® ima več kot 10 let kliničnih izkušenj/študij. ActiMaris® je dosegel mejnik pri lokalni terapiji v primerih vnetij in okužb zgornjih in spodnjih dihalnih poti. Zaradi sestave in mehanizmov delovanja se lahko ActiMaris® nanese in uporablja tudi na poškodovani sluznici. ActiMaris® ni škodljiv za hrustanec in kosti.

ActiMaris® OROPHARYNX pršilo in ActiMaris® NASAL pršilo lahko uporabljate preventivno kot tudi za terapijo. Izdelka sta brez časovne omejitve uporabe, brez starostne omejitve (tako dojenčki kot tudi starejši), brez stranskih učinkov, brez interakcij in brez kontraindikacij. Resnično linija izdelkov za celo družino.

ActiMaris® čisti in pomirja sluznico. Ima vlažilni, razbremenilni, mukolitični in proti mikrobnim učinek. Podpira lokalne obrambne mehanizme ter pospešuje epitelizacijo in granulacijo v primeru poškodbe sluznice.

✓ 100% NARAVEN

✓ BREZ KONZERVANSOV

✓ NEODIŠAVLJEN

✓ ZA CELO DRUŽINO

✗
BREZ KORTIZONA

✗
BREZ KSILOMETAZOLINA

✗
BREZ ALKOHOLA

✗
BREZ ANTIBIOTIKOV


Primerno kot monoterapija in kot dodatna terapija.

Distributer za Slovenijo:

Z
PHARM

Z PHARM d.o.o.
Dunajska cesta 181
1000 Ljubljana
Tel.: 040 457 767
info@z-pharm.si
www.z-pharm.si

06.2020 – V1.1

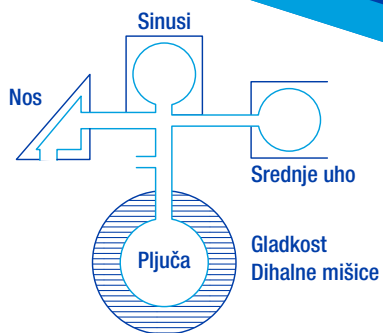

Področja uporabe ORL linije

Proizvajalec:

ActiMaris AG



natural medical solutions

ActiMaris AG
Sandgrube 29
9050 Appenzell
ŠVICA

Fon: +41 71 505 75 25
Fax: +41 71 505 75 24
www.actimaris.com
info@actimaris.com



ActiMaris®

Swiss Natural Health Care



ActiMaris®
Swiss NASAL Spray

ActiMaris®
Swiss OROPHARYNX Spray

Hipertonična, alkalno-ionizirana raztopina morske soli

ActiMaris® ORL linija

Pomemben dosežek kot lokalna terapija v primerih vnetij in okužb zgornje in spodnje (profilaksa) dihalne poti.

»Združene dihalne poti – ena pot, ena bolezen«

ActiMaris® NASAL pršilo

Učinkovit sistem s pršilko

ActiMaris® NASAL pršilo je hipertonična, alkalno ionizirana raztopina morske soli (1,2% NaCl), natrijevega hipoklorita NaOCl (0,04%) in HOCl hipoklorove kisline (0,004%) in deluje na bio-fizični osnovi. Morska sol in natrijev hipoklorit ustvarjata protivnetni in protimikrobni učinek.

ActiMaris® NASAL pršilo vlaži in čisti sluznico in s svojo sestavo mineralov, soli in elementov v sledovih podpira fiziološko okolje na površini sluznic. Zaradi svoje hipertoničnosti/hiperosmolarnosti ima raztopina razbremenilni učinek, raztaplja naplavitve in nosne izločke ter olajša nosno dihanje. Zaradi čistilnega učinka in raztapljanja izločkov, ActiMaris® NASAL pršilo izboljšuje počutje in blaži značilne simptome zgoraj navedenih indikacij. ActiMaris® NASAL pršilo je prijazno do celic, s hitrim in protimikrobnim učinkom.

- ✓ Za rinitise in prehlade
- ✓ Za nosne in obnosne sinusitise
- ✓ Čisti in vlaži nosno sluznico
- ✓ Ima dekongestivni, osvabljajoč in proti mikrobnim učinek



Sestava:

Voda, morska sol, natrijev hipoklorit.

Pakiranje: 20 ml (artikel 33020)

ActiMaris® NASAL pršilo je primerno kot dodatek in podpora v primeru:

- rinitis / prehlad
- pri okužbah z gripo
- akutno in kronično vnetje nosne sluznice (rinitis acuta et chronica)
- akutni in kronični rinosinusitis (vnetje nosu in sinusov) (rhinosinusitis acuta et chronica)
- rinitis medicamentosa (neželen učinek pri uporabi nekaterih nosnih dekongestivov, gre za kronično zamašen nos in okvarjeno nosno sluznico)
- alergijski rinitis- vnetje nosne sluznice (tudi preventivno)
- katastrofija / okužba srednjega ušesa
- pooperativna nega (po operacijah nosu in sinusov)
- preventiva proti odpornim mikrobov MRSA / VRE
- preprečevanje vnetja in zmanjševanje post-nosnega kapljanja v spodnjih dihalnih poteh (reduziert Postnasal Drip)

ActiMaris® gel za rane

V primerih vnetij in okužb nanosite gel v ušesni kanal in na uhelj.



artikel 30220

ActiMaris® OROPHARYNX pršilo

Učinkovito in hitro olajšanje

ActiMaris® OROPHARYNX pršilo je hipertonična, alkalno ionizirana raztopina morske soli (3,0% NaCl) in natrijevega hipoklorita NaOCl (0,2%) in je učinkovito na bio-fizični osnovi. Morska sol in natrijev hipoklorit imata protivnetni in protimikrobni učinek.

ActiMaris® OROPHARYNX pršilo vlaži in čisti sluznico in s svojo sestavo mineralov, soli in elementov v sledovih ustvarja tudi fiziološko okolje na površini sluznice. Zaradi svoje hipertoničnosti/hiperosmolarnosti ima raztopina razbremenilni učinek, raztaplja naplavitve in ustne/žrelne izločke in na ta način zmanjša vnetno reakcijo sluznice. Zaradi čistilnega učinka in raztapljanja izločkov, blaži težave pri požiranju. ActiMaris® OROPHARYNX pršilo je prijazno do celic, hitro in protimikrobno učinkovito.



Sestava:

Voda, morska sol, natrijev hipoklorit.

Pakiranje: 50 ml (artikel 33150)



- ✓ Za vnete dlesni in sluznice
- ✓ Za težko požiranje in bolečine v grlu
- ✓ Za slab zadah in hripavost
- ✓ Čisti in vlaži sluznico
- ✓ Ima razbremenilni, analgetični in protimikrobni učinek

ActiMaris® OROPHARYNX pršilo lahko uporabljamo preventivno in terapevtsko pri vnetjih in okužbah ustne votline oz. žrela in grla, kot so:

- Vnetje ust, ustnic (stomatitis), dlesni, afte
- Po zobozdravstvenih operacijah
- Glossitis / mukozitis vnetje jezika in ustne votline
- Tonzilitis / tonzilofaringitis vnetje nebnic in žrelnice-angina
- Suho gnojno vnetje žrela (pharyngitis granularis sicca)
- Posteriorni laringitis (nastane zaradi draženja zadnjega dela grla pri refluksni bolezni)
- Akutno in kronično vnetje grla (laringitis acuta et chronica)
- Slab zadah (halitoza)
- Pooperativni (po kirurških posegih v predelu ust/grla)
- Preventiva proti odpornim mikrobov MRSA / VRE