



NE VDIHajte ko pršite

ker se kihanje, solzenje
in prehodni pekoč občutek,
ki so normalni in spremljajo
edinstven mehanizem
delovanja lahko okrepijo

PROSIMO PREEBRITE
NAVODILO PREDEN
UPORABITE NASODREN.

NASODREN pršilo za nos

DRENIRA SLUZ IN OČISTI NOS TER SINUSE

NAVODILO ZA UPORABO

Opis izdelka

Nasodren pršilo za nos je vodna raztopina pripravljena iz naravnega izvlečka korenike ciklame *Cyclamen europaeum* L. Izdelku niso dodane nobene druge sestavine ali konzervansi.

Vsebina – vsako pakiranje NASODREna vsebuje:

- 1 steklenička vsebuje 50 mg liofiliziranega praška izvlečka ciklame.
- 1 plastenka vsebuje 5 ml prečiščene vode.
- 1 pršilko za nos.

Namen uporabe izdelka

Nasodren pršilo za nos se uporablja za drenažo sluzi in čiščenje nosu ter sinusov.

Previdnosti ukrepi pred uporabo pršila za nos

V primeru, da jemljete antikoagulate in/ali antiholinergike, ne uporabljajte pršila Nasodren brez posveta z zdravnikom.

Nasodren pršilo za nos enkrat dnevno popršimo v vsako nosnico. Priporočamo, da ga popršite ob približno istem času dneva, priporočamo dve uri pred spanjem.

Uporaba več kot enkrat dnevno ni priporočljiva in ne poveča delovanja pršila.

Pršilo uporabljajte 7-10 dni, lahko pa uporabo podaljšate na 14 dni, če je to potrebno. Potem lahko izdelek uporabite le, če naredite 7-10 dnevni premor pri uporabi.


Nasodren pršilo za nos lahko uporabljajo le odrasli in otroci starejši od 5 let. Uporabo pri otrocih morate nadzorovati.

Ne uporabljajte pršila Nasodren, če ste alergični (preobčutljivi) na ciklamo, trobentico in druge primule.

Navodilo za uporabo

Nasodren je namenjen samo uporabi v vašem nosu.

Sledite navodilom in spodnjim slikam, da zmešate sestavine medicinskega pripomočka, preden jih pršite v nosnico.

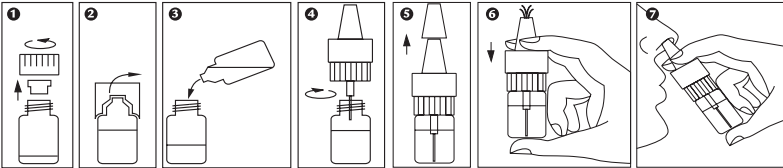

Kako pripravimo raztopino?

1. Držite stekleničko, ki vsebuje prašek v navpičnem položaju. Odprite jo z vrtenjem pokročka v nasprotni smeri urinega kazalca in ga odstranite.
2. Odprite plastično ampulo z vodo tako, da odlomite zgornji del.
3. Vso tekočino prelijte v stekleničko, ki vsebuje prašek.
4. Privijte nastavek pršila na stekleničko in jo rahlo stresajte, dokler se prašek popolnoma ne raztopi. Počakajte, da vsa pena izgine.
5. Odstranite pokrovček z nastavka pršila.
6. Pred prvo uporabo v nosu, pritisnite nastavek 2-3 krat popršite v prazno, stran od telesa. Pri tem se izogibajte kontaktu s sluznico oči.



Kako pršimo Nasodren?

7. Glavo držite v pokončnem položaju, brez nagibanja naprej ali nazaj. Vstavite nastavek pršila v desno nosnico. Globoko vdihnite in zadržite dih za kratek čas (3-5 sekund). Popršite raztopino v desno nosnico tako, da pritisnete nastavek samo enkrat. Enkrat globoko izdihnite skozi usta in potem dihaite normalno. Ne dihaite medtem, ko pršite pripravek.
8. Ponovite postopek z levo nosnico, tako kot je opisano pod točko 7.
9. Po uporabi očistite nastavek pršila s čistim papirnim robčkom. Namestite zaščitni pokrovček na pršilni nastavek.

Previdnostni ukrepi pri uporabi izdelka

Posvetujte se z zdravnikom, če po 10 dneh uporabe niste opazili nobenega izboljšanja simptomov ali če se poslabšajo po petih dneh.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, v primeru, da se pojavijo katerikoli neželeni učinki ali se pojavi kaj nepričakovanega in ni napisano v navodilih za uporabo.

Vprašajte vašega farmacevta, če potrebujete več informacij o izdelku.

Priporočamo, da dve uri po uporabi pršila ne vozite avtomobila in ne upravljajte s stroji. Bolje je, če pršilo uporabite dve ure pred spanjem.

Pomembne informacije

Lahko se pojavi kratkotrajen blag občutek prehodnega srbenja, pekočega občutka, kihanja, solzenja in povečanega nosnega izcedka nekaj minut po aplikaciji. Vsi ti občutki so normalni in kažejo na to, da je pripravek začel delovati. Kljub temu, da lahko povzročijo nekaj nelagodja za kratek čas, to niso nepričakovane reakcije. Lahko se pojavi tudi rožnato obarvan izloček iz nosu, kar ne sme biti vzrok za zaskrbljenost.

Priporočamo, da pripravek vzamete iz hladilnika 2-3 minute pred uporabo, da bi tako zmanjšali intenzivnost omenjenih neželenih učinkov, ki so lahko delno posledica nizke temperature. Takoj po uporabi izdelek ponovno shranite v hladilnik.

Ne inhalirajte in ne vdihujte med pršenjem izdelka v nosnico, ker to lahko povzroči, da so omenjeni neželeni učinki bolj izraziti in trajajo dlje.

Ostali priporočeni previdnostni ukrepi:

V primeru, da pride do nehotenega prekomernega odmerjanja ali ponovitve pršenja priporočamo spiranje ali namakanje nosne votline s toplo vodo skozi nosnici. Uporabno je lahko tudi grgranje tople vode.

Če pozabite uporabiti Nasodren en ali več dni, ne skrbite, uporabo izdelka lahko nadaljšate za dan ali dva. Ne pršite izdelka v nos več kot enkrat dnevno, da bi tako nadomestili izpušeni odmerek.

Če prenehate z uporabo Nasodrena prej kot je priporočeno, potem pričakovanih rezultatov verjetno ne boste dosegli. Ne uporabljajte Nasodrena več kot 10-14 dni.

Kljub temu, da se Nasodren ne absorbira skozi nos priporočamo, da se v primeru jemanja zdravil na recept o uporabi posvetujete z zdravnikom ali farmacevtom.

V primeru, da uporabljate še drug izdelek za uporabo v nosu, morate med uporabo posameznega izdelka počakati 2 uri.

Če ste noseči ali dojite:

Vprašajte za nasvet vašega zdravnika ali farmacevta preden uporabite Nasodren.

Na voljo ni nobenih izkušenj o uporabi Nasodrena med nosečnostjo in dojenjem. Zato se Nasodren v nosečnosti ali v času dojenja ne sme uporabljati, ne da bi vam to priporočil zdravnik.

Shranjevanje

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Originalno pakiranje hranite zaščiteno pred svetlobo, pri temperaturi do 25 °C.

Ko raztopino pripravite, morate NASODREN hraniti v hladilniku, pri temperaturi 2-8 °C, zaščiteno pred svetlobo.

Rok uporabe izdelka je odtisnjen na škatlici, steklenički s praškom in plastenki z vodo. Ne uporabljajte po preteku datuma, ki je natisnjen na ovojnini.

Ne uporabljajte več kot 16 dni po pripravi raztopine.

CE lastnik in proizvajalec: Hartington Pharma Ltd., 1 Northumberland Ave., Trafalgar Square, London, Velika Britanija

Distributer: Hartington Pharma Ltd., 1 Northumberland Ave., Trafalgar Square, London, Velika Britanija

Zastopnik in distributer za Slovenijo: Top Pharma d.o.o., Potok pri Komendi, SI-1218 Komenda, www.toppharma.si, e-pošta: info@toppharma.si

Za kakršnokoli informacijo o izdelku se, prosimo, obrnite na distributerja.

Vključen je v Evropskih smernicah EPOS.

Nasodren je medicinski pripomoček razreda I po EU Direktivi 93/42/ECC.

Pripravljeno: maj 2015


L3GB

