

ViruProtect

STADA

pršilo proti navadnemu prehladu

OPIS PRIPOMOČKA

ViruProtect STADA je pršilo za usta proti navadnemu prehladu. Je enostaven za uporabo in začne hitro delovati. ViruProtect STADA prekrije sluznico v ustni votlini in ustvari zaščitno bariero pred virusi navadnega prehlada. Bariera ujame viruse navadnega prehlada, jih deaktivira in jim prepreči širjenje ter razmnoževanje.

INDIKACIJA

Za uporabo pri izpostavljenosti virusom prehlada ali zgodaj ob pojavu simptomov prehlada. ViruProtect STADA je primeren za odrasle in otroke, starejše od 4 let.

NAMEN UPORABE

Zdravljenje in lajšanje navadnega prehlada.

KLINIČNE KORISTI

- ViruProtect STADA ščiti pred virusi navadnega prehlada.
- ViruProtect STADA lahko pomaga skrajšati trajanje navadnega prehlada, če se ga uporabi v zgodnji fazi okužbe.
- ViruProtect STADA lajša simptome navadnega prehlada in blaži boleče grlo.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- Ne uporabljajte izdelka ViruProtect STADA, če ste preobčutljivi/alergični na katerikoli sestavino.
- Izdelka ne uporabljajte med nosečnostjo ali dojenjem, saj klinični podatki niso na voljo.
- Brez posveta z zdravnikom izdelka ne uporabljajte po kirurških posegih v ustih in/ali grlu dokler se rane ne zacelijo.
- Pri uporabi pršila ne vdihavajte, saj lahko povzroči draženje dihalnih poti, kar vodi v kašelj in hripavost.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom, da se izognete nezgodam z majhnimi delci.
- Če imate povišano telesno temperaturo ali če so vaši simptomi hujši kot pri običajnem navadnem prehladu, se posvetujte z zdravnikom, saj so le-ti lahko posledica česa drugega.
- Da se prepreči širjenje bolezni, naj izdelek uporablja le en uporabnik.

KONTRAINDIKACIJE

- Ni znanih kontraindikacij.

MOŽNI NEŽELENI UČINKI

- Ni znanih neželenih učinkov.

Če med uporabo izdelka ViruProtect STADA opazite nepričakovane učinke, se obrnite na zdravnika za nasvet.

NAVODILA ZA UPORABO

Kdaj uporabljati

Z uporabo izdelka ViruProtect STADA začnite ob morebitni izpostavljenosti virusom navadnega prehlada ali čim prej, ko opazite simptome navadnega prehlada. Z uporabo izdelka ViruProtect STADA nadaljujte, dokler se simptomi ne olajšajo.

Kako uporabljati

1. Odprite usta in nastavek (šobo) usmerite proti grlu (slika 1).
2. Prtisnite na pršilko in 2-krat razpršite (en odmerek) vsako drugo uro do 6-krat na dan v času, ko ste izpostavljeni virusu prehlada.



Slika 1

KAKO DELUJE

ViruProtect STADA vsebuje dve glavni sestavini, glicerol in tripsin iz trske, ki skupaj zagotavljata učinkovito bariero, ki deluje na tri načine:

Ujame: Glicerol ustvari osmotsko aktivno prehodno bariero, ki ujame viruse.

Deaktivira: Tripsin zavira zmoglost virusov za vezavo in deaktivira njihovo zmoglost okužbe celic.

Ščiti: Bariera izdelka ViruProtect STADA ščiti ustno votlino in grlo.



UJAME



DEAKTIVIRA



ŠČITI

ViruProtect STADA JE NA VOLJO V NASLEDNJEM PAKIRANJU:

- ViruProtect STADA 20 ml

PAKIRANJE IZDELKA ViruProtect STADA VSEBUJE:

- Pršilo za usta, ki ga sestavljajo plastenka, pršilka, nastavek (šoba) in zaščitni pokrov.
- Raztopina izdelka ViruProtect STADA vsebuje glicerol, vodo, naravni encim - tripsin iz trske, etanol (< 1 %), kalcijev klorid, trometamol in mentol. Raztopina je brez sladkorja in ne vsebuje konzervansov, glutena ali laktoze.
- To navodilo za uporabo.

RAVNANJE IN SHRANJEVANJE

- Uporabite pred iztekom roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki in škatlici.
- Shranjujte pri temperaturi 25 °C ali manj.
- Neuporabljen izdelek vrnite v lekarno.

POMEN SIMBOLOV



Preglej navodila za uporabo!



Zgornja omejitev temperature



Uporabno do



Številka serije



Referenčna številka



Proizvajalec



Pozor! Preglej navodila za uporabo!

Kontakt za Slovenijo:
Stada d.o.o.
Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana



PROIZVAJALEC
Enzymatica AB
IDEON Science Park
SE-223 70 Lund, Švedska
www.enzymatica.com

Več informacij na www.stada.si

 ColdZyme®



101026 ViruProtect STADA 20 ml

MEDICINSKI
PRIPOMOČEK

9297214
2008
HR/SI
L001CS-01

CE
0477

STADA