


dexcomG6

KRATKA NAVODILA PRED PRVO UPORABO

Nastavitev

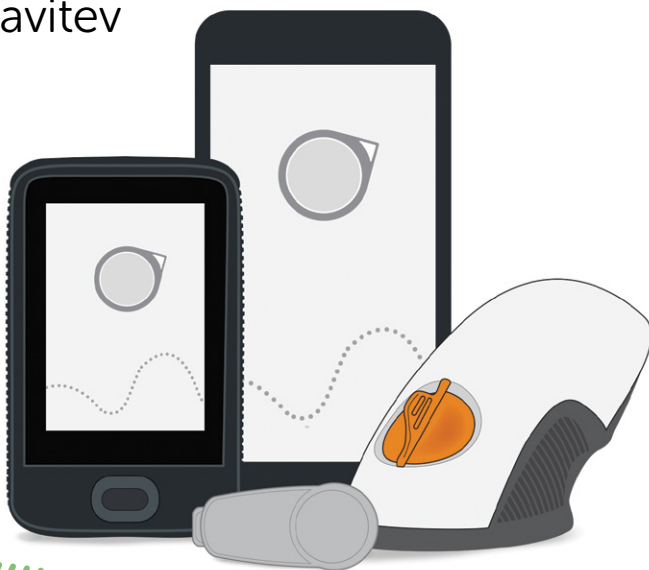

Navodila za uporabo

Pregled izdelka Dexcom G6 NMG (G6)

Naprava za prikaz

- Prikazuje informacije o ravni glukoze.
- Nastavite svojo pametno napravo, sprejemnik Dexcom ali oboje.
- Za seznam trenutno združljivih pametnih naprav in operacijskih sistemov obiščite: dexcom.com/compatibility.
- Aplikacija G6 in sprejemnik sta združljiva z vsemi sistemi G6.

Vaša pametna naprava




Sprejemnik Dexcom




Aplikator z vgrajenim senzorjem

- Z aplikatorjem senzor vstavimo pod kožo.
- Senzor zazna raven glukoze.

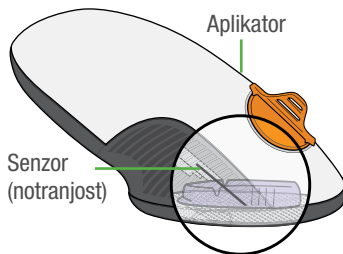

Oddajnik

- Pošilja informacije iz senzorja v napravo za prikaz.

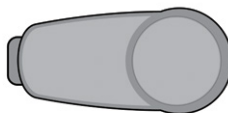

Vse slike so samo za ponazoritev. Vaš izdelek se lahko razlikuje od tistega na sliki.

Pred uporabo izdelka G6 preberite izjavo o varnosti v *2. poglavju z naslovom Uporaba naprave G6*.

Namen uporabe

G6 odčitke glukoze iz senzorja G6 (odčitki G6) pošlje v vašo napravo za prikaz.



Izberite aplikacijo, sprejemnik ali oboje

Sprejemnik je namenski medicinski pripomoček. Vaša pametna naprava pa to ni, čeprav lahko na njej uporabljate aplikacijo G6. Vaša pametna naprava ni namenski medicinski pripomoček, saj lahko aplikacija zgreši alarm/opozorilo samo zato, ker je nameščena na pametni napravi, na primer zaradi nastavitve pametne naprave, izklopa pametne naprave ali aplikacije, prazne baterije itd.

Za nastavitev aplikacije, sprejemnika ali obojega uporabite spodnje zavihke

Želite nastaviti aplikacijo in sprejemnik? Najprej izberite enega in odprite ustrezen zavihek. Zadnji korak opisuje, kako nastaviti drugo napravo za prikaz. Ne uporabljajte obeh zavihkov hkrati.

Če želite izvedeti več o drugih načinih nastavitve vašega G6:


- Video za pomoč najdete na spletni strani: dexcom.com/downloadsandguides.
- Stopite v stik z lokalnim predstavnikom družbe Dexcom.




Vaša pametna naprava




Sprejemnik Dexcom

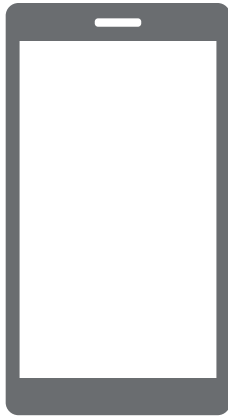

Vaša pametna naprava

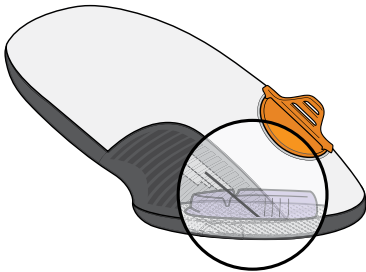

Aplikator z vgrajenim
senzorjem

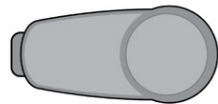

Oddajnik

Nastavitev aplikacije

- Vnesite svojo serijsko številko:

s škatle oddajnika



ali

z zadnje strani oddajnika



Ko vnesete serijsko številko, G6 začne z iskanjem oddajnika. Med iskanjem z G6 ne boste prejeli odčitkov ali alarmov/opozoril.

- 2** Vidite časovnik ogrevanja senzorja modre barve?
To pomeni, da se vaš senzor navaja na vaše telo.


Med ogrevanjem:

- Ni odčitkov G6, alarmov ali opozoril.
- Pametna naprava mora biti od oddajnika oddaljena največ 6 metrov.



C Počakajte dve uri


- Ko je ogrevanje senzorja končano, pritisnite **V redu**, da se vrnete na domači zaslon.
- Zdaj so na voljo odčitki merilnika G6, alarmi in opozorila.

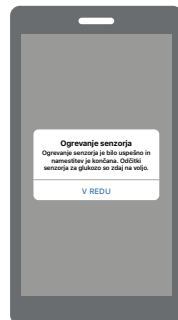

2. korak: Preberite Uporaba naprave G6

Naučite se, kako:

- prebrati odčitke z domačega zaslona
- uporabljati alarme in opozorila
- sprejemati odločitve o zdravljenju
- odpravljati težave

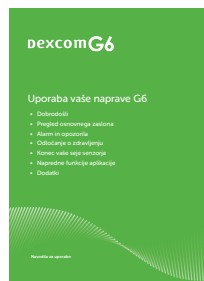


3. korak: Izbirno – nastavite sprejemnik


Vklopite sprejemnik tako, da pritisnete gumb za vklop za 2–3 sekunde. Nato sledite navodilom na zaslonu.

Ne uporabljajte zavihka Nastavitve sprejemnika. Opisani koraki so namenjeni nastavitvi sprejemnika pred nastavitvijo aplikacije.




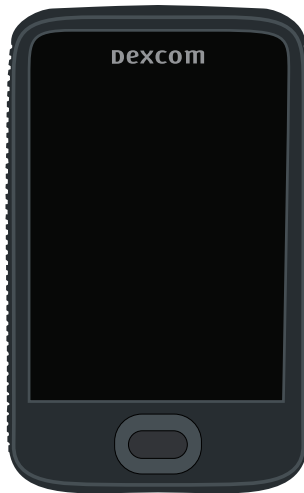

Sprejemnik

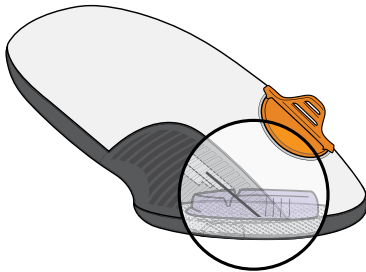

Aplikator z vgrajenim
senzorjem

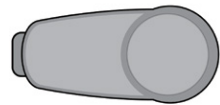

Oddajnik

Nastavitev sprejemnika

1. korak: Nastavitev sprejemnika

A Sprejemnik vzemite iz škatle




B Vklonite sprejemnik

Pritisnite gumb za vklop
za 2–3 sekunde.



C Sledite navodilom na zaslonu

- 1 Ko vas sistem opozori, vnesite:
 - Koda senzorja z aplikatorja senzorja, ki ga boste vstavili
 - Ne najdete kode senzorja?
Preberite *Uporaba naprave G6, Dodatek A, Odpravljanje težav.*

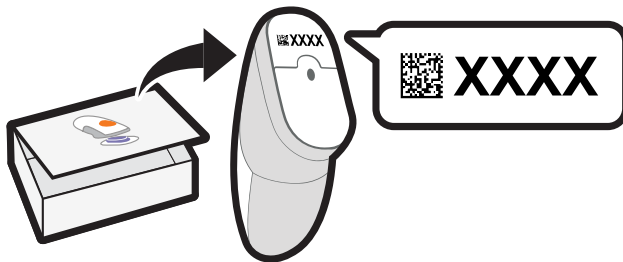

- Serijsko številko, ki jo najdete na:

škatli oddajnika




ali

zadnji strani oddajnika



Ko vnesete serijsko številko, G6 začne z iskanjem oddajnika. Med iskanjem z G6 ne boste prejeli odčitkov ali alarmov/opozoril.


- 2** Ta korak je končan, ko na zaslonu vidite naslednje:

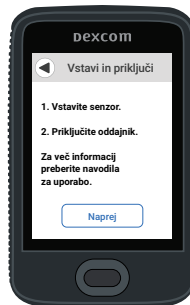


2. korak: Z uporabo aplikatorja vstavite vgrajeni senzor

A Aplikator z vgrajenim senzorjem vzemite iz škatle senzorja

Potrebni pripomočki: aplikator (s kodo, ki ste jo ravnokar vnesli), oddajnik in robčki.

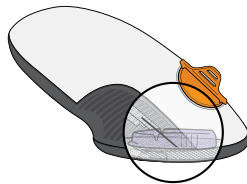


B Izberite mesto za namestitev senzorja

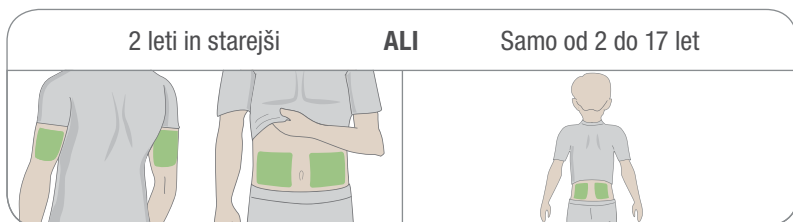


Izogibajte se področjem nad kostmi, razdraženi koži, tetovažam in območjem, ki so večkrat izpostavljeni udarcem.

C Z aplikatorjem vstavite vgrajeni senzor


1 Vzemite aplikator senzorja in alkoholni robček.

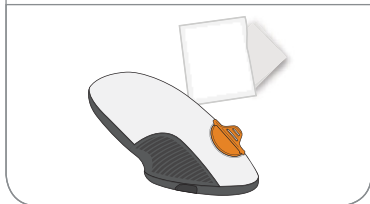


2 Umijte in posušite si roke.

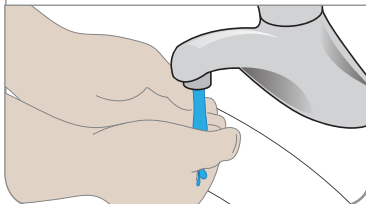


3 Mesto namestitve senzorja očistite z alkoholnim robčkom.

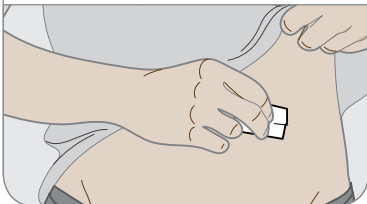


4 Odstranite nalepki. Ne dotikajte se lepila.

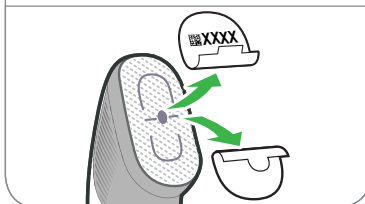


5 Aplikator namestite na izbrano mesto.

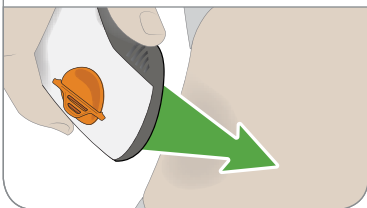


6 Prepognite in odlomite varnostni jeziček.

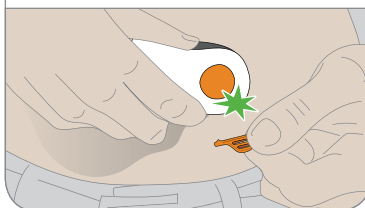


7 Pritisnite gumb za vstavev senzorja.

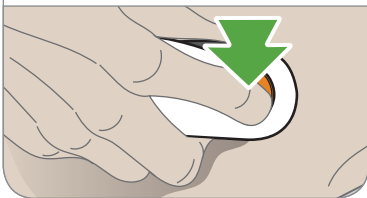

8 Aplikator s kože odstranite tako, da na koži ostaneta obliž in držalo.


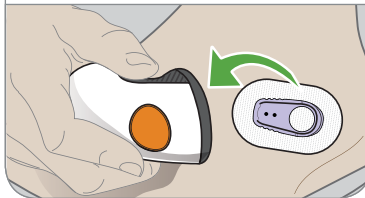


9 Aplikator zavržite. Pri odstranjevanju sestavnih delov, ki pridejo v stik s krvjo, upoštevajte lokalne smernice.

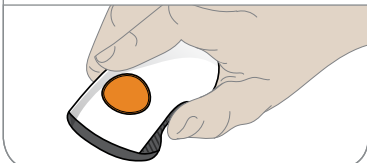


3. korak: Priključite oddajnik

A Oddajnik vzemite iz škatle

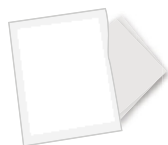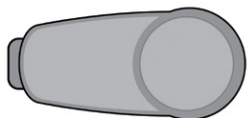


B Pritrdite oddajnik tako, da se zaskoči na mestu


1 Oddajnik očistite z alkoholnim robčkom.

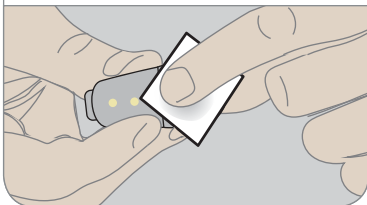


2 Oddajnik, obrnjen z začetnim delom naprej, vstavite v držalo.

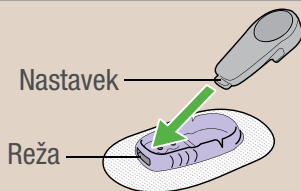

3 Pritrdite oddajnik tako, da se zaskoči na svoje mesto. Zaslišati morate klik. Preverite, ali je oddajnik dobro pritrjen in nameščen v ravni liniji s površino.

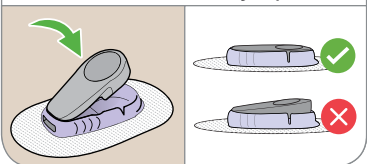

4 S prstom trikrat podrgnite po obližu.

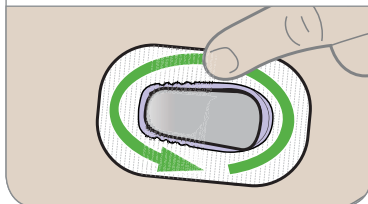

4. korak: Zagon senzorja na sprejemniku

A Počakajte največ 30 minut, da je seznanjanje končano


Med seznanjanjem:

- Ni odčitkov G6, alarmov ali opozoril.
- Sprejemnik mora biti od oddajnika oddaljen največ 6 metrov.



B Pritisnite Zaženi senzor za začetek ogrevanja senzorja

Med ogrevanjem ni odčitkov G6, alarmov ali opozoril

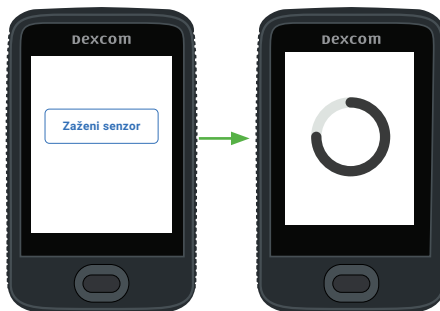

C Počakajte


- Ko je ogrevanje končano, pritisnite **Naprej**, da se vrnete na domači zaslon.
- Zdaj so na voljo odčitki merilnika G6, alarmi in opozorila.



5. korak: Preberite si Uporaba naprave G6

Naučite se, kako:

- prebrati odčitke z domačega zaslona
- uporabljati alarme in opozorila
- sprejemati odločitve o zdravljenju
- odpravljati težave

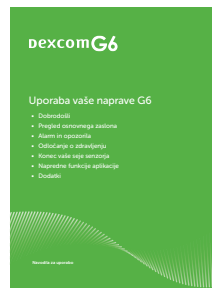

6. korak: Izbirno – nastavite aplikacijo

Prenesite aplikacijo na svojo pametno napravo in jo zaženite. Nato sledite navodilom na zaslonu.

Ne uporabljajte zavihka Nastavitve aplikacije. Opisani koraki so namenjeni nastavitvi aplikacije pred nastavitvijo sprejemnika.



Dexcom

© 2019 Dexcom, Inc. Vse pravice pridržane.

Zajeto v patentih dexcom.com/patents.

Dexcom, Dexcom Share, Dexcom Care, Dexcom Clarity in Share so registrirane blagovne znamke družbe Dexcom, Inc. v Združenih državah Amerike in so lahko prisotne v drugih državah.

Dexcom



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA

+1.858.200.0200
dexcom.com

Za uporabnike zunaj ZDA: Stopite v stik
z lokalnim predstavnikom družbe Dexcom.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

