

IALUXID

GEL

Indikacije: Nanesen gel na prizadeti koži tvori zaščitno plast pred zunanji povzročitelji in okužbo tudi preprečuje. Sestava IALUXID GEL -a vpliva na mikrookolje prizadete kože, zato se uporablja pri aknah (mozoljavosti), folikulitisu (gnojnem vnetju lasnega mešička), paronihiji (zanohtnici), impetigo (krastavosti) in molluscum contagiosum (moluskih).







Navodila za uporabo: Pred uporabo izdelka si temeljito umijte roke in očistite kožo; uporabite potrebno količino gela, da enakomerno prekrijete prizadeto mesto. Po potrebi gel nanesite večkrat dnevno.

Sestava: voda, vodikov peroksid, karbomer, ksantan gumi, hidroksietil akrilat/kopolimer natrijevega akriloidimetil taurata, skvalen, glicin, natrijev hialuronat, polisorbitat 60, oksikvinolin sulfat.

Samo za zunanjo uporabo. Ne sme priti v stik z očmi.

Kontraindikacije, previdnostni ukrepi in opozorila: IALUXID GEL je kontraindiciran pri uporabi pri znano predhodno preobčutljivostjo za katerokoli od sestavin. Če izdelek pride v stik z očmi, takoj izpirajte z obilno količino mrzle vode. Ne uporabljajte na ranah z neodstranjenimi šivi. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Shranjujte pri temperaturi od 5 °C do 25 °C, zaščiteno pred neposredno vročino. Po uporabi zaprite tubo. Rok uporabe se nanaša na nepoškodovan in pravilno hranjen izdelek.

Neželeni učinki: Uporabniki gel dobro prenašajo, kljub temu se po nanosu lahko pojavita pekoč občutek in blaga rdečica. Pri okuženih ranah se posvetujte z zdravnikom zaradi dodatnega lokalnega ali sistemskega antibiotskega zdravljenja. Ob neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

	Shranjujte pri temperaturi od 5 °C do 25 °C
	Serijska številka
	Rok uporabe
	CE oznaka izdana od priglašene organa 0476
	Pred uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo
	Proizvajalec

CE 0476

 BMG Pharma S.r.l.,
Via F. Confalonieri 29, 20124 Milano, Italija

Distributer: DR. GORKIČ d.o.o.
Obrtiška 11, 1370 Logatec, Slovenija

 Dr. Gorkič

 BMG
PHARMA
HI CARE,
HELLO
LIFE.

Rev0, oktober 2014