


# Physiodose

## nosni aspirator na vdih

- 1 nastavek za nos
- 2 vata
- 3 lovilec sluzi
- 4 cevni nastavek
- 5 cevka
- 6 ustnik

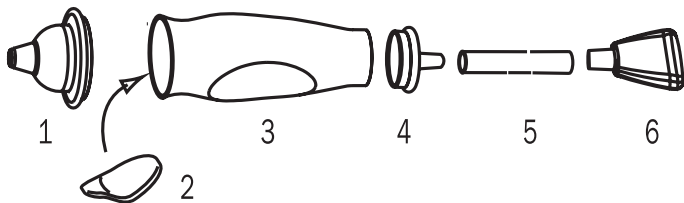

### Zakaj je priporočljivo uporabljati nosni aspirator za dojenčke?

Dojenčki do prvega leta starosti dihajo samo skozi nos in niso sposobni sami izpihati sluzi. Izločena sluz v nosku dojenčku otežuje dihanje. Z nosnim aspiratorjem na vdih boste lahko otroku pomagali odstraniti sluz iz noska. Očiščene in prehodne nosnice omogočijo dojenčku miren spanec in lažje dojenje.

### UPORABA

#### Sestava nosnega aspiratorja

1. Umijte si roke.
2. Sestavite nosni aspirator na vdih po zgornjih shematskih navodilih.
3. Vstavite kos vate med lovilec sluzi in nastavek na nos.

## Priprava

- Otroka položite na previjalno mizo in mu podložite glavo.
- Vstavite ustnik v usta in ga nežno stisnite med zobmi.
- Namestite nosni nastavek v otrokovo nosnico.
- Z vdihom nežno posesajte sluz v lovilec sluzi.
- Postopek po potrebi večkrat ponovite.
- Postopek ponovite z drugo nosnico.

Predhodno izpiranje nosnice s fiziološko raztopino olajša izločanje in sesanje sluzi iz nosa.

## Čiščenje nosnega aspiratorja

- Po vsaki uporabi razstavite nosni aspirator. Operite s toplo vodo in milnico.
- Nosni aspirator pospravite v škatlico.
- Pred uporabo lahko nastavek za nos hladno sterilizirate ali sterilizirate nad paro. Prekuhanje ni dovoljeno.

## Pred prvo uporabo

- Nastavek za nos razstavite in očistite v topli milnici. Sperite pod tekočo vodo.
- Nastavek za nos hladno sterilizirajte ali sterilizirajte nad paro (uporabite lahko tudi mikrovalovni parni sterilizator).

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Proizvajalec: Lab. GILBERT, 14204 Herouville Saint-Clair, FRA

Uvoznik: DR. GORKIČ d.o.o., Obrtniška ulica 11, 1370 Logatec, SLO; [www.physiodose.si](http://www.physiodose.si)

