

Physiodose®

Sterilna fiziološka raztopina

Physiodose je sterilna fiziološka raztopina brez konzervansov. Shranjena je v plastenkah za enkratno uporabo in je varna, higienska in enostavna za uporabo. Ni za injiciranje.

SESTAVA:

natrijev klorid; 0,9 g,
prečiščena voda; do 100 ml


INDIKACIJE:

Raztopina Physiodose je namenjena dojenčkom, otrokom in odraslim:

- za higieno nosu
- za higieno oči
- za izpiranje ušes
- za čiščenje ran
- za redčenje inhalacijskih proizvodov

NAČIN UPORABE:

Ne uporabljajte iste plastenke za različne namene. Za odprtje plastenke krožno zavrtite pokrovček. Platenko lahko zaprete z narobe obrnjenim pokrovčkom.

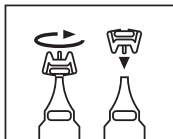

ZA HIGIENO NOSU

Raztopina Physiodose je primerna za čiščenje in izpiranje suhega ali zamašenega nosu. Uporabite po potrebi, 1- do 6-krat na dan.

Navodilo za uporabo: Nagnite glavo nazaj, konico odprte plastenke vstavite v nosnico in jo nežno stisnite. Enako ponovite pri drugi nosnici. Dvignite glavo, da sluz izteče, in obrišite odvečno raztopino. 10 minut po izpiranju ne smete močno pihati iz nosu. Pri dojenčkih raztopino v nosnico nežno nakapajte, da se izognete možnosti okužbe srednjega ušesa.



ZA HIGIENO OČI

Raztopina Physiodose je primerna za čiščenje in izpiranje oči. Uporabite po potrebi, 1- do 6-krat na dan.

Navodilo za uporabo: Iz plastenke nežno iztisnite nekaj kapljic raztopine v vsako oko tako, da plastenka ne pride v stik z očmi. S sterilnim zložencem odstranite odvečno raztopino. Pred uporabo katerih koli drugih kapljic za oči počakajte 15 minut.



ZA IZPIRANJE UŠES

Raztopino Physiodose uporabite za čiščenje in odstranjevanje utekočinjenega ušesnega masla in za izpiranje zunanjskega sluhovoda po uporabi raztopine za odstranjevanje ušesnega masla.

Navodilo za uporabo: Zunanji sluhovod izperite z raztopino Physiodose. Uporabite 1 platenko Physiodose za obe ušesi. Z vato obrišite odvečno raztopino.

ZA ČIŠČENJE RAN

Navodilo za uporabo: Rano izperite s celotno vsebino plastenke. Ob tem pazite, da plastenka ne pride v stik z rano. Odvečno raztopino obrišite samo z zdrave kože v okolici rane.

ZA REDČENJE INHALACIJSKIH PROIZVODOV

Navodilo za uporabo: Upoštevajte navodilo za uporabo inhalatorja. Če imate hudo respiratorno ali kardiovaskularno bolezen, pred uporabo vprašajte za nasvet svojega zdravnika.

SHRANJEVANJE:

Zaradi možnosti okužbe je plastenka uporabna največ 24 ur po odprtju. Ne uporabljajte po izteku roka uporabe, navedenega na plastenki. Ne uporabljajte, če je plastenka poškodovana.

SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM.

MEDICINSKI PRIPOMOČEK



0456

STERILE A

PROIZVAJALEC: Lab. GILBERT, 14200 Herouville Saint Clair, F

UVOZNIK: DR. GORKIČ d.o.o., Obrtniška 11, 1370 Logatec