


Contour®

Evolving with you

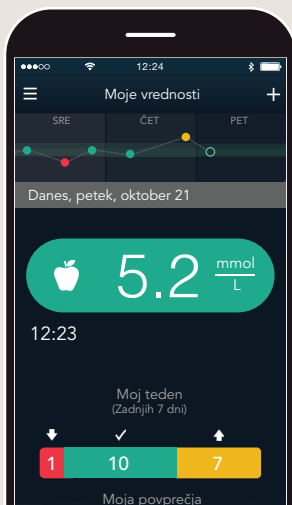

Contour® next ONE

Sistem za merjenje
glukoze v krvi



**VISOKA
VREDNOST**



**V CILJNEM
OBMOČJU**



**NIZKA
VREDNOST**

Aplikacija CONTOUR® DIABETES



Prenos iz
App Store



NA VOLJO V
Google Play

zaloker
zaloker

ASCENSIA
Diabetes Care

CONTOUR®NEXT ONE



Umijte roke s toplo vodo in milom ter jih osušite.



Z napravo za zbadanje Microlet®NEXT se zbodite v prst.



V odprtino na merilniku vstavite testni listič CONTOUR®NEXT.



Z vrhom testnega lističa se dotaknite kapljice krvi (0,6 µL).



Izmerjena vrednost se po 5 sekundah prikaže na zaslonu.

* Kratka navodila ne nadomeščajo navodil za uporabo, ki so priložena merilniku.



Video navodila za uporabo:
YouTube: Zaloker Zaloker

ZALOKER & ZALOKER
Kajuhova ulica 9, Ljubljana
www.zaloker-zaloker.si
www.sladkorna.si, 080 18 80



Merilnik
CONTOUR®NEXT ONE
uporablja testne lističe
CONTOUR®NEXT.