

Prilagodljiv neoprenski trak za ušesa EAR BAND-IT® ULTRA z 2 silikonskima čepkoma PUTTY BUDDIES za zaščito pri plavanju in kopanju

Prilagodljiv neoprenski trak za ušesa Ear Band-It® Ultra preprečuje izpad čepkov in dodatno varuje uho pred vdorom vode.

NAVODILA ZA UPORABO:

Trak namestite okoli glave tik ob lasišču ali pod njim in ga zapnite na tilniku. Boljši rezultat je, če ga nosite pod lasmi. Če je trak malce tesen, primite oba konca in ju nekajkrat čvrsto potegnite narazen, da se neopren raztegne.

VZDRŽEVANJE:

Trak bo ostal čist, tudi če ga uporabljate v bazenih s klorirano vodo, v kadi ali pod tušem. Če je pranje potrebno, uporabite blag detergent. Trak perite ročno in ga sušite na zraku.

POMEMBNO:

Za maksimalno zaščito priporočamo uporabo traku za ušesa Ear Band-It® Ultra., da čepke uporabljate skupaj s trakom za ušesa.

S trakom ne skačite na glavo v vodo.

Mehki silikonski čepki Putty Buddies

NAVODILA ZA UPORABO

1. Odtrgajte toliko silikona, kot ga potrebujete. Za starejše otroke in odrasle uporabite vso količino.
2. Silikon oblikujte v kroglico, ki jo namestite na suh, čist slušni kanal.
3. S prsti kroglico raztegnite in jo oblikujte tako, da popolnoma zapolni zunanje uho.
4. Ne potiskajte silikona globoko v slušni kanal.
5. Čepček odstranite tako, da s prstom pritisnete na zadnjo stran uhlja in porinete čepček iz uhlja.

Silikonski čepki za ušesa so namenjeni ponovni uporabi, zato jih hranite v priročni prenosni škatlici. Uporabni niso več, ko se umažejo ali jih ne morete več primerno oblikovati.

Priporočljiva uporaba pri plavanju, tuširanju in na splošno za zaščito pred vodo. Niso priporočljivi pri potapljanju v globine več kot 3 metre. Čeprav čepki niso namenjeni zaščiti pred hrupom, se slušne sposobnosti ob nošenju čepkov rahlo zmanjšajo.

OPOZORILA:

S čepkom prekrijte le odprtino ušesa. **NE VSTAVLJAJTE in NE POTISKAJTE GA V UŠESNI KANAL.** Silikonski čepki so varni za uporabo, če upoštevate navodila. Shranjujte izven dosega otrok. Čepki niso toksični, a če jih pogoltnete, lahko povzročijo težave, če zaprejo dihalno pot. Silikona ne raztegnite v pretanko plast. Preprečite stik čepkov z losjoni na osnovi naftnih derivatov in olj, ker tanjšajo silikonsko plast. Izogibajte se tudi stiku z lasmi.

Če potisnete čepček pregloboko v ušesni kanal, ga nikar ne skušajte izvleči sami s pomočjo pincete, vatiranih paličic ali podobnih pripomočkov, kajti lahko se zgodi, da boste čepček potisnili še globlje. Če je čepček v ušesnem kanalu kratek čas, ne bo povzročil škode, vendar čimprej poiščite pomoč zdravnika, ki ima ustrezne instrumente za odstranjevanje tujkov.

Proizvajalec: Jaco Enterprises, Inc., Phoenix, AZ 85028, ZDA

Uvoznik: Zaloker & Zaloker d.o.o., Kajuhova ulica 9, 1000 Ljubljana