




## PULL-ONS


Attends Pull-Ons so mehke in diskretne hlačke za zaščito pri inkontinenci. Nosijo se kot običajno spodnje perilo. Hlačke za enkratno uporabo nudijo zaščito pri vseh stopnjah inkontinence.




### Nameščanje

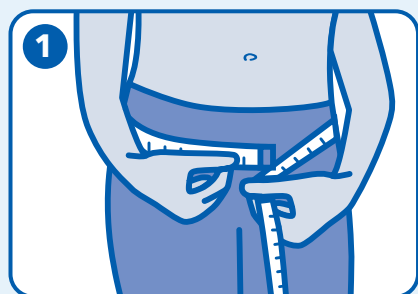


1 Za izbiro velikosti, izmerite obseg pasu in bokov. Večji obseg uporabite za določitev prave velikosti.

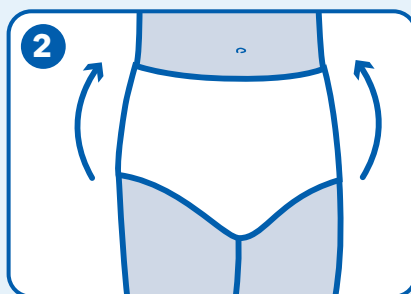


2 Vpojne hlačke se oblačijo in slačijo enostavno, kot običajno spodnje perilo.

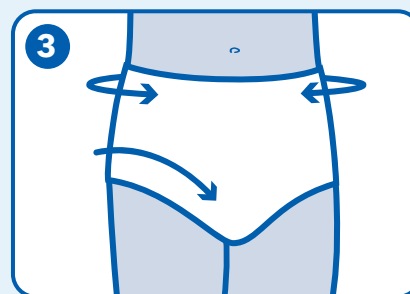

3 Elastičnost vpojnih hlačk zagotavlja udobno in varno prileganje.

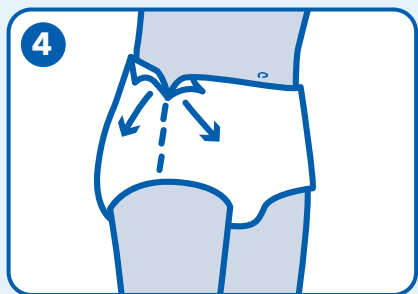

4 Kadar jih je potrebno zamenjati, jih enostavno slecite ali raztrgajte po stranskem šivu (v primeru blata).

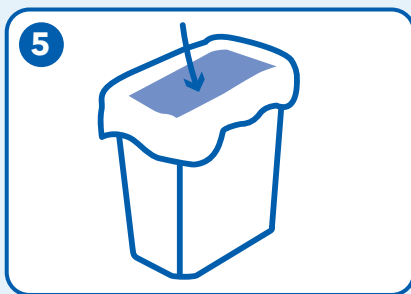

5 Nato rabljene hlačke zvijte in jih odvrzite med splošne odpadke.

## PULL-ONS

### Nasveti

#### Izbira primernega izdelka

- Izberite velikost hlačk Pull-On glede na obseg bokov in pasu - kar je večje.
- Izberite stopnjo vpojnosti glede na količino urina, ki uide. Začnite z nižjo vpojnostjo.
- Hlačke Pull-On so dobra rešitev za osebe, ki odklanjajo predloge in plenice.

#### Namestitev

- Barvna elastika označuje zadnjo stran hlačk.



Prijaznost do kože  
je testiral in potrdil  
ProDERM inštitut za  
dermatološke raziskave

#### Menjava

- Preverite indikator vlažnosti (črta, ki poteka po sredini hlačk med nogami)- če je več kot polovico indikatorja spremenilo barvo ali če je prisotno blato, hlačke zamenjajte. V nasprotnem primeru jih oblecite nazaj.

#### Odstranjevanje

- Hlačke zvijte in odvrzite v splošne odpadke.
- Hlačk nikoli ne odvrzite v straniščno školjko!