

PIILOSET®

**ONE
STEP**

*Učinkovit
in varen*

**SISTEM ZA NEGO
VSEH VRST KONTAKTNIH LEČ**

z vodikovim peroksidom

*Brez konzervansov
Brez dodatkov*



*Enostaven
za uporabo*



360 ML

+ posebna nevtralizacijska
posodica za kontaktne leče

ONE STEP

PIILOSET ONESTEP

je sistem z vodikovim peroksidom brez konzervansov za čiščenje, razkuževanje in nevtraliziranje vseh kontaktnih leč.

TEMELJITO OČIŠČENE KONTAKTNE LEČE

Piiliset OneStep je enostaven in učinkovit sistem za razkuževanje vseh vrst kontaktnih leč. Njegova superiorna učinkovitost temelji na kombinaciji razkuževalne 3% raztopine vodikovega peroksida in posebej zasnovane OneStep posodice za kontaktne leče. Temeljito očiščene kontaktne leče ostanejo navlažene dlje časa in so hkrati udobnejše za uporabo.

Ker je OneStep popolnoma brez konzervansov, je odlična dezinfekcijska metoda za ljudi z zelo občutljivimi očmi. Priporočamo ga ljudem, ki potrebujejo resnično temeljito očiščene kontaktne leče.

**Brez konzervansov
Brez dodatkov**

**Učinkovit
in varen**

VAREN SISTEM

OneStep raztopino moramo vedno uporabljati s priloženo OneStep posodico za kontaktne leče. Medtem, ko vodikov peroksid razkuži in očisti kontaktne leče, vgrajen nevtralizacijski bubble disk pretvori vodikov peroksid v kisik in vodo. Proces traja 6 ur.

Razkužene kontaktne leče lahko pred vstavljanjem v oči ali tekom dneva po potrebi dodatno speremo s Piiliset SAL fiziološko raztopino ali s Piiliset BioTwin večnamensko raztopino.

ZELO POMEMBNO JE SLEDITI NAVODILOM ZA UPORABO:

- Svetujte strankam naj pred prvo uporabo OneStep raztopine skrbno preberejo navodila za uporabo.
- Nenevtralizirane raztopine OneStep nikoli ne smemo zanesti v oko.
- Proces nevtralizacije se prične, ko nevtralizacijski bubble disk v posodici za kontaktne leče pride v stik z raztopino OneStep. Zaradi tega je zelo pomembno, da **najprej odstranimo kontaktne leče in jih vstavimo v držalo na pokrovčku. Nato napolnimo posodico za kontaktne leče z raztopino OneStep in posodico takoj zapremo s pokrovčkom z držalom za kontaktne leče.**
- **Kontaktne leče lahko uporabimo po 6 urah.**
- Razkužene kontaktne leče lahko pred vstavljanjem v oči ali tekom dneva po potrebi dodatno speremo s Piiliset SAL fiziološko raztopino ali s Piiliset BioTwin večnamensko raztopino.

SESTAVA

3% vodikov peroksid (H₂O₂), EDTA, PVP v fiziološki raztopini pufirani s fosfatnim pufrom.

PAKIRANJE

OneStep 360 ml ali 100ml plastenka, OneStep nevtralizacijska posodica za kontaktne leče, navodila za uporabo.

UPORABNO

Uporabno 2 meseca po prvem odprtju.



Finnsusp Ltd
Pääskykalliontie 5
21420 Lieto, Finska
www.piiliset.fi



Optimed medical d.o.o.
Litostrojska cesta 44c
1000 Ljubljana

**Optimed
medical**