

OPEKLINE

Površinske rane

Blaži bolečino in spodbuja celjenje

URGO OBLIŽI ZA OPEKLINE - veliki, 4 obliži

So sterilni in se uporabljajo za oskrbo opeklin prve stopnje in blažjih površinskih opeklin druge stopnje.

Mrežica iz pollestra:

- hitro lajša bolečine
- vsebuje kombinacijo hidrokoloidnih delcev in vazelina, ki spodbuja celjenje
- zagotavlja neboleče odstranjevanje, saj se ne prilepi na rano in ne poškoduje novonastalega tkiva

Zunanja površna obliža:

- izjemno mehka in udobna
- dobro se prilaga koži in se prilagaja gibanju telesa

Vpojna blazinica:

- absorbira izločke rane



velikost vpojne
blazinice: 7,3 x 4,5 cm
velikost obliža:
7 x 10 cm



URGOOPVRSI - 001
Serijska številka in rok uporabe sta odčitana na posameznem ovoju obliža.
Proizvajalec: Laboratoires Urgo - 42 Rue de Longvic - 21300 Chenove - Francija
Zastopnik in uvoznik: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

LASTNOSTI: URGO obliži za opekline se uporabljajo za oskrbo opeklin prve stopnje in blažjih površinskih opeklin druge stopnje. Učinkovitost obliža temelji na inovativni mrežici, izdelani iz poliesterskih vlaken, prepojenih s hidrokoloidnimi delci in z vazelinom. V stiku z izločki rane (eksudati), hidrokoloidni delci reagirajo z vazelinom in tvorijo lipidno-koloidni gel. Rezultat so boljši pogoji za hitrejšo celjenje rane v vlažnem okolju. Nastali gel ob zamenjavi obloge z lahkoto izperemo.

NAVODILO ZA UPORABO: Opečeno mesto približno 15 minut hladite pod mirno vodo, da omejite širjenje opekline. Opekline očistite z razkužilom, ki ne vsebuje alkohola (oziroma rano izperite z vodo ali fiziološko raztopino). Nikoli ne uporabljajte obarvanih razkužil, na primer eozina. Opekline osušite s sterilno gazo. Pazite, da ne poškodujete opeklinskega mehurja, ki rano varuje pred okužbo. Če se mehur kljub temu predre, prizadeto mesto razkužite. Ne poskušajte odstranjevati odmrle kože, če le-ta ne odpade sama. Odstranite zaščitni ovoj obliža. Namestite URGO obliž za opekline na opečeno mesto. Pred namestitvijo obliža opeklinske rane ni treba mazati s kremo za opekline. Celjenje običajno traja 5 do 6 dni. Prvi obliž zamenjamo po 24 urah, nato pa na vsakih 48 ur.

PREVIDNOSTNI UKREPI: URGO obliži za opekline se lahko uporabljajo samo na lokaliziranih opeklinskih ranah. Obliž mora v celoti prekriti opečeno mesto, da se omogoči optimalna absorpcija izločka rane (eksudata). Če opazite znake vnetja (rdečina, ki se širi na nepoškodovane predele kože, bolečina itd.), če se stanje po 6 dneh ne izboljša ali če je opečen otrok, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

KONTRAINDIKACIJE

Obliža ne uporabljajte pri globokih opeklinskih druge stopnje, opeklinskih tretje stopnje ali opeklinskih obrazu.