

# PROCTOSAL

REKTALNI MIKROKLISTIR

**PROCTOSAL rektalni mikroklistir** je medicinski pripomoček na osnovi natrijevega hialuronata butirata in dimetikona, ki tvori zaščitni film in deluje kot mazivo. Ustvari mehansko pregrado okoli rektalne sluznice in se uporablja kot pomožna terapija pri zdravljenju hemoroidov ter pri procesih ponovne epitelizacije in normalizacije analne sluznice.

## KAKO DELUJE

**PROCTOSAL** je krema, posebej formulirana za rektalni ekosistem. Natrijev hialuronat butirat prispeva k ponovni vzpostavitvi normalnega fiziološkega stanja in delovanja rektuma, medtem ko ohranja celovitost rektalne sluznice. Dimetikon prispeva k tvorbi mukoadhezivnega gela, ki lahko ustvari filmogeno in zaščitno pregrado na rektalnem tkivu.

## INDIKACIJE

Izdelek **PROCTOSAL** je indiciran kot pomožna terapija pri zdravljenju hemoroidov in pri procesih normalizacije rektalne sluznice.

## SESTAVA

Učinkovini: natrijev hialuronat butirat in dimetikon. Vsebuje konzervanse (benzilalkohol in dehidroocetno kislino).

## NAVODILO ZA UPORABO

Odstranite pokrovček tako, da ga prepognete ob robu tube. Namažite kanilo tako, da pustite, da izteče majhna količina kreme. Kanilo vstavite v rektum in stisnite mehasto plastenko. Izdelek izlecite, medtem ko ga držite stisnjene, in zavrzite.

## ODMERJANJE

Uporabite 1 mikroklistir po potrebi oziroma po navodilih zdravnika.

## OPOZORILA

Izdelka ne uporabljajte, če ste preobčutljivi ali alergični na eno ali več njegovih sestavin. Mikroklistir je zasnovan za enkratno uporabo, zato delno porabljenega izdelka ne smete ponovno uporabiti. Uporabljajte največ 30 zaporednih dni. Shranjujte nedosegljivo otrokom.

## POGOJI SHRANJEVANJA

Shranjujte pri sobni temperaturi. Izdelek ne sme biti izpostavljen virom toplote in neposredni svetlobi. Rok uporabnosti velja za izdelek v originalno zaprti ovojni, ki je pravilno shranjen.

## ROK UPORABNOSTI

Glejte rok uporabnosti na ovojni. Ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti.

## PAKIRANJE ZA PRODAJO

6 mikroklistirjev po 8 g za enkratno uporabo.

 New.Fa.Dem. Srl, Viale Ferrovie dello Stato, 1 – Zona ASI 80014, Giugliano in Campania (NA), ITALIJA

**Datum:** Rev. 00. februar 2022

## Seznam simbolov

 Medicinski pripomoček

 Omejitev temperature

 Številka serije

 Po uporabi ne zavrzite v okolje

 Za enkratno uporabo

 Proizvajalec

 Uporabno do

 Glejte navodila za uporabo