

# PROCTOSAL rektalni mikroklistir

6 mikroklistirjev po 8 g za enkratno uporabo

**PROCTOSAL rektalni mikroklistir** je medicinski pripomoček z natrijevim hialuronatom butiratom in dimetikonom, ki tvori zaščitni film in deluje kot mazivo. Ustvari mehansko pregrado okoli rektalne sluznice in se uporablja kot pomožna terapija pri zdravljenju hemoroidov ter pri procesih ponovne epitelizacije in normalizacije analne sluznice.

**Navodilo za uporabo:** Uporabite 1 mikroklistir po potrebi oziroma po navodilih zdravnika. Odstranite pokrovček kanile tako, da ga prepognete ob robu. Namažite kanilo tako, da pustite, da izteče majhna količina kreme. Kanilo vstavite v rektum in stisnite plastenko. Izdelek izvlecite, medtem ko ga držite stisnjenega, in zavržite.

**Opozorila:** Za zagotovitev pravilne uporabe upoštevajte informacije v priloženem navodilu. Izdelka ne uporabljajte, če ste preobčutljivi ali alergični na eno ali več sestavin. Uporabljajte največ 30 zaporednih dni.

**Pakiranje:** 6 mikroklistirjev po 8 g za enkratno uporabo.



New.Fa.Dem. Srl, Viale Ferrovie dello Stato, 1 – Zona ASI  
80014, Giugliano in Campania (NA), ITALIJA

Na podlagi licence družbe Velit Biopharma Srl, Piazza Cavour 3,  
20121 Milano, Italija