

# PROCTOSAL

REKTALNA KREMA

**PROCTOSAL rektalna krema** je medicinski pripomoček z natrijevim hialuronatom butiratom in dimetikonom, ki tvori zaščitni film in deluje kot mazivo. Ustvari mehansko pregrado okoli rektalne sluznice in se uporablja kot pomožna terapija pri zdravljenju hemoroidov ter pri procesih ponovne epitelizacije in normalizacije analne sluznice.

## MEHANIZEM DELOVANJA

**PROCTOSAL** je krema, posebej formulirana za rektalni ekosistem. Natrijev hialuronat butirata prispeva k ponovni vzpostavitvi normalnega fiziološkega stanja in delovanja rektuma ter ohranja celovitost rektalne sluznice. Dimetikon prispeva k tvorbi mukoadezivnega gela, ki lahko ustvari filmogeno in zaščitno pregrado na rektalnem tkivu.

## INDIKACIJE

Izdelek **PROCTOSAL** je indiciran kot pomožna terapija pri zdravljenju hemoroidov in pri procesih normalizacije rektalne sluznice.

## SESTAVA

Učinkovini: natrijev hialuronat butirata in dimetikon. Vsebuje konzervanse (benzilalkohol in dehidroocetno kislino).

## NAVODILO ZA UPORABO

Ulezite se na levi bok. Odvijte pokrovček tube in privijte aplikator. Iztisnite majhno količino kreme, da namažete aplikator, in ga vstavite v anus. S stiskanjem konca tube iztisnite zeleno količino izdelka. Po postopku odvijte aplikator, ga očistite in ponovno privijte pokrovček.

## ODMERJANJE

**PROCTOSAL** rektalno kremo uporabljajte po potrebi, najbolje zvečer.

## OPOZORILA

Izdelka ne uporabljajte, če ste preobčutljivi ali alergični na eno ali več njegovih sestavin. Rektalni aplikator je zasnovan za večkratno uporabo. Uporaba aplikatorja je strogo omejena na enega posameznika. Uporabljajte največ 30 zaporednih dni. Shranjujte nedosegljivo otrokom.

## POGOJI SHRANJEVANJA

Shranjujte pri sobni temperaturi. Izdelek ne sme biti izpostavljen virom toplote in neposredni svetlobi. Rok uporabnosti velja za izdelek v originalno zaprti ovojni, ki je pravilno shranjen.

## ROK UPORABNOSTI

Glejte rok uporabnosti na ovojni. Ne uporabljajte po izteku navedenega roka uporabnosti.

## PAKIRANJE

30 g v aluminijasti tubi z aplikatorjem.

 New.Fa.Dem. Srl, Viale Ferrovie dello Stato, 1 – Zona ASI 80014, Giugliano in Campania (NA), ITALIJA

Datum: Rev. 00. februar 2022

## Seznam simbolov



Številka serije



Uporabno do



Glejte navodila za uporabo



Medicinski pripomoček



Omejitev temperature



Po uporabi ne zavržite v okolje



Proizvajalec