	PREDLOG BESEDILA NAVODILA ZA UPORABO	april 2021
	AQUA MARIS® Classic pršilo za nos, 30 ml	str.: 1/2

AQUA MARIS® Classic

100% naravno pršilo za nos

Blagodejna morska voda Jadranskega morja, ki **vlaži in čisti suh razdražen nos** ter omogoča dolgo trajno nego razdražene in suhe nosne sluznice. Primeren je za vsakodnevno uporabo.

Sestava

Raztopina vsebuje morsko vodo iz Jadrana, ki je bogata s solmi in oligoelementi. Oligoelementi, ki so prisotni v raztopini imajo pomembno vlogo pri vzdrževanju normalnega delovanja nosne sluznice, kar omogoča prehodnost zgornjih dihalnih poti.

Brez konzervansov.

Pakiranje

30 ml izotonične raztopine (200 odmerkov) brez konzervansov, v steklenički z odmerno pršilko.

Namen uporabe

Delovanje nosne sluznice in normalno dihanje je odvisno od vlažnosti sluznice. Aqua Maris® Classic **vlaži, čisti in obnavlja nosno sluznico.**


Kdaj in kako uporabljati Aqua Maris® Classic pršilo za nos?

- Za vzdrževanje vsakodnevne higijene nosu razpršite 1-2 krat v vsako nosnico. Postopek lahko ponavljate večkrat dnevno skozi daljše obdobje.
- Pri suhi in razdraženi nosni sluznici, ki je posledica bivanja v spremenjenih mikroklimatskih pogojih kot sta izredno suh zrak (klimatizirani prostori) ali onesnažen zrak, pri naglih temperaturnih spremembah in spremembah kakovosti zraka (npr. med potovanji), razpršite Aqua Maris® Classic pršilo za nos 3-4 krat v vsako nosnico, po potrebi.

Pred prvo uporabo odstranite zamašek in pritisnite 2-3 krat na pršilko, da se sprosti zrak.

Iz higienskih razlogov je potrebno, da vsak izdelek uporablja le ena oseba.

Ker Aqua Maris® Classic podpira fiziološko stanje sluznice in nima sistemskih učinkov, je primeren za otroke, nosečnice in doječe matere. Zaradi svoje nežnosti je primeren za vsakodnevno uporabo.

	PREDLOG BESEDILA NAVODILA ZA UPORABO	april 2021
	AQUA MARIS® Classic pršilo za nos, 30 ml	str.: 2/2

Opomba

Ni posebnih pogojev shranjevanja. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ne uporabljajte izdelka po preteku roka uporabnosti.

Proizvajalec

JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvaška

Distributer za Slovenijo:

Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Ljubljana, Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana, Slovenija

Datum revizije navodil za uporabo

april 2021

Pojasnilo oznak na izdelku



Preberite navodila za uporabo



Sterilno, obdelano z aseptično tehniko



Proizvajalec



Številka serije



Rok uporabnosti



CE oznaka