


# Grelna blazina **medisana**®

## Navodilo za uporabo

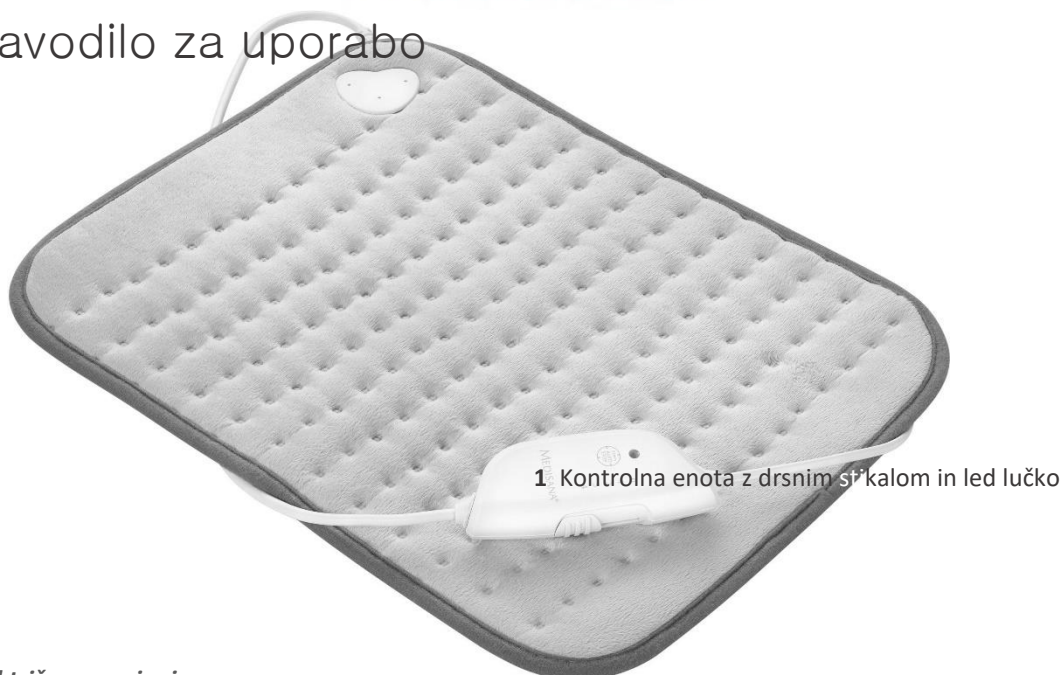

### **Električno napajanje**

- Pred vkloplitvijo izdelka v vaše električno omrežje se prepričajte, da je na izdelku napisana moč (volt) skladna z vašim električnim omrežjem.
- Adapter vklopite v električno omrežje le ko je masažna blazina izklopljena.
- Uporabljajte le adapter priložen izdelku.
- Adapterja, kabla, kontrolne enote in blazine ne shranjujte v bližini vročih in vlažnih površin ali v bližini tekočin. Adapterja ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Če izdelek pade v vodo, ga ne prijemajte. Nemudoma ga izklopite iz električnega omrežja.
- Izdelek vedno izklopite takoj po prenehanju uporabe.
- Ob izklapljanju izdelka iz električnega omrežja ne vlecite kabla, primite adapter.
- Izdelka ne prenašajte tako, da ga držite za kabel, kontrolno enoto.
- Prenehajte z uporabo izdelka, če opazite poškodbo kabla ali adapterja. Iz varnostnih razlogov naj te dele menja ali popravlja za to usposobljena oseba.
- Kabel ne sme biti zavozlan, ovit ali preščipnjen.

### **Specifične skupine uporabnikov**

- Izdelka ne smejo uporabljati osebe (vključno otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali osebe z nezadostnimi izkušnjami in/ali pomanjkanjem znanja razen ob prisotnosti osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost in v primeru, če so bili o uporabi naprave poučeni.
- Otroci morajo biti ob uporabi izdelka nadzorovani, da se z izdelkom ne bodo igrali.
- Če med masažo zaznate bolečino ali neudobje z uporabo takoj prenehajte in se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Izdelka nikoli ne puščajte nenadzorovanega, če je ta vklopljen v električno omrežje.
- Če imate vprašanja glede terapevtske uporabe blazine, se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Če čutite bolečino in/ali se zdravite ali uporabljate medicinske pripomočke, se pred uporabo izdelka posvetujte s svojim zdravnikom.

### **Pred uporabo izdelka**

- Pred uporabo vedno preverite ali so kabel, adapter, kontrolna enota ali blazina poškodovani. V primeru poškodb izdelka ne uporabljajte.
- Prav tako izdelka ne uporabljajte, če le-ta ne deluje normalno ali, če je vlažen oz. moker.

### **Uporaba izdelka**

- Grelno blazino lahko uporabljate le v namene, opisane v tem navodilu za uporabo.
- Uporaba izdelka v druge namene izniči garancijo.

- Izdelka nikoli ne puščajte nenadzorovanega, če je vklopljen.
- Blazine naj ne uporabljate na živalih.
- Blazine ne uporabljate pod odejami oziroma na splošno pokrite.
- Maksimalen čas enkratne uporabe je 15 minut.
- Izogibajte se stikom izdelka z ostrimi ali koničastimi predmeti.
- Izdelek naj ne pride v stik z vročimi površinami ali predmeti.
- Izdelka ne uporabljate, če je le-ta zmečkan ali prepognjen.
- Na izdelku ne stojte.
- Po predelu telesa, na katerem boste uporabili grelno blazino, se pred uporabo ne mažite s kremami ali s čim drugim, saj to lahko privede do opeklin.
- Adapterja se ne dotikajte, če stojite v vodi in ga vedno prijemajte s suhimi rokami.

### **Čiščenje in vzdrževanje**

- Pred pranjem blazino izključite iz električnega omrežja in jo pustite, da se popolnoma ohladi.
- Čistite lahko le blazino. Električni kabel pred čiščenjem odstranite.
- Blazino lahko operete ročno ali pa v pralnem stroju na 30°C.
- Blazino nato raztegnite na ravno površino, da se popolnoma posuši.
- Če je električni kabel blazine zvit, ga je potrebno razviti.
- Če blazina ne deluje, je ne poskušajte popraviti sami.
- Blazino je najbolje shranjevati zavito v originalno embalažo v čistem in suhem prostoru.
- Blazino ponovno uporabite le popolnoma suho!

### **Vsebina paketa:**

Pred prvo uporabo preverite, če paket vsebuje vse spodaj naštet elemente in ni nič poškodovano. V primeru dvoma izdelka ne uporabljajte in se posvetujte s svojim prodajalcem.

Paket vsebuje naslednje:

- 1 Medisana XL grelna blazina HP 650 vključno z upravljalnikom
- 1 navodilo za uporabo

Pakiranje je možno ponovno uporabiti ali reciklirati. Po prenehanju uporabe odpadni material ustrezno zavržite. Če med odpiranjem opazite transportne poškodbe pakiranja se obrnite na svojega prodajalca.

### **Uporaba**

Grelno blazino lahko uporabite za segrevanje in relaksacijo kateregakoli dela telesa. Dovajanje toplote telesu na ta način izboljšuje krvni pretok preko otrdelih mišic in tako izboljšuje počutje, še posebej po napornem dnevu. Grelna blazina doseže zmerno, prijetno temperaturo v nekaj minutah po vklopu. Temperaturo lahko regulirate po svojih željah.

### **Delovanje**

Kabel vklopite v električno omrežje ter vklopite blazino. Da to storite, premaknite stikalo na kontrolni enoti s pozicije 0 na pozicijo 1. Vkllopila se bo zelena LED lučka.

Po par minutah boste čutili segrevanje grelne blazine. V primeru, da želite višjo jakost toplote, premaknite stikalo iz pozicije 1 na 2 ali 3 ali pa najvišjo pozicijo 4. Če je blazina prevroča, stikalo premaknite nazaj na nižjo željeno pozicijo.

Grelna blazina se ohladi v kratkem času. To je normalno. Ponovno segrevanje tudi sledi hitro.

Za izklop premaknite stikalo na pozicijo 0. LED lučka se ugasne. Blazino izklopite iz električnega omrežja.

V primeru nadaljnje uporabe premaknite stikalo na pozicijo 1 kadarkoli.

Grelna blazina se ugasne samodejno po 90 minutah neprekinjene uporabe.

## Odpravljanje težav

V primeru, da grelna blazina ne deluje (LED lučka ne gori), preverite če je pravilno vklopljena v električno omrežje. Če to ni razlog nedelovanja, je blazina okvarjena na drug način. V tem primeru se obrnite na prodajalca, zastopnika ali serviserja (podatki znotraj garancijskega lista).

### Varno ravnanje z iztrošeno napravo

Kupec je dolžan vrniti vso električno in elektronsko opremo, ne glede na to, ali vsebuje nevarne snovi ali ne, na za to določeno zbirno mesto. Tako omogočite pristojnim službam, da napravo reciklirajo na okolju prijazen način. Baterije odvrzite na za to določenih odlagališčih. Dotrajanih baterij ne odlagajte med svoje gospodinjske odpadke.

### Tehnični podatki:

Ime in model	: XL Grelna blazina Medisana HP 650
Napajanje	: 220 – 240V 50/60 Hz
Izhodna toplota	: 100 W
Stopnje stikala	: 0 - 1 – 2 – 3
Samodejni izklop	: po približno 90 minutah
Pogoji delovanja	: le v suhih prostorih (navodilo)
Pogoji shranjevanja	: na ravni površini, leže; čisto in suho
Dimenzije	: približno 45 x 35 cm
Teža	: približno 0,5 kg
Št. izdelka	: 61150
EAN	: 40 15588 61150 6

## Garancijski list

**GRELNA BLAZINA MEDISANA HP 650**

### Proizvajalec:

MEDISANA GmbH  
Carl-Schurz-Str. 2  
41460 NEUSS, Nemčija  
[www.medisana.de](http://www.medisana.de)

**Žig, podpis ter sedež prodajalca:**

**Datum izročitve:**

### GARANCIJSKI POGOJI

1. Proizvajalec jamči, da ima izdelek predpisane, oz. deklarirane kvalitetne karakteristike in da bo na zahtevo imetnika garancijskega lista, če ga dobavi v garancijskem roku, na lastne stroške odpravil napake in pomanjkljivosti izdelka, ki izhajajo iz izdelka ali pa bo izdelek, ki ima take pomanjkljivosti zamenjal z novim.
2. Garancijski rok začne teči od dneva izročitve, kar dokažete s pravilno izpolnjenim garancijskim listom (žig, podpis ter sedež prodajalca, datum prodaje, serijska številka aparata in izvirnim računom).
3. Dajalec garancije zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
4. Garancija velja na območju Slovenije.
5. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
6. Garancija preneha veljati v primerih:
  - če ne upoštevate navodil za uporabo,
  - če popravilo izvrši nepooblaščen oseba,
  - zaradi malomarnega ravnanja s proizvodom,
  - če poškodba nastane zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca.

**GARANCIJSKI ROK JE 3 LETA.**

#### **Zastopnik za Slovenijo (dajalec garancije):**

**PROLAT d.o.o**, Praproče 9, 8210 Trebnje

T: (07) 30 44 555

F: (07) 30 44 333

[info@prolat.si](mailto:info@prolat.si)

[www.prolat.si](http://www.prolat.si)

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure; sobota, nedelja, prazniki zaprto

#### **Serviser:**

MEDIA-IMPEKS d.o.o.

Kicar 11 g

SI-2250 PTUJ

Tel. +386 599 60 650

Fax: +386 2 796 09 21

Gsm: +386 41 633 636

[www.media-impex.com](http://www.media-impex.com)