

OMRON



OMRON

Manšeta Comfort

Manšeta Comfort

• Priročnik z navodili

S


OMRON

Manšeta Comfort

Priročnik z navodili za manšeto Comfort OMRON.

Zahvaljujemo se vam za nakup manšete Comfort OMRON. Obseg roke za to manšeto je 22 do 42 centimetrov. Manšeto Comfort OMRON lahko priključite na različne naprave za spremljanje krvnega tlaka OMRON. Oglejte si originalna navodila naprave za spremljanje krvnega tlaka.

Vsebina paketa

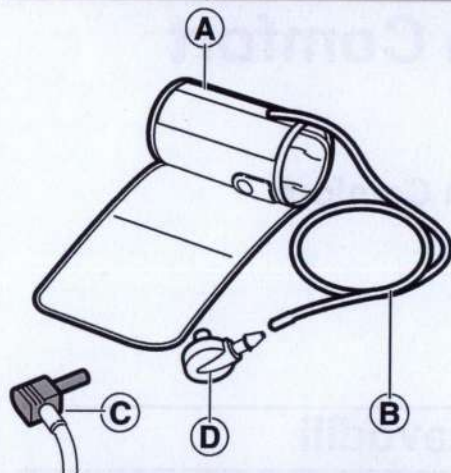

- A. Manšeta za roko (obseg roke 22–42 cm)
- B. Cevka za zrak
- C. Zračni priključek
- D. Zračni priključek


Navodila za uporabo:

Opomba: Zračni priključek priključite na cev skladno z napravo.

Nameščanje manšete za roko



Manšeto lahko ovijete okrog svoje desne ali leve roke.

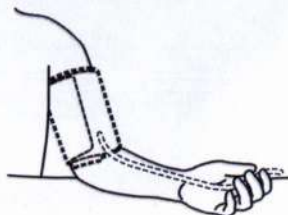- Iz nadlahti odstranite tesno prilegajoča se oblačila.
- Manšete ne nameščajte čez debela oblačila, rokava pa si ne zavijajte, če je pretesen.




CE

Ta manšeta ustreza predpisom direktive ES 93/42/EGS (direktiva o medicinskih pripomočkih).

Proizvajalec 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONSKA
EU predstavnik 	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpis 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKA www.omron-healthcare.com
Proizvodni obrat	OMRON (DALIAN) CO., LTD. Dalian, KITAJSKA
Podružnica	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, NEMČIJA www.omron-medizintechnik.de
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex FRANCIJA


Izdelano na Kitajskem

1. V zračno vtičnico vtaknite zračni čep (na levi strani naprave).

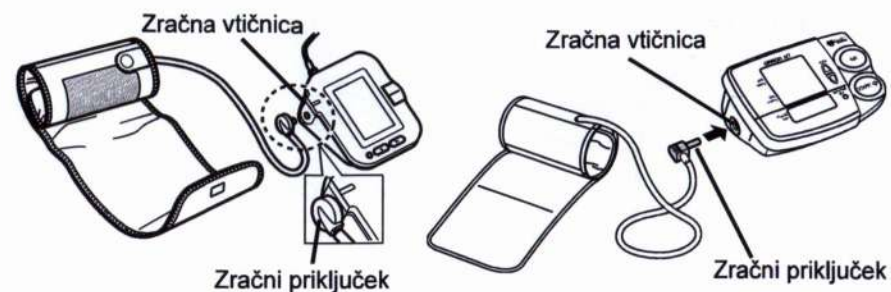


Manšeta mora biti med priključevanjem na zračno vtičnico popolnoma izpraznjena.

2. Sedite na stolu, noge naj počivajo plosko na tleh, roko pa namestite na mizo tako, da bo manšeta v višini srca.

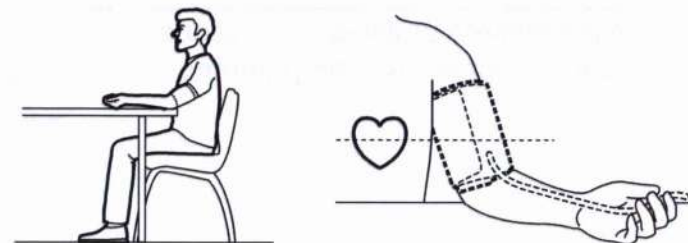


3. Ročaj na manšeti z roko trdno držite.

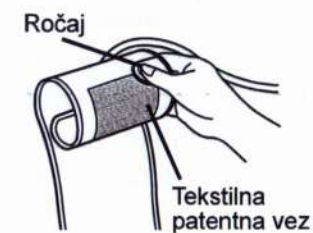

4. Dlan roke obrnite navzgor.




5. Dlan roke obrnite navzgor.

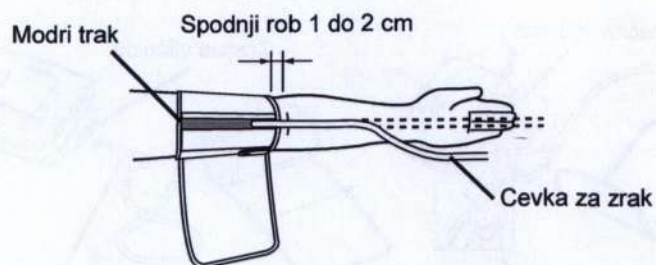

Manšeto namestite na nadlahaht, tako da se bo moder trak nahajal na sredini notranje strani roke in bo usmerjen po roki navzdol. Cevka za zrak mora teči navzdol po notranjosti podlahti in biti v isti črti kot vaš sredinec. Spodnji rob manšete mora biti približno 1 do 2 cm oddaljen od komolca.

6. Ko je manšeta pravilno nameščena, TRDNO zaprite tekstilno patentno vez.

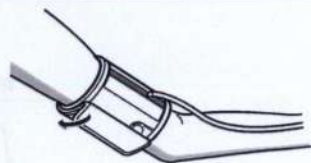

Opombe:


- Manšeta naj se tesno prilega vaši roki.
- Manšeta mora biti v dobrem stiku z vašo kožo. Kazalec bi moral z lahkoto zdrsniti med manšeto in roko, tako da si lahko manšeto namestite ali odstranite.
- Poskrbite, da v cevkah za zrak ni vozlov.

Izvajanje meritev na desni roki

Kadar manšeto nameščate na desno roko, upoštevajte naslednje točke. Manšeto namestite tako, da bo cevka za zrak ob strani vašega komolca.

Opombe:

- Pazite, da roka ne bo počivala na zračni cevi, ali kako drugače omejevala pretok zraka v manšeto.
- Manšeto za roko namestite tako, da noben njen del ne bo nameščen preko komolčnega sklepa. Manšeto namestite 1 do 2 cm nad komolec.
- Če manšeto uporabljate dvakrat dnevno, bo uporabna tri leta.

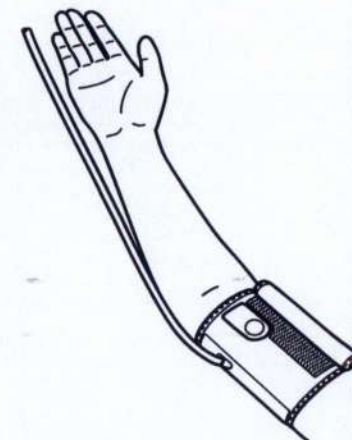

Vzdrževanje

Madeže na manšeti lahko previdno odstranite z vlažno krpo in milnico.

Manšete ne umivajte in je ne zmočite!

Manšete in cevke za zrak ne zlagajte skupaj pretesno in ju ne pregibajte.