

Silikonski gel z zaščitnim faktorjem 40 SPF, 10g  
BAPSCARCARE je medicinska silikonska terapija za hitrejšo in  
lagodnejšo okrevanje vaše kože in zaščito pred škodljivimi  
UVA in UVB sončnimi žarki. Pomaga obstoječi brazgotini postati  
bolj ravna, voljna in tanjša. Brazgotina bo lepša ter v mnogih  
primerih skoraj nevidna. Primerno za manjše in večje brazgotine  
po: kirurških, kozmetičnih posegih, opeklinah, nezgodah, carskih  
rezih, opeklinah. Navodila za uporabo so priložena. Sestavine,  
serijska številka in rok uporabe so odtisnjeni na ovojnini.  
Proizvajalec: BAP MEDICAL BV, Netherlands  
Distributer: AdvaMed d.o.o., Ljubljana

### SILIKONSKI GEL z zaščitnim faktorjem 40 SPF, 10g

#### Lastnosti:

BAPSCARCARE je medicinska silikonska terapija za hitrejšo in lagodnejšo okrevanje vaše kože t  
zaščito pred škodljivimi UVA in UVB sončnimi žarki. Pomaga obstoječi brazgotini postati bolj  
ravna, voljna in tanjša. Brazgotina bo lepša ter v mnogih primerih skoraj nevidna. Tudi kadar ji  
vaša brazgotina groba oz odebeljena ter pušča sledi po koži, jo bo BAPSCARCARE občutno  
zmanjšal. Gel zadržuje vlago na koži in pospešuje samoceljenje.

#### Silikonski gel je:

- Prijeten, gladek, svilen občutek na koži
- Brez vonja
- Se hitro posuši
- Ni masten in se ne lepi

Sestavine: Polysiloxanes, vitamin E

#### Indikacije/uporaba:

BAPSCARCARE lahko uporabljate za manjše in večje brazgotine po:

- Kirurških posegih
- Kozmetičnih posegih
- Opeklinah
- Nezgodah
- Carskih rezih
- Odrgrninah

#### Navodila za uporabo:

- Na očiščeno in suho kožo nežno nanesite tanek sloj gela
- Priporočena uporaba je dvakrat na dan, zjutraj in zvečer (ponovno nanesite po kopanju,  
aktivnostih in brisanju z brisačo)
- Izogibajte se soncu med 11. in 15. uro, na soncu nosite zaščitna oblačila
- Gel se uporablja samo za zunanjo uporabo
- Ko se gel posuši, kožo lahko prekrijemo s kozmetičnimi izdelki

#### Kontraindikacije:

NE UPORABLJAJTE NA ODPRTIH RANAH  
Izogibajte se stika z očmi

#### Shranjevanje

Rok uporabe je odtisnjen na ovojnini. Po odprtju, porabiti v 6 mesecih. Shranjevati na sobni  
temperaturi, vendar ne na višji od 25°C.

Proizvajalec: BAP MEDICAL BV, Netherlands  
Distributer: AdvaMed d.o.o., Ljubljana