

## UVOZNIK

Bioplus d. o. o., Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka  
T: 04 / 51 34 900, F: 04 / 51 56 900

## PROIZVAJALEC

ARR Health Technologies Inc., ZDA

OSTALI PROIZVODI PODJETJA  
ARR HEALTH TECHNOLOGIES, INC.

LiceGuard® glavnik za izčesavanje gnid in uši  
LiceGuard® šampon za odstranjevanje gnid  
LiceGuard® repelent za preprečevanje ušivosti




[www.robicomb.si](http://www.robicomb.si)

## ARR Health Technologies, Inc.

### Navodila za uporabo



**Robi Comb Pro**  
ELEKTRONSKI GLAVNIK

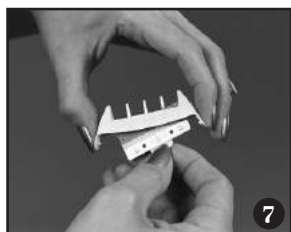

### GARANCIJSKI LIST

Uvoznik: Bioplus d. o. o.  
Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka  
T: 04 / 51 34 900, F: 04 / 51 56 900

Izdelek: Elektronski glavnik ROBI COMB PRO

### GARANCIJSKA IZJAVA

- Uvoznik daje garancijo, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če boste upoštevali priložena navodila.
- Uvoznik se obvezuje, da bo na vašo zahtevo, predloženo v garancijskem roku, na svoje stroške v svojih oziroma v pogodbenih prostorih poskrbel za odpravo okvar in tehničnih pomanjkljivosti izdelka, ki bi nastale ob normalni uporabi v času, za katerega daje garancijo.
- Garancija začne veljati z dnem nakupa izdelka v maloprodaji, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (ime in sedež organizacije, ki je prodala izdelek v maloprodaji, žig, datum prodaje in podpis prodajalca) ali pa z računom.
- Proizvod vam bo servisna organizacija popravila najkasneje v 45 dneh. Za čas popravila vam bo podaljšala garancijski rok. Če popravilo ne bo izvršeno v navedenem roku, vam bo prodajalec oziroma proizvajalec izdelek zamenjal z novim.
- Uvoznik ne jamči v primerih, ko kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če je v izdelek posegla nepooblaščen oseba ali če je kupec z izdelkom ravnal nestrokovno ali malomarno. Življenjska doba izdelka je 7 let.
- Garancijski rok: 12 mesecev

Prodajalec:

Podpis:

Datum prodaje:

## O UŠIVOSTI

Naglavne uši so paraziti. Ugodna temperatura v lasih in na lasišču ustvarja idealno okolje za njihov razvoj in razmnoževanje. Hranijo se s človeško krvjo, ki jo približno petkrat dnevno srkajo iz lasišča. Živijo kakšnih 40 dni in zležejo do 200 jajčec oziroma gnid, zato je ušivost težko uspešno odpraviti. Uši na posamezen las zležejo le po eno jajčece, ki ga z močno lepljivo snovjo nanj prilepijo približno 3 mm od lasišča. Pri običajni rasti las so gnide v trenutku, ko se izvalijo uši (po približno 9 dneh), od lasišča oddaljene približno 5 mm. Gnide, ki so od lasišča oddaljene več kot 5 mm, so verjetno prazne ali odmrle.

Ušivost je nadloga, ki ljudi spremlja že tisočletja. Za odpravo ušivosti so bili na voljo različni pripomočki in kemični pripravki. Uši so se jim vedno znale prilagoditi in so nanje pri običajnih koncentracijah strupenih učinkovin postale odporne.

ROBI COMB PRO predstavlja novost na področju elektronskih pripomočkov za uničevanje uši. Uši najprej odkrije in jih nato po stiku z zobni česalne enote uniči.

## NAVODILA ZA UPORABO

1. V aparat vložite eno 1,5V AA baterijo (slika 1). Ne uporabljajte drugih vrst baterij. Baterija ni priložena izdelku.
2. ROBI COMB PRO je namenjen samo za odkrivanje in uničevanje naglavnih uši in je primeren za vse vrste las.
3. Aparat smete uporabljati le na čistih, suhih in nemastnih lasih.
4. Pred uporabo lase najprej skrbno prečešite z navadnim glavnikom.
5. Aparat lahko uporabljate na dva načina, ki ju izberete s stikalom (slika 2). Brnenje med uporabo pomeni, da aparat deluje pravilno.
6. ROBI COMB PRO usmerite na lasišče pod kotom 45° (slika 3). V položaju 1 (odkrivanje uši) aparat brni. Ko uš odkrije in uniči, preneha brneti. Ko česalno enoto očistite (slika 5), aparat ponovno zabrni in ga lahko spet uporabljate. Pri tem načinu uporabe lahko hitro ugotovite, ali ima otrok uši. V položaju 2 (uničevanje uši) aparat brni in uniči več uši. Ko uniči prvo uš, spremeni ton brnenja, vendar uši uničuje naprej. Brneti preneha šele takrat, ko je tokokrog med zobni česalne enote prekinjen. Takrat morate česalno enoto skrbno očistiti s ščetko, ki je v spodnjem delu ohišja (slika 4). Ko v česalni enoti ni več uši, prhljaja in druge umazanije, glavnik spet brni (slika 5).
7. Če glavnik ne brni več, snemite ohišje s česalno enoto tako, da pritisnete na gumba na obeh straneh aparata (slika 6). Česalno enoto vzemite iz ohišja (slika 7) in jo temeljito očistite s ščetko. Pri tem smete uporabljati tudi medicinski alkohol. Po vsakem čiščenju česalno enoto in ščetko najprej skrbno osušite, pri čemer smete uporabljati tudi sušilec za lase.
8. ROBI COMB PRO posebej učinkovito uničuje odrasle uši. Da bi ušivost uspešno odpravili, aparat uporabljajte približno dva tedna dnevno ali vsaj vsak drugi dan. Tako boste zajeli vse mlade uši in jih uničili, še preden se začnejo razmnoževati.
9. ROBI COMB PRO uporabljajte vedno, kadar otroka srbi lasišče. Las ni treba nujno česati po celi dolžini, saj uši uspešno odkrivamo in uničujemo že s kratkimi česalnimi gibi ob lasišču.
10. Če aparat med česanjem las ne preneha brneti, lasišče zelo verjetno ni okuženo z ušmi.

## ODPRAVA MOTENJ

motnja	možen vzrok	Kaj storiti?
Vključen aparat ne brni. Aparat ne zabrni po uporabi.	umazanija med zobmi	Očistite česalno enoto.
	napačno vložena baterija	Pravilno vložite baterijo.
	prazna baterija	Baterijo zamenjajte z novo 1,5V AA baterijo. Ne uporabljajte drugih vrst baterij!
	zvit zob	Zamenjajte česalno enoto.
	aparat je vlažen ali moker	Posušite ga (s sušilcem za lase).

## OPOZORILO

1. Kovinske česalne enote ne prijemajte z obeh strani hkrati. Tako se boste izognili rahlemu občutku tresenja.
2. Izogibajte se neposrednemu stiku aparata z ušesi, očmi in usti.
3. Občutljive osebe lahko med uporabo na lasišču občutijo rahlo zbadanje, ki ni nevarno.
4. Epileptiki, srčni bolniki in osebe, ki nosijo srčni spodbujevalnik, aparata ne smejo uporabljati in upravljati.
5. Aparat je namenjen izključno uporabi na lasišču. Ne smete ga uporabljati na vnetem in poškodovanem lasišču.
6. Elektronski glavnik ROBI COMB PRO je namenjen otrokom, starejšim od 3 let, in odraslim. Otroci ga smejo samostojno uporabljati samo v prisotnosti odraslih oseb.

## VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

1. Po vsaki uporabi iz česalne enote očistite ostanke uši in umazanije. Kovinske česalne enote ne namakajte v čistilno tekočino. Za čiščenje uporabljajte priloženo ščetko in medicinski alkohol.
2. Z aparatom ravnajte pazljivo. Zaščitite ga pred padci in udarci.
3. ROBI COMB PRO hranite na suhem mestu. Aparat je občutljiv na vlago, zato na vlažnih ali mokrih lasih ni učinkovit. Ne smete ga uporabljati v prostorih z zelo vlažnim zrakom.
4. Če aparata ne uporabljate dalj časa, odstranite baterijo.

## HRANJENJE

Aparat hranite na suhem pri temperaturi od -5 °C do 50 °C.

## VSEBINA

1. Pokrov česalne enote
2. Česalna enota
3. Ohišje česalne enote
4. Aparat
5. Stikalo z dvema položajema
6. Gumba za snemanje ohišja česalne enote
7. Pokrov baterije
8. Ščetka za čiščenje s povečevalnim steklom