



Mikronizirana nosna prha

Navodila za uporabo

Zahvaljujemo se Vam za nakup PiC Indolorovega AirFluxplusa, mikronizirane nosne prhe. Uporabljamo jo pred zdravljenjem z aerosolom, za čiščenje nosne votline, za terapevtsko uporabo z dodajanjem zdravil. Air Fluxplus lahko uporabljajo tako odrasli kot otroci.

Sestavni deli

- A. Univerzalni prozoren pokrov
- B. Ergonomsko oblikovano držalo
- C. Dovodni gumb
- D. 25 ml rezervoar
- E. Povezovalni dulec

Opozorila

Uporablja se v kombinaciji s kompresorskimi inhalatorji.
Pred uporabo natančno preberite navodila.

Priprava in uporaba naprave

- Odprite prozorni rezervoar, tako da ga počasi obrnete v smeri urinega kazalca, da se osvobodi varnostnega zatiča, nato ga odstranite (slika 1);
- Napolnite rezervoar z najmanj 20 ml PiC-ove fiziološke raztopine ali z zdravilom, ki vam ga je predpisal zdravnik (slika 2);
- Rezervoar zaprete tako, da držalo potisnete v rezervoar, nato rezervoar obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne slišite klika (slika 3);
- En konec povezovalne cevke namestite v odprtino inhalatorja, drugega pa nataknite na dulec nosne prhe. (slika 4);
- Vklopite inhalator v električno omrežje
- Preverite ali so vsi deli pravilno nameščeni in povezani;
- Stikalo obrnite na položaj »on« ;
- Namestite napravo v bližino vaše nosnice in tiščite gumb za dovajanje. Med zdravljenjem držite drugo nosnico zaprto s pomočjo prsta. Če gumb za dovajanje izpustite, se bo dovajanje končalo. Za nadaljevanje zdravljenja gumb ponovno pritisnite.

PiCovo fiziološko raztopino iz rezervoarja morate enakomerno porazdeliti med obe nosnici.

Med zdravljenjem normalno dihajte skozi nos. Če je potrebno, za kratek čas prekinite inhalacijo, da se useknete.

Po zdravljenju boste opazili nekaj fiziološke raztopine in sluzi v pokrovčku; to je normalno in ne vpliva na rezultate zdravljenja.

Po uporabi napravo izklopite, jo očistite in razkužite, kot je opisano v odstavku spodaj.

Čiščenje in razkuževanje

Naprava mora biti po uporabi izpraznjena in očiščena, da se izognemo razvoju usedlin, ki lahko vplivajo na delovanje naprave.

Razstavite napravo, operite rezervoar, pokrovček in držalo z mlačno vodo. Če je potrebno, napravo razkužite s pomočjo alkohola ter jo previdno splaknite. Očiščeno napravo pustite, da se posuši sama na zraku.