

PROLUX X Edenight

HR

PROLUX X Edenight HIPERTONIČNA STERILNA MAST ZA OKO

MEDICINSKI PROIZVOD

PROČITAJTE UPUTU PRIJE UPORABE. SAČUVAJTE OVU UPUTU. MOŽDA ĆETE JE TREBATI PONOVRNO PROČITATI.

OPIS PROIZVODA

PROLUX X Edenight je medicinski proizvod koji pruža privremeno ublažavanje simptoma edema rožnice. Viskozna tekstura omogućuje produljeno prljanjanje na površinu oka i na taj način vlaži i štiti oko čak i tijekom noći.

SASTAV

Natrijev klorid 4,5%, natrijev hialuronat 0,4%, vazelinsko ulje, vazelin, monobazični kalijev fosfat, dinatrijev fosfat, lanolin alkohol, prečišćena voda i hidroksimetilglicinat (μwater™).

NAMJENA

PROLUX X Edenight je sterilna, hipertonična mast za oko namijenjena za privremeno ublažavanje simptoma edema rožnice kao što su promjene vida i bol, čak i tijekom noći. PROLUX X Edenight ima veću osmolarnost od suzne tekućine: ta razlika je neophodna za reapsorpciju edematozne tekućine. PROLUX X Edenight povećava koncentraciju soli u suznom filmu čime se izvlači voda iz slojeva rožnice prema površini oka. PROLUX X Edenight sadrži natrijev hialuronat koji stvara zaštitni sloj na površini rožnice te pruža zaštitu i vlaženje. Zbog svojstava podmazivanja i mehaničke zaštite natrijev hialuronat čini primjenu hipertonične masti ugodnijom.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

- Dobro operite ruke prije primjene PROLUX X Edenight.
- Prilikom otvaranja PROLUX X Edenight nemojte koristiti prvu količinu masti koja može biti vodenasta sve dok iz tube ne počne izlaziti mast.
- Zabacite glavu malo prema natrag i povucite donju vjeđu prema dolje kako biste stvorili džep između vjeđe i oka.
- Držite tubu okomito prema oku.
- Lagano pritisnite tubu da istisnete malu količinu PROLUX X Edenight u bolesno oko.
- Najbolje je primijeniti malu količinu masti prije odlaska na spavanje.
- Ako je potrebna dodatna doza, primijenite malu količinu masti svaka tri do četiri sata ili prema preporuci liječnika.
- Pazite da vrh tube ne dodiruje vaše oko ili prste.
- Nakon primjene tubu dobro zatvorite.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

- Nemojte koristiti PROLUX X Edenight u slučaju poznate preosjetljivosti ili alergije na bilo koji sastojak proizvoda.

- U slučaju iritacije oka, prestanite koristiti PROLUX X Edenight i obratite se liječniku za savjet.
- Nakon primjene možete imati osjećaj stranog tijela u oku što prolazi treptanjem.
- Nemojte koristiti ako je pakiranje oštećeno.
- Nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti.
- Upotrijebite u roku od 8 tjedana nakon prvog otvaranja.
- Nemojte gutati proizvod.
- Nemojte dijeliti PROLUX X Edenight s drugim osobama.
- Viskozna tekstura i produljena prisutnost proizvoda u oku mogu uzrokovati privremeno zamućenja vida. Provjerite možete li ponovno jasno vidjeti prije upravljanja motornim vozilima, alatima ili strojevima.
- Prije primjene masti uklonite kontaktne leće da se površina leće ne bi oštetila.
- Ako koristite bilo koje druge kapi ili mast za oči, primijenite ih u razmaku od oko petnaest minuta. Najbolje je PROLUX X Edenight primijeniti posljednji.
- Proizvod je uobičajeno namijenjen za neprekidnu upotrebu tijekom najdulje sedam uzastopnih dana. Ako se vaši simptomi ne poboljšaju, obratite se liječniku za savjet.
- Ne koristite PROLUX X Edenight u slučaju oštećenja oka.

TRUDNOĆA I DOJENJE

Ako ste trudni ili dojite savjetujte se s liječnikom prije primjene PROLUX X Edenight mast za oko.

UVJETI ČUVANJA

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati podalje od izvora topline, na hladnom i suhom mjestu te na temperaturi između 9 i 25 °C.

PAKIRANJE

1 kutija sadrži 5 g hipertonične sterilne masti za oko u tubi.

Proizvođač:

NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3, 20124 Milano, Italija

Distributer za RH:

PROXIMUM d.o.o., Vodnikova 5, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Datum posljednje izmjene: veljača 2019.

SI

PROLUX X Edenight HIPERTONIČNO STERILNO MAZILo ZA OKO

MEDICINSKI PRIPOMOČEK

PRED UPORABO PREBERITE NAVODILA. SHRANITE TA NAVODILA. MORDA JIH BOSTE MORALI ZNOVA PREBRATI.

OPIS IZDELKA

PROLUX X Edenight je medicinski pripomoček, ki omogoča

začasno lajšanje simptomov edema roženice. Viskozna tekstura omogoča dolgotrajen oprijem na površino očesa in tako vlaži in ščiti oko tudi ponoči.

SESTAVA

Natrijev klorid 4,5 %, natrijev hialuronat 0,4 %, vazelinsko olje, vazelin, monobazični kalijev fosfat, dinatrijev fosfat, lanolinski alkohol, prečiščena voda in hidroksimetilglicinat (μwater™).

NAMEN UPORABE

PROLUX X Edenight je sterilno, hipertonično mazilo za oči, namenjeno začasnemu lajšanju simptomov edema roženice, kot so spremembe vida in bolečine, tudi ponoči. PROLUX X Edenight ima večjo osmolarnost kot solzna tekočina: ta razlika je potrebna za reabsorpcijo edematozne tekočine. PROLUX X Edenight poveča koncentracijo soli v solznem filmu, ki vleče vodo iz plasti roženice proti površini očesa. PROLUX X Edenight vsebuje natrijev hialuronat, ki ustvari zaščitno plast na površini roženice ter zagotavlja zaščito in vlaženje. Natrijev hialuronat zaradi svojih mazalnih in mehanskih zaščitnih lastnosti omogoča udobnejšo uporabo hipertoničnega mazila.

ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE

- Pred uporabo PROLUX X Edenight si dobro umijte roke.
- Ko odprete PROLUX X Edenight , ne uporabite prve količine mazila, ki je lahko vodna, dokler mazilo ne pride iz tube.
- Nagnite glavo nekoliko nazaj in povlecite spodnjo veko očesa navzdol, da oblikujete žep.
- Tubo držite navpično na oko.
- Nežno pritisnite tubo, da iztisnete majhno količino PROLUX X Edenight v oko.
- Nanesite majhen del mazila po možnosti pred spanjem.
- Če je potreben dodaten dnevni odmerek, nanesite majhen del mazila vsake tri ali štiri ure ali po navodilih zdravnika.
- Pazite, da se konica tube ne dotika očesa ali prstov.
- Po uporabi dobro zaprite pokrovček.
- OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI:**
- Ne uporabljajte PROLUX X Edenight v primeru znane preobčutljivosti ali alergije na katero koli od sestavin.
- V primeru draženja oči prenehajte uporabljati PROLUX X Edenight hipertonično mazilo za oko in za

nasvet obiščite zdravnika.

- Po nanosu se lahko pojavi občutek tujka, ki mine z mežikanjem z očmi.
- Izdelka ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana.
- Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti.
- Uporabite v 8 tednih po prvem odprtju.
- Ne zaužijte.
- PROLUX X Edenight ne delite z nikomer.
- Viskozne lastnosti in dolgotrajna prisotnost izdelka v očesu lahko povzročita začasno zamegljen vid. Prepričajte se, da znova jasno vidite, preden vozite oziroma preden uporabite orodja ali stroje.
- Pred uporabo mazila odstranite kontaktne leče, v nasprotnem primeru se lahko površina kontaktne leče okvari.
- Če uporabljate druge kapljice za oko ali mazila, naj bo približno petnajst minut razmika med aplikacijama. Priporočljivo je, da PROLUX X Edenight uporabite nazadnje.
- Izdelek je običajno namenjen neprekinjeni uporabi največ sedem zaporednih dni; če se vaši simptomi ne izboljšajo, obiščite zdravnika za nasvet.
- Ne uporabljajte PROLUX X Edenight hipertoničnega mazila za oko v primeru poškodovanega očesa.

NOSEČNOST IN DOJENJE

Med nosečnostjo in dojenjem se pred uporabo PROLUX X Edenight posvetujte z zdravnikom.

POGOJI SHRANJEVANJA

- Shranjujte izven dosega in pogleda otrok!
- Shranjujte pri temperaturi med 9 - 25 °C, na hladnem in suhem mestu, stran od neposredne toplote.

VSEBINA PAKIRANJA

1 škatla vsebuje 5 g hipertoničnega sterilnega mazila za oko v tubi.

PROIZVAJALEC:

NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3, 20124 Milano, Italija

Distributer za SI:

PROKSIMUM PHARMA d.o.o., Pot k sejmišču 26a, 1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija

Datum zadnje revizije navodila: februar 2019.

OBJAŠNENJE SIMBOLA NA PROIZVODU / POMEN SIMBOLOV NA IZDELKU

	Proizvođač / Proizvajalec		CE oznaka / CE oznaka
	Serijski broj / Številka serije		Pročitati uputu za uporabo / Glejte navodila za uporabo
	Rok valjanosti / Rok uporabnosti		Odložiti u smeće / Odvrzite v smeti
	Temperaturne granice / Omejitve temperature		Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno / Prepovedana uporaba, če je ovojnina poškodovana
	Sterilizirano zračenjem / Sterilizirano s sevanjem		Medicinski proizvod / Medicinski pripomoček

UPUTA ZA UPORABU / NAVODILO ZA UPORABO