

**PROLUXX Ededay**  
**KAPLJICE ZA OKO**  
**HIPERTONIČNA RAZTOPINA**

MEDICINSKI PRIPOMOČEK

Brez konzervansov

PRED UPORABO PREBERITE NAVODILA. NAVODILA SHRANITE. MORDA JIH BOSTE MORALI PONOVO PREBRATI.

**OPIS IZDELKA**

**PROLUXX Ededay** je medicinski pripomoček, ki pomaga zagotoviti začasno olajšanje simptomov edema roženice. Zahvaljujoč svoji inovativni formulaciji ima PROLUXX Ededay mukoadhezivne lastnosti: omogoča boljši oprijem na očesno površino, kar zagotavlja vlaženje in zaščito očesa.

**SESTAVA**

Natrijev hialuronat, borova kislina, kolifor P407, trometamol, sorbitol, prečiščena voda.

**NAMEN UPORABE**

PROLUXX Ededay je hipertonična sterilna raztopina za oko brez konzervansov, indicirana za začasno lajšanje simptomov edema roženice, kot sta sprememba vida in bolečina. PROLUXX Ededay ima višjo osmolarnost kot solzna tekočina: ta razlika v osmolarnosti je potrebna za reabsorpcijo edematozne tekočine. Nanos PROLUXX Ededay zagotavlja površini roženice povečano osmolarnost, ki pritegne vodo iz plasti roženice. Natrijev hialuronat, ki ga vsebuje PROLUXX Ededay, tvori zaščitno pregrado na očesu, ki zagotavlja zaščito in vlaženje. Natrijev hialuronat omogoča prijetnejšo uporabo PROLUXX Ededay zaradi svojih mazalnih in mehanskih zaščitnih lastnosti, ki zmanjšujejo značilen pekoč občutek in draženje hipertoničnih raztopin.

**ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE**

- Pred uporabo PROLUXX Ededay si dobro umijte roke.
- Nagnite glavo nekoliko nazaj in povlecite spodnjo veko očesa navzdol, da oblikujete žep.
- Platenko držite navpično nad očesom in glejte proti modri konici platenke.
- Nežno pritisnite stekleničko, da vkapate eno kapljico v oko. Postopek ponovite na drugem očesu.
- Pazite, da se konica platenke ne dotika vaših oči ali prstov.
- Po uporabi dobro zaprite pokrovček.
- Vkapajte eno ali dve kapljici v vsako oko, vsake tri ali štiri ure ali po navodilih zdravnika.

**Opozorila**

- Ne uporabljajte PROLUXX Ededay v primeru znane preobčutljivosti ali alergije na katero koli sestavino.
- V primeru draženja oči prenehajte uporabljati PROLUXX Ededay in se posvetujte z zdravnikom.
- Izdelka ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana.
- Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti.
- Uporabite v 8 tednih po prvem odprtju.
- Ne zaužijte.
- Hraniti izven dosega otrok!
- Pazite, da se konica plastenke ne dotika očesa ali prstov.
- PROLUXX Ededay ne delite z nikomer.
- V redkih primerih se lahko po uporabi PROLUXX Ededay pojavi začasen zamegljen vid zaradi viskoznosti raztopine. Počakajte nekaj minut, preden začnete s kakršno koli dejavnostjo, ki zahteva jasen vid.
- Odstranite kontaktne leče pred uporabo PROLUXX Ededay, saj drugače lahko prizadeta površina kontaktnih leč. Počakajte vsaj trideset minut, preden jih ponovno vstavite.
- Če uporabljate katere koli druge kapljice za oko ali mazila, naj bo vsaj trideset minut razmika med aplikacijama.
- Izdelek je običajno namenjen neprekinjeni uporabi največ sedem zaporednih dni; če se vaši simptomi ne izboljšajo, se posvetujte z zdravnikom.

**NOSEČNOST IN DOJENJE**

Če ste noseči ali dojite, se pred uporabo PROLUXX Ededay kapljic za oko posvetujte z zdravnikom.

**POGOJI SHRANJEVANJA**

Shranjujte izven dosega in pogleda otrok!

Shranjujte pri temperaturi od 9 - 25 ° C, na hladnem in suhem mestu, stran od neposredne toplote.

**VSEBINA PAKIRANJA**

1 škatlica vsebuje 10 ml hipertonične, sterilne raztopine za oko v plastenki.

**Proizvajalec:**

NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3  
20124 Milano, Italija

**Distributer za SI**

PROKSIMUM PHARMA d.o.o.  
Pot k sejmišču 26A  
1231 Ljubljana – Črnuče

Datum zadnje spremembe: junij 2019.

**RAZLAGA SIMBOLOV NA PAKIRANJU**

|                                                                                     |                          |                                                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | Proizvajalec             |    | CE oznaka                                       |
|   | Številka serije          |   | Glejte navodila za uporabo                      |
|  | Rok uporabnosti          |  | Odvrzite v smeti                                |
|  | Omejitev temperature     |  | Prepovedana uporaba, če je ovojnina poškodovana |
|  | Sterilizirano s sevanjem |  | Medicinski pripomoček                           |

**NAVODILA ZA UPORABO**